



CE



Mewa

Instrukcja obsługi i konserwacji

Wydanie 2 z dn. 2020-05-25

Wózek inwalidzki specjalny MEWA

Nowoczesny wózek spacerowy o doskonałych właściwościach jezdnych



UWAGA! Użytkownik z niesprawnością widzenia, czytania lub niesprawnością poznawczą proszony jest o zgłoszenie się do Producenta w celu uzyskania informacji dla użytkownika w odpowiednim formacie.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obsługi i konserwacji zawiera podstawowe informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania wózka inwalidzkiego Mewa, w tym zasady bezpieczeństwa jego użytkowania, opis jego budowy, obsługi i regulacji, przygotowania wózka do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia wózka oraz warunków gwarancji.

Przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (asystentów dziecka - rodziców, opiekunów), które będą przewożone w wózku. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących wózki.

UWAGA! Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość!

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.pl



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu i każdorazowo musi być dołączona do sprzedawanego produktu.

Wersja Instrukcji obsługi i konserwacji: PL

Wydanie: drugie z dnia: 2020-05-25

MyWamKupiec, Bartold, Angres sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji obsługi i konserwacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji

Spis treści

▪ Wprowadzenie	5
1. Przeznaczenie wózka Mewa	5
2. Podstawowe informacje o wózku Mewa	6
3. Szybki start	6
▪ Bezpieczeństwo	7
4. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa	7
5. Tabliczka znamionowa	13
6. Tablice ostrzegawcze	13
7. Oznaczenie symboli.....	13
▪ Produkt	14
8. Ogólna budowa wózka	14
9. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka.....	15
9.1. Mechanizm składania ramy	15
9.2. Rozkładanie ramy wózka. Blokada transportowa.	15
9.3. Składanie ramy.....	15
9.4. Przednie koła skrętne, pełne. Montaż i demontaż. Blokada kierunku jazdy przednich kół.....	16
9.5. Tylnie koła, pełne. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę	16
9.6. System amortyzacji tylnych kół	17
9.7. Ergonomiczna rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowna rączki.....	17
9.8. Hamulec centralny. Załączanie i wyłączenie hamulca	18
9.9. Stopka przechyłowa.....	18
9.10. Uchwyt do przenoszenia	18
9.11. Podnózek. Regulacja i użytkowanie.	18
10. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy	19
10.1. Montaż i demontaż siedziska do ramy	19
10.2. Regulowane siedzisko, tzw. "kołyska"	19
10.3. Regulowane oparcie.....	20
11. Wyposażenie podstawowe	20
11.1. Pasy pięciopunktowe	20
11.2. Barierka zabezpieczająca	21
11.3. Regulowana budka z okienkiem	21
11.4. Kosz na zakupy	22
11.5. Pasy odwodząco-stabilizujące.....	22
11.6. Klin.....	22
11.7. Wkładki wyścielające	22
11.8. Tapicerka	22
12. Wyposażenie dodatkowe	23
12.1. Peloty zagłówek z regulacją ↔ oraz ↕	23
12.2. Peloty piersiowo-lędźwiowe z regulacją ↔ oraz ↕.....	23
12.3. Stolik terapeutyczny.....	23
12.4. Wkładki zwężająco-splycające	24

12.5.	Torba turystyczna.....	24
12.6.	Parasolka przeciwsłoneczna.....	24
12.7.	Rękawice zimowe.....	24
12.8.	Śpiwór na nogi.....	25
12.9.	Moskitiera	25
12.10.	Folia przeciwdeszczowa	25
13.	Specyfikacja techniczna wózka Mewa	26
13.1.	Parametry użytkownika	26
13.2.	Skład surowcowy wózka	26
14.	Dostawa i narzędzia.....	26
15.	Montaż i demontaż wózka	27
16.	Przygotowanie do użytkowania	27
17.	Użytkowanie wózka.....	28
17.1.	Przenoszenie wózka	28
17.2.	Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego	29
17.3.	Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim	29
17.4.	Jazda na wózku inwalidzkim	29
17.5.	Poruszanie się po powierzchniach pochyłych.....	29
17.6.	Pokonywanie progów lub krawężników	29
17.7.	Transport w samochodzie i w innych pojazdach	29
17.8.	Czyszczenie i pielęgnacja.....	30
18.	Przechowywanie wózka	30
18.1.	Przygotowanie wózka do długotrwałego przechowywania	31
18.2.	Zabezpieczenie antykorozyjne	31
19.	Powtórne użycie	31
20.	Serwis i przeglądy okresowe	31
21.	Utylizacja	32
22.	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych	32
23.	Notatki	34
24.	Lista autoryzowanych punktów serwisowych.....	35
25.	Karta Gwarancyjna	36
26.	Warunki gwarancji.....	36

▪ Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu za zakup specjalnego wózka dla młodzieży **Mewa**. Mamy nadzieję, że będzie on przyczyną wielu wspaniałych chwil z Waszym dzieckiem i będzie pomocny każdego dnia. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty spełniały Wasze oczekiwania i najwyższe standardy. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami oraz śledzenia nas na naszej stronie internetowej www.mywam.eu oraz w mediach społecznościowych. Możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszych produktach.

1. Przeznaczenie wózka Mewa

- Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Mewa zaprojektowany został do przewożenia dziecka ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi lub innymi, które utrudniają lub uniemożliwiają mu samodzielne poruszanie się.
- Wózek inwalidzki Mewa jest wyrobem medycznym, który przeznaczony jest do przewożenia dziecka z porażeniem lub niedowładem czterokończynowym, trójkończynowym, dwukończynowym jednostronnym lub skrzyżowanym. Z pośród jednostek chorobowych konkretnego dziecka między innymi można wymienić takie schorzenia jak: mózgowo-rodzeniowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rodzeniowa, stan po urazie kręgosłupa, stan po urazie czaszkowo-mózgowym, stan po udarze, porażenia różnego pochodzenia oraz inne dysfunkcje uszkadzające narząd ruchu i uniemożliwiające samodzielne poruszanie się dziecka.
- Wózek inwalidzki Mewa zaprojektowany został do przewożenia jednego dziecka.
- Wózek inwalidzki Mewa poprzez zastosowanie wielu regulacji, umożliwia wygodne i bezpieczne dopasowanie go do indywidualnych potrzeb dziecka.
- **Wózek Mewa, przeznaczony jest do przewożenia dziecka, którego waga nie przekracza 35kg, o wzroście od 90cm do 125 cm.** Statystycznie są to dzieci w wieku od 3 lat do 8 roku życia.
- Przy doborze wózka najistotniejsze są jednak indywidualne cechy fizyczne i psychiczne dziecka, jego wymiary i masa ciała, warunki mieszkaniowe, otoczenie oraz przede wszystkim jednostka chorobowa konkretnego dziecka.
- Z wózka należy korzystać według wskazań lekarza specjalisty.
- Wózek inwalidzki Mewa przeznaczony jest zarówno do stosowania wewnątrz pomieszczeń (np. mieszkanie, ośrodek rehabilitacji) jak i na zewnątrz (np. park, chodnik), na twardych i równych podłożach, na których wszystkie cztery koła dotykają podłoża oraz ich styczność z podłożem jest wystarczająca, żeby odpowiednio napędzać koła.
- Wózek inwalidzki Mewa jest przeznaczony do sterowania i napędzania tylko przez asystenta (rodzic, opiekun).
- Użytkownikiem wózka inwalidzkiego Mewa jest zarówno dziecko, które będzie w nim przewożone jak i asystent dziecka (jego rodzic, opiekun, lekarz, rehabilitant), który będzie przewoził dziecko w wózku i opiekował się nim.
- Wózek inwalidzki Mewa przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji zachowuje swoją jakość przez okres 3 lat i tyle wynosi spodziewany okres jego użytkowania.
- Ryzyka związane z korzystaniem z wózka zostały opisane szczegółowo w rozdziale: "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa".

2. Podstawowe informacje o wózku Mewa

Wózek inwalidzki dla młodzieży Mewa posiada wiele możliwości, np.:

- regulacja kąta pochylenia oparcia (patrz pkt 10.3)
- regulacji kąta oparcia i siedziska-tzw. „Kołyska” (patrz pkt 10.2)
- regulacji głębokości siedziska- wkładki (patrz pkt 12.4)
- regulacji podnóżka (patrz pkt 9.11)
- regulacja pelot (patrz pkt 12.1 i 12.2)
- wyposażenie dodatkowe (patrz pkt 12)

3. Szybki start

Aby szybko użytkować wózek należy go rozpakować i przygotować do użytkowania wg pkt 15 Montaż i demontaż wózka oraz pkt 16 Przygotowanie do użytkowania. Poniżej wskazano poglądowy schemat, ale nie zastąpi on uważnego przeczytania kompletnej instrukcji.



▪ **Bezpieczeństwo**

4. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa

Wskazówki ogólne:

-  • **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko wypadku - przed przystąpieniem do użytkowania wózka, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z całą treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko wypadku - Przed rozpoczęciem oraz podczas użytkowania wózka należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek i zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji oraz stosować się do innych zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Niestosowanie się do instrukcji, a w szczególności tych dotyczących części ruchomych wózka, może być niebezpieczne dla użytkownika.
 - Zawsze czytaj instrukcję obsługi i konserwacji przed użyciem wózka.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w wózku, ponieważ istnieje ryzyko urazu i grozi to wypadkiem!
-  • **OSTRZEŻENIE!** Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
-  • **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko urazu - zawsze używaj wszystkich dostępnych systemów zabezpieczeń dla użytkującego dziecka. Należą do nich: pasy pięciopunktowe, wkładki zwężające, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, barierka zabezpieczająca lub w jej miejsce stolik terapeutyczny, podnóżek i taśmy do ułożenia stóp na podnóżku.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania wózka istnieje ryzyko poparzenia - należy zachować ostrożność podczas przewożenia dziecka w wózku przy wysokich i niskich temperaturach i przy kontakcie ze skórą, np. na słońcu, na mrozie, w saunie, ponieważ temperatura powierzchni wózka może wzrosnąć przy wystawieniu wózka na promieniowanie słoneczne lub temperatura powierzchni wózka może opaść przy wystawieniu wózka na mróz.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania wózka lub obsługi wózka lub składania wózka, może wystąpić zagrożenie zdrowia użytkowników oraz osób z najbliższego otoczenia, spowodowane wymiarami stałych i ruchomych szczelin i otworów. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania i obsługi wózka oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i ściśnięcia części ciała użytkownika lub osoby towarzyszącej w otworach i szczelinach pomiędzy elementami.
 - Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie.
 - Po zakończeniu tych czynności należy ustabilizować pozycje poszczególnych elementów wózka przez dokładne dokręcenie nakrętek, pokręteł i śrub. Każdorazowo, wykonując powyższe czynności, należy wcześniej wyciągnąć dziecko z wózka!
 - UWAGA! Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia.
 - UWAGA! Dla wózka inwalidzkiego Mewa wraz z obciążeniem maksymalne obciążenie całkowite wynosi 35 kg. Nie należy przekraczać tej wartości.
 - UWAGA! Maksymalne obciążenie torby turystycznej wynosi 2 kg.
 - UWAGA! Maksymalne obciążenie kosza na zakupy wynosi 3kg.




- UWAGA! Maksymalne obciążenie stolika terapeutycznego wynosi 3kg.
- UWAGA! Tylna kieszeń w regulowanej budce z okienkiem służy wyłącznie do umieszczenia w niej folii przeciwdeszczowej lub moskitiery.
- UWAGA! W zależności od wykonanych regulacji wózka inwalidzkiego Mewa - dotyczy ustawienia rączki do pchania wózka, regulacji wysokości oparcia, regulacji kątowej oparcia, regulacji głębokości siedziska, regulacji kątowej siedziska, regulacji kąta podnóżka oraz ustawienia podnóżka - to wózek ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z obecnością wózka inwalidzkiego Mewa, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru, korzystając z poniższych adresów:

Adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

Adres e-mail: mywam@mywam.pl







- Siedzisko terapeutyczne nie nadaje się do użytku dla dzieci poniżej 3 lat
- Zabrania się korzystania z wózka jako z drabiny lub podstawy do wchodzenia na niego w celu sięgnięcia wyżej.
- Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego wózek nie jest przeznaczony.
- UWAGA! Ten wózek to nie jest zabawka! Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- Nie nakładać na głowę. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Wskazówki w szczególności dotyczące budowy i regulacji:




-  **OSTRZEŻENIE!** Wszelkie regulacje wózka i jego elementów, wszelkie ustawienia, zmiany, mocowania i inne czynności związane z dopasowywaniem wózka należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi poważnym niebezpieczeństwem dla dziecka i innych osób!
-  **OSTRZEŻENIE!** Regulacje dokonywane w wózku, wykonane w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z podanym w niniejszej instrukcji, grożą poważnym niebezpieczeństwem dla dziecka i innych osób!
-  **OSTRZEŻENIE!** Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.
- UWAGA! Każda zmiana pochylenia siedziska powoduje zmianę ogólnego środka ciężkości co ma wpływ na stabilność wózka.
- UWAGA! Każda zmiana pochylenia oparcia powoduje zmianę ogólnego środka ciężkości co ma wpływ na stabilność wózka. Każda zmiana pochylenia oparcia wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych!
- UWAGA! Hamulec centralny nie służy do spowalniania wózka w trakcie ruchu i należy go używać wyłącznie w celu unieruchomienia wózka.
- Przednie koła skrętne, w przypadku wyłączenia blokady kierunku jazdy, mogą przy nierównej powierzchni drgać i prowadzić do gwałtownego zatrzymania się wózka oraz jego wywrócenia do przodu. Dlatego przy nierównej powierzchni zaleca się zablokować blokadę kierunku jazdy przednich kół i pchać wózek ze zmniejszoną szybkością.

- Wszystkie regulacje i ustawienia powinny być wykonywane pod nadzorem i opieką lekarza i rehabilitanta.

Wskazówki w szczególności dotyczące montażu i demontażu:

-  • **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć obrażeń upewnij się, że dziecko jest w dalekiej i bezpiecznej odległości, kiedy wózek jest montowany i demontowany.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Wózek musi być całkowicie zmontowany przed użyciem. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów na tym etapie, prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą i Producentem.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Podczas montażu wózka i podczas montażu siedziska do ramy wózka, należy zwrócić szczególną uwagę, żeby siedzisko zamontować w przeznaczonym do tego miejscu ramy i dokładnie pozapinać wszystkie pasy.
- Zamocowanie siedziska do innych elementów ramy wózka jest nieprawidłowe i grozi wypadkiem!
-  • **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się umieszczania na wózku dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie wózka inwalidzkiego Mewa i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka Mewa nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Podczas montażu i demontażu wózka należy zachować bezpieczną odległość od ruchomych części wózka, ponieważ istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców, dłoni lub innych części ciała.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Podczas montażu i demontażu kół do ramy wózka należy upewnić się i sprawdzić ich poprawne zamontowanie, ponieważ istnieje ryzyko urazu.
- UWAGA! Nie należy rozkładać ramy wózka, jeśli blokada transportowa jest założona, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.
- Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do wózka wpływają na jego stabilność.

Wskazówki w szczególności dotyczące przygotowania do użytkowania:

-  • **OSTRZEŻENIE!** Przed użytkowaniem wózka należy się upewnić, że wózek jest prawidłowo zmontowany i wszystkie mechanizmy, zaczepy oraz elementy mocujące zostały prawidłowo złożone, zamknięte i przygotowane do użytkowania. W szczególności dotyczy to: mechanizmu składania ramy, mechanizmu mocowania siedziska do ramy wózka oraz założenia wszystkich czterech kół.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Przed rozpoczęciem jazdy na wózku inwalidzkim Mewa należy upewnić się, że dziecko jest zabezpieczone i ma prawidłowo uregulowane oraz założone pasy pięciopunktowe, ponieważ istnieje ryzyko urazu.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Mechanizm składania ramy jest bardzo ważnym elementem budowy wózka, dlatego każdorazowo przed użytkowaniem wózka należy zwracać szczególną uwagę na brak pęknięć i uszkodzeń mechanizmu składania ramy oraz jego prawidłowe działanie. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń nie wolno użytkować wózka, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka, jego asystenta oraz innych osób! W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i Producentem w celu otrzymania porady.



- **OSTRZEŻENIE!** Prawidłowe użytkowanie mechanizmu składania ramy jest ważne dla bezpieczeństwa dziecka i innych osób.
- UWAGA! Przed użyciem wózka tapicerka zawsze musi być sucha.
- UWAGA! Przed każdorazowym użyciem wózka należy wykonać rozpisane poniżej czynności, a w przypadku nieprawidłowości nie wolno używać wózka. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i Producentem w celu otrzymania porady.

Do czynności przed każdorazowym użyciem wózka należą:

- Sprawdzić wózek pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrozić dziecku podczas eksploatacji wózka.
 - Sprawdzić, czy rama wózka została prawidłowo rozłożona oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
 - Sprawdzić, czy siedzisko zostało prawidłowo zamontowane do ramy wózka oraz czy mechanizm mocowania siedziska do ramy wózka został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
 - Sprawdzić poprawność montażu wszystkich czterech kół.
 - Sprawdzić dobry stan ogumienia bieżnika wszystkich czterech kół.
 - Sprawdzić dobrą sprawność działania hamulca centralnego.
 - Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować wózek do potrzeb dziecka, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska terapeutycznego i wysokość oparcia na plecy, odpowiednie pochylenie siedziska terapeutycznego i pochylenie oparcia na plecy, ustawić odpowiednie pochylenie podnóżka, wyregulować odpowiednią długość pasów pięciopunktowych.
 - Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
 - Sprawdzić, czy tapicerka wózka jest sucha.
 - Zabezpieczyć dziecko pasami pięciopunktowymi, co ma na celu zabezpieczenie dziecka przed wypadnięciem i wysunięciem się z wózka.
 - Zabezpieczyć dziecko wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: pasy pięciopunktowe, wkładki zwiężająco-splycające, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, podnóżek, taśmy podnóżka na stopy, barierka zabezpieczająca lub stolik terapeutyczny. Ma to na celu zabezpieczenie dziecka przed wypadnięciem i wysunięciem się z wózka oraz zabezpieczenie stóp dziecka przed spadnięciem z podnóżka.
- UWAGA! Zabrania się użytkowania wózka, jeżeli stan techniczny wózka lub pojedynczego elementu wózka jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości, wózek jest uszkodzony lub istnieje tylko podejrzenie, że wystąpiło uszkodzenie lub działanie wózka nie jest prawidłowe. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i Producentem w celu otrzymania porady.

Wskazówki w szczególności dotyczące przenoszenia wózka

- UWAGA! Zabrania się przenosić lub podnosić wózek z dzieckiem w środku.
- UWAGA! Ze względu na wagę wózka odradza się podnoszenie wózka niosąc go „w rękach”. W razie konieczności należy zdemontować siedzisko, wszystkie akcesoria oraz koła i przenosić wózek w częściach.

- UWAGA! Nie wolno podnosić wózka trzymając za podnóżek lub barierkę zabezpieczającą, stolik terapeutyczny ani żadne inne wyposażenie dodatkowe.

Wskazówki w szczególności dotyczące wsiadania i zsiadania z wózka oraz prawidłowej pozycji w wózku:

- ! • **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.
- ! • **OSTRZEŻENIE!** Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wózka, dziecko i żadna inna osoba nie stały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!
- UWAGA! Podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka, hamulec centralny musi być załączony.

Wskazówki w szczególności dotyczące jazdy na wózku inwalidzkim:

- ! • **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno puścić wózka samoczynnie lub odpychać od siebie, ponieważ grozi to wypadkiem.
- ! • **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na łyżwach.
- ! • **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się użytkowania produktu w celach sportowych.
- UWAGA! Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wózka, kończyny dziecka nie dostawały się między szprychy kół oraz regulowane elementy wózka.
- UWAGA! Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy wózka, należy upewnić się, czy po obu stronach wózka jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytraśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wózka.
- Podczas poruszania się wózkiem po drogach publicznych, należy przestrzegać kodeksu drogowego.




Wskazówki w szczególności dotyczące poruszania się po powierzchniach pochyłych:

- ! • **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się pozostawiania dziecka w wózku bez nadzoru pełnoletniego i odpowiedzialnego asystenta (rodzic, opiekun), co w szczególności dotyczy pozostawienia dziecka w wózku na terenie pochyłym, ponieważ grozi to wypadkiem i urazem użytkownika!
- ! • **OSTRZEŻENIE!** Podczas korzystania z podjazdów nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia podjazdów, ponieważ grozi to urazem użytkowników i osób z otoczenia.
- ! • **OSTRZEŻENIE!** Podczas korzystania z podjazdów należy upewnić się, że podjazd jest odpowiedni, że koła wózka są wystarczająco wysokie do pokonania podjazdu, że rama wózka nie będzie się stykała z podjazdem oraz należy zapewnić pomoc drugiej osoby, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, uszkodzenia produktu i urazu użytkownika.
- UWAGA! Zawsze należy pamiętać o tym, że położenie środka ciężkości wózka ulega zmianie przy pokonywaniu nierówności lub pochyłości w terenie. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i asekurować wózek.

Wskazówki w szczególności dotyczące pokonywania progów lub krawężników

- ! • **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się wjeżdżania lub zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z dzieckiem jak i samym wózkiem, ponieważ grozi to wypadkiem i urazem użytkownika!

Wskazówki w szczególności dotyczące transportu wózka w samochodzie i innych pojazdach:

-  • **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się przewożenia dziecka w wózku i równocześnie w każdym innych środkach transportu np. w samochodzie, w pociągu, w tramwaju, w autobusie, w samolocie, na statku oraz innych, ponieważ grozi to zranieniem.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się korzystania z siedziska wózka jako fotelika samochodowego, ponieważ grozi to zranieniem.
-  • **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko wypadku i zranienia użytkownika i osób z otoczenia - podczas przewożenia wózka w innych środkach transportu, np. w samochodzie, w autobusie, w pociągu, należy upewnić się, że wózek inwalidzki jest prawidłowo umocowany, co pozwoli zapobiec urazom pasażerów podczas kolizji lub gwałtownego hamowania.
- UWAGA! Podczas przewożenia wózka w innych środkach transportu, np. w samochodzie, w autobusie, w pociągu, przewożenie wózka musi odbywać się bez dziecka oraz należy wózek dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami.
- UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
- UWAGA! Podczas przewożenia wózka w innych środkach transportu, np. w samochodzie, w autobusie, w pociągu, nie wolno używać jednego pasa bezpieczeństwa do zabezpieczenia równocześnie pasażera i wózka inwalidzkiego.
- Należy używać blokady transportowej podczas transportu wózka i jego przechowywania.

Wskazówki w szczególności dotyczące konserwacji i serwisu:

- UWAGA! Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne wózka powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji wózka. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.
- UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.
- W wózku mogą być stosowane tylko oryginalne części zamienne, które są dostarczone lub zalecone przez Producenta.
- Naprawy wózka wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis (patrz rozdz. 19.) lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.
- Wózek należy regularnie czyścić i o niego dbać. Do czyszczenia nie należy używać środków ścierających.
- Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku jego zakupu w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedni dobór akcesoriów dla danego użytkownika.

5. Tabliczka znamionowa


- Na tabliczce znamionowej znajdują się podstawowe informacje o produkcie: nazwa, model, numer seryjny (identyfikacyjny), maksymalne obciążenie, data produkcji, potwierdzenie o zgodności produktu dla wyrobów medycznych, ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji oraz dane producenta (patrz Zdj..5.1).
- Tabliczka znamionowa znajduje się na belce poprzecznej z tyłu ramy wózka, po jej lewej stronie, przyklejona od góry.



Zdj. 5.1






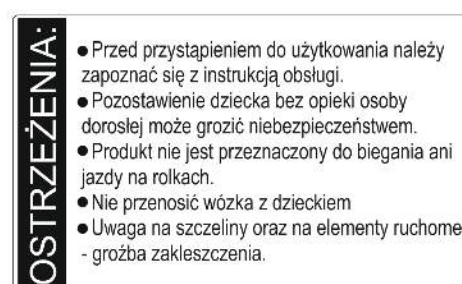

6. Tablice ostrzegawcze

- Na tabliczce ostrzegawczej znajdują się ważne ostrzeżenia dla użytkownika (patrz Zdj..6.1).
- Tabliczka ostrzegawcza znajduje się na tylnej / bocznej części ramy, po obu stronach.

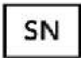

Zdj. 6.1

7. Oznaczenie symboli

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Data produkcji		
	Znak zgodności według dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych o numerze 93/42 EWG zał. VII		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji produktu		

▪ Produkt

8. Ogólna budowa wózka

Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Mewa składa się z dwóch głównych części: ramy wózka z siedziskiem i oparciem, podnóżkiem oraz bardzo bogatym wyposażeniem dodatkowym, które należy dobrać według indywidualnych potrzeb użytkowników.

• Wyposażenie standardowe

Do standardowego wyposażenia wózka mogą należeć:



• Wyposażenie dodatkowe

Do jego elementów mogą należeć (opcje):

- Stolik terapeutyczny - patrz pkt 12.3
- Wkładki zwężająco-splycające - patrz pkt 12.4
- Peloty - patrz pkt 12.1&12.2
- Torba turystyczna - patrz pkt 12.5
- Kosz na zakupy - patrz pkt 11.4
- Folia przeciwdeszczowa - patrz pkt 12.10
- Rękawice zimowe - patrz pkt 12.7
- Śpiwór na nogi - patrz pkt 12.8
- Moskitiera - patrz pkt 12.9
- Parasolka przeciwsłoneczna - patrz pkt 12.6



9. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka

9.1. Mechanizm składania ramy

Mechanizm składania ramy znajduje się wewnątrz ramy oraz na ramie w dwóch miejscach w jej prawej części i w trzech miejscach w jej lewej części. Patrz zdj. 9.1. Opisując te miejsca od góry, od strony rączki do pchania wózka, są to:


- łamaniec prawy i lewy - element umożliwiający złożenie górnej części ramy w celu zmniejszenia jej wymiarów
- mechanizm składania ramy wraz z blokadą



Zdj. 9.1.

Punkty składania ramy

9.2. Rozkładanie ramy wózka. Blokada transportowa.

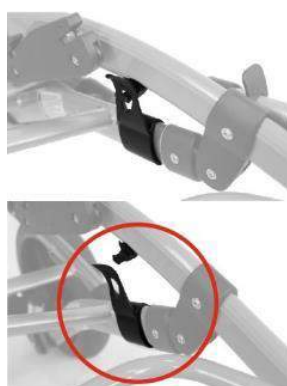

Zdj. 9.2.1

Blokada transportowa



Zdj. 9.2.2

Rozkładanie ramy

W celu rozłożenia (otwarcia) ramy wózka: ułóż ramę wózka poziomo na podłożu i ściągnij blokadę transportową (Zdj. 9.2.1) Następnie pociągnij delikatnie oparcie do pozycji pionowej (Zdj. 9.2.2.). Aby ustawić wózek należy pociągnąć ostrożnie rączkę podnosząc ją delikatnie w górę jednocześnie ustawiając wózek w pozycji zbliżonej do pożądanej aż do momentu zaskoczenia blokady składania ramy. Rama wózka będzie prawidłowo rozłożona dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo zamknięty mechanizm składania ramy. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze zamkniętego mechanizmu składania ramy.

9.3. Składanie ramy

W celu złożenia ramy wózka: naciśnij czerwony przycisk (Zdj. 9.3.1) znajdujący się w górnej części mechanizmu składania ramy i równocześnie pociągnij do góry oba uchwyty (Zdj. 9.3.2) znajdujące się w górnej części mechanizmu składania ramy. Następnie złoż ramę wózka i załóż blokadę transportową.



Zdj. 9.3.1

Czerwony przycisk

Zdj. 9.3.2

Mechanizm składania

9.4. Przednie koła skrętne, pełne. Montaż i demontaż. Blokada kierunku jazdy przednich kół

Zastosowane, wytrzymałe koła gwarantują najwyższą jakość prowadzenia wózka, przyjemność z jazdy i elegancki wygląd. Opony są bezdętkowe, wypełnione specjalnym żelom, który ma właściwości amortyzacyjne bardzo zbliżone do kół pompowanych. Koła są fabrycznie zamontowane w widelcach kół przednich, które od góry zakończone są ośkami skrętu.

Oba koła przednie można ustawić do jazdy na wprost lub odblokować je do skręcania, co znacznie ułatwia manewrowanie wózkiem. Dzięki blokadzie kierunku jazdy przednich kół i możliwości jej zakładania lub ściągania, podczas prowadzenia wózka odczuwalny jest wyraźnie większy komfort zarówno dla dziecka jak i asystenta.

Zaleca się ściągnięcie blokady i umożliwienie skręcania przednich kół podczas prowadzenia wózka po zupełnie gładkiej powierzchni jak np. w centrach handlowych, szkole.

- **Montaż.** Nałóż oba przednie koła. W tym celu załóż oś skrętu koła w otwór systemu szybkiego demontażu, aż do kliknięcia. O prawidłowym założeniu koła świadczy wyraźny dźwięk "klik", pochodzący



Zdj. 9.4.1
Przycisk systemu
szybkiego demontażu

z systemu szybkiego demontażu przednich kół. W celu ściągnięcia kół należy nacisnąć przycisk systemu szybkiego demontażu i ściągnąć koło. Patrz Zdj. 9.4.1

- **Blokada kierunkowa.** W przypadku nierównej nawierzchni, poruszaniu się po powierzchniach pochyłych, podczas pokonywania progów lub krawężników, zaleca się założenie blokady i zablokowanie skręcania przednich kół. W celu zablokowania skręcania przednich kół należy przekręcić pokrętło aż do zaskoczenia blokady – patrz Zdj. 9.4.2.



Zdj. 9.4.2
Pokrętło blokady skręcania

9.5. Tylne koła, pełne. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę

Zastosowane, wytrzymałe koła gwarantują najwyższą jakość prowadzenia wózka, przyjemność z jazdy i elegancki wygląd. Opony są bezdętkowe, wypełnione specjalnym żelom, który ma właściwości amortyzacyjne bardzo zbliżone do kół pompowanych.

Dzięki możliwości zdemontowania zarówno kół jak ich osi, wózek jest mniejszy po złożeniu co ułatwia jego transport i przechowywanie.

Mechanizm montażu kół zamontowany jest wewnątrz tylnych kół i zapewnia szybki montaż i demontaż kół tylnych. Uruchamia się go poprzez naciśnięcie klamry szybkiego montażu (Zdj. 9.5.1.), w kierunku do środka koła, po czym można założyć koło tylne na ośkę koła tylnego lub ściągnąć koło tylne z osi koła tylnego.



Zdj. 9.5.1
Klamra szybkiego montażu

- Montaż kół na ośkę

Podczas zakładania tylnego koła na ośkę koła tylnego, należy wcisnąć klamrę znajdującą się na środku koła i nałożyć koło na początek jego ośki. Następnie należy przestać naciskać na klamrę i kontynuować wsuwanie koła na jego ośkę, aż do kliknięcia. O prawidłowym założeniu koła świadczy wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z mechanizmu szybkiego montażu tylnych kół na ośkę.

- Demontaż kół z ośki


W celu demontażu tylnego koła z ośki tylnego koła, należy wcisnąć klamrę znajdującą się na środku koła i wysunąć koło z jego ośki. – Zdj. 9.5.2.



Zdj. 9.5.2
Demontaż koła

9.6. System amortyzacji tylnych kół

Wózek wyposażony jest w sprężynową amortyzację ramy i tylnych kół, znajdującą się na końcach tylnych nóg ramy, przy styku z belką poprzeczną. Amortyzacja działa automatycznie. Regulacja następuje poprzez uruchomienie dźwigni góra - dół zlokalizowanej od dołu amortyzatora – patrz Zdj. 9.6. W celu usprawnienia przełączenia ustawień dźwignią dopuszcza się jednoczesny nacisk na sprężynę amortyzatora. Pod wpływem przełączenia dźwigni sprężyna amortyzatora zostanie ściśnięta (opcja dla twardego podłoża) lub rozciągnięta (miękkie podłoże).

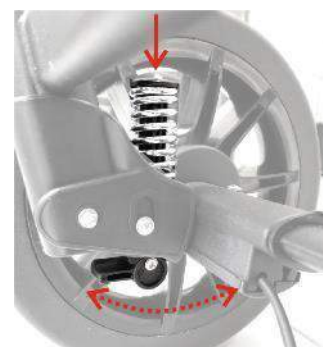

Zdj. 9.6
Amortyzator z regulacją

9.7. Ergonomiczna rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowa rączki.

Rączka do pchania wózka zapewnia pewny uchwyt w różnych warunkach jazdy. Posiada możliwość regulacji służącej do dopasowania wysokości uchwytu dla asystenta dziecka, który prowadzi wózek – Zdj. 9.7



Zdj. 9.7

Mechanizm regulacji kątowej rączki

- Mechanizm regulacji.

Są to dwa przyciski po zewnętrznej stronie ramy, umieszczone na przegubach rączki do pchania wózka.

- Regulacja kątowa rączki do pchania wózka

W celu zmiany kąta pochylecia rączki do pchania wózka należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski mechanizmu regulacji kątowej rączki do pchania i zmienić jej kąt pochylecia. Po ustawieniu rączki w odpowiedniej pozycji, należy przestać naciskać na przyciski, co spowoduje automatyczne zablokowanie rączki do pchania w żądanej pozycji.

9.8. Hamulec centralny. Załączanie i wyłączenie hamulca

Pedał hamulca centralnego (Zdj. 9.8), którego naciśnięcie blokuje bezpośrednio oba tylne koła wózka, znajduje się pośrodku belki poprzecznej, z tyłu ramy wózka.

- Załączanie i wyłączenie hamulca centralnego

W celu załączenia hamulca centralnego należy nacisnąć pedał hamulca w dół, w kierunku do podłoża, aż do kliknięcia. O prawidłowym załączeniu hamulca świadczy wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z hamulca centralnego.

W celu wyłączenia hamulca centralnego należy pociągnąć pedał hamulca do góry.



Zdj. 9.8

Hamulec centralny

9.9. Stopka przechyłowa

Stopka przechyłowa (Zdj. 9.9) znajduje się po prawej stronie belki poprzecznej, z tyłu ramy wózka. W celu jej użycia należy nacisnąć stopkę przechyłową i jednocześnie pociągnąć do siebie rączkę do pchania wózka, co z kolei spowoduje podniesienia się do góry przedniej części wózka wraz z przednimi kołami.

Używanie stopki przechyłowej ułatwia wjazd wózka na niewielkie progi lub krawężniki.



Zdj. 9.9

Stopka przechyłowa

9.10. Uchwyt do przenoszenia

Uchwyt do przenoszenia ramy wózka znajduje się między mocowaniami kosza na zakupy. (Zdjęcie 9.10)



Zdj. 9.10

Uchwyt do przenoszenia

9.11. Podnóżek. Regulacja i użytkowanie.



Zdj. 9.11

Regulacja podnóżka

Regulowany podnóżek należy do standardowego wyposażenia wózka inwalidzkiego Mewa.

- Regulacja wysokości podnóżka. W celu zmiany wysokość podnóżka należy śrubokrętem typu krzyżak wykręcić śruby (zdj. 9.11), następnie ustawić podnóżek na odpowiedniej wysokości i skrócić podnóżek śrubami.

- Mechanizm regulacji kątowej całego podnóżka
W celu zmiany pochylenia podnóżka, należy wcisnąć przyciski zaznaczone na zdjęciu po obydwóch stronach podnóżka, następnie ustawić odpowiednią pozycję i zwolnić przyciski.

- Użytkowanie podnóżka. Zaleca się ustawić płytę podnóżka na takiej wysokości, żeby stopy dziecka mogły się na niej swobodnie oprzeć całą swoją powierzchnią, a jednocześnie uda dziecka były położone równoległe do

płaszczyzny siedziska. W płycie podnóżka znajdują się taśmy mocujące stopy dziecka. Zaleca się ich zakładanie podczas użytkowania wózka.

Standardowo płyta podnóżka znajduje się w położeniu poziomym. Jednak w czasie transportu, przechowywania, rehabilitacji, wsiadania i wysiadania z wózka inwalidzkiego Mewa, płyta podnóżka musi być złożona i obrócona w kierunku stelaża podnóżka.

10. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy

10.1. Montaż i demontaż siedziska do ramy

Dwa zaczepy ramy do siedziska są bardzo ważnymi elementami budowy wózka. Służą połączeniu siedziska wózka do ramy wózka. Prawidłowe użytkowanie zaczepów ramy jest ważne dla bezpieczeństwa dziecka i innych osób. Zawsze zwracaj szczególną uwagę na brak pęknięć, uszkodzeń zaczepów ramy oraz jej prawidłowe działanie. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń nie używaj wózka, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka i innych osób!

- **Montaż siedziska.** Siedzisko można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. W celu



Zdj. 10.1.11

Zaczepy siedziska do ramy



Zdj. 10.1.2

Przycisk zwolnienia siedziska

zamontowania siedziska, nałóż siedzisko w zaczepy ramy. Dociśnij siedzisko, aż do dwóch kliknięć. O prawidłowym założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów ramy. Patrz Zdj. 10.1.1.

Demontaż siedziska. W celu zdemontowania siedziska, należy wcisnąć w dół, w kierunku podłoża, po obu

stronach wózka czerwone przyciski, znajdujące się u spodu obu zaczepów ramy (Zdj. 10.1.2). Następnie wysuń siedzisko z zaczepów ramy.

10.2. Regulowane siedzisko, tzw. "kołyska"

Wózek wyposażony jest w siedzisko, które można ustawić w 4 różnych pozycjach pochylenia (kołyska). W celu zmiany pochylenia siedziska należy pociągnąć w tył stalowy uchwyt umieszczony z tyłu siedziska i powoli zmieniać pochylenie siedziska. Po ustawianiu siedziska w pożądaną pozycję należy puścić uchwyt.

UWAGA! Każda zmiana pochylenia siedziska powoduje zmianę ogólnego środka ciężkości. Ma to wpływ na stabilność wózka.

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!



Zdj. 10.2

Regulacja siedziska



Zdj. 10.3

Uchwyt regulacji kąta oparcia

10.3. Regulowane oparcie

Wózek wyposażony jest w oparcie, które można ustawić w różnych pozycjach pochylenia: od pozycji siedzącej do pozycji leżącej. W celu zmiany pochylenia oparcia należy je odciążyć, poprzez nieznaczne przesunięcie całego oparcia w kierunku pozycji bardziej siedzącej. Następnie należy pociągnąć do góry uchwyt umieszczony z tyłu oparcia i powoli zmienić pochylenie oparcia. Po ustawieniu oparcia w odpowiedniej pozycji, należy opuścić w dół uchwyt umieszczony z tyłu oparcia.

UWAGA! Każdorazowa zmiana pochylenia oparcia wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych!

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

11. Wyposażenie podstawowe

11.1. Pasy pięciopunktowe



Zdj. 11.1.

Pasy pięciopunktowe

Wózek inwalidzki Mewa jest standardowo wyposażony w profesjonalne, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa

- Regulacja pasów pięciopunktowych. Przed założeniem dziecka pasów pięciopunktowych należy je wyregulować. W celu regulacji długości pasów należy przesunąć regulatory na szelkach w górę lub w dół i odpowiednio przesunąć ochraniacze. W celu regulacji wysokości zamocowania pasów do oparcia na plecy, należy przełożyć mocowanie szelek z mocowania niskiego na mocowanie wysokie lub odwrotnie

- Użytkowanie. W celu założenia dziecka pasów pięciopunktowych, należy założyć dziecku szelki z prawej i lewej strony a następnie wpiąć obie szelki w klamrę do zapinania pasów, która zamocowana jest na siedzisku. W celu ściągnięcia z dziecka pasów pięciopunktowych, należy nacisnąć przycisk na klamrze górnej (piersiowej) oraz dolnej i wypiąć obie szelki z klamry oraz powoli ściągnąć te szelki z prawej i lewej strony dziecka.

Uwaga! Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.

11.2. Barierka zabezpieczająca

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w barierkę zabezpieczającą, która w przypadku określonych wskazań zapobiega wypadnięciu siedzącego dziecka do przodu.

- Montaż i demontaż barierki. Barierkę zabezpieczającą montuje się za pomocą tych samych mocowań, co stół terapeutyczny, dlatego nie można użytkować obu tych elementów równocześnie. W celu montażu barierki zabezpieczającej należy wsunąć ją w mocowanie stołu lub barierki aż do kliknięcia.

Barierka będzie prawidłowo zamontowana dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo wsunięta w mocowanie stołu lub barierki. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze połączonego mocowania stołu lub barierki.

W celu demontażu barierki należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się przy mocowaniu stołu lub barierki oraz wysunąć barierkę.



Zdj. 11.2

Barierka zabezpieczająca

11.3. Regulowana budka z okienkiem

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w regulowaną budkę z okienkiem, który pomaga chronić dziecko przed słońcem lub deszczem. Elementami budki są: stelaż budki (przedni i tylny łuk), mechanizm regulacji otwierania budki (prawy i lewy), dwa zatrzaski z czerwonymi przyciskami mocujące budkę do ramy, tapicerka daszku, oraz okienko z moskitierą z zamkiem błyskawicznym.

- Montaż. Mocowaniem regulowanej budki z okienkiem są dwa plastikowe elementy znajdujące się na zewnętrznych bokach górnej części oparcia na plecy.

W celu montażu budki należy ustawić oparcie na plecy w pozycji pionowej, a następnie równolegle nasunąć oba zatrzaski budki do mocowań na oparciu na plecy. Budkę montujemy w taki sposób by tapicerka z tyłu/dołu zachodziła za plecy wózka.

- Demontaż. W celu demontażu budki z okienkiem, należy nacisnąć dwa czerwone przyciski na zatrzaskach mocujących budkę oraz wysunąć te zatrzaski z mocowań na oparciu na plecy.

- Użytkowanie. W celu zmiany wielkości powierzchni daszka, należy chwycić za łuk przedni oraz łuk tylny stelaża daszka i przybliżając lub oddalając oba łuki od siebie lub do siebie, ustawić żądaną pozycję. Mechanizm regulacji wielkości powierzchni budki zatrzaskuje się automatycznie.

Cechą szczególną budki jest okienko z moskitierą zapewniające przewiew. Okienko otwiera się i zamyka za pomocą zamka błyskawicznego.



Zdj. 11.3

Regulowana budka

Kosz na zakupy

Wózek wyposażony jest w kosz na zakupy, który zamocowany jest w dolnej części ramy wózka. Kosz na zakupy służy do przewożenia drobnych, zwyczajnych artykułów przemysłowych życia codziennego, odpornych na wstrząsy, uderzenia, stłuczenia, zamoknięcie, zalanie i zabrudzenie. Maksymalne obciążenie kosza na zakupy wynosi 3kg.



Zdj. 11.4

Kosz na zakupy

11.4. Pasy odwodząco-stabilizujące



Zdj. 11.5

Pasy odwodząco-stabilizujące

Pasy odwodząco-stabilizujące służą do dodatkowej stabilizacji miednicy i zapobiegają wyślizgnięciu się dziecka z wózka. Prawidłowy sposób ich stosowania polega na takim zapięciu na udach dziecka, żeby jego miednica przylegała jak najbliżej oparcia na plecy. Zapewni to zdrowszą i bardziej komfortową pozycję dziecka w wózku.

- **Regulacja.** W celu regulacji długości pasów odwodząco-stabilizujących, należy przesunąć regulatory na przednich taśmach pasów w górę lub w dół.

- **Użytkowanie.** W celu założenia dziecka pasów odwodząco-stabilizujących należy posadzić dziecko na zamontowane pasy, następnie opleść nogę dziecka i zapiąć obie klamry pasów do obu taśm przednich. W celu ściągnięcia z dziecka pasów odwodząco-stabilizujących należy rozpiąć obie klamry pasów od taśm przednich.

11.5. Klin

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w klin, który w przypadku określonych wskazań zapewnia odwodzenie (odchylenie na boki) kończyn dolnych dziecka od jego środka ciała. Klin posiada dwustopniowy poziom regulacji. Patrz Zdj. 11.6.



Zdj. 11.6

Klin



Zdj. 11.7

Wkładki wyścielające

11.6. Wkładki wyścielające

Wózek Mewa wyposażony jest we wkładki wyścielające, zabezpieczające rzepy na oparciu wózka, w przypadku, gdy nie są zakładane dodatkowe elementy wyposażenia. Patrz Zdj. 11.7.

11.7. Tapicerka

Wózek Mewa wyposażony jest w tapicerkę, która w całości jest demontowana do czyszczenia. W tym celu należy odpiąć wszystkie elementy mocujące ją do ramy wózka. Jak czyścić tapicerkę zostało opisane w pkt 17.8. Czyszczenie i pielęgnacja.

12. Wyposażenie dodatkowe

12.1. Peloty zagłówka z regulacją ↔ oraz ↕

W celu regulacji pelot zagłówka należy rozsunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia. Następnie wykręć pokrętła (pokrętła od pelot), które znajdują się na tylnej stronie oparcia. Przełóż peloty w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Dobrze przykręć peloty pokrętłami. Na koniec należy zasunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia.



Zdj. 12.1.

Widok na wózek z pelotami


12.2. Peloty piersiowo-lędźwiowe z regulacją ↔ oraz ↕

W celu regulacji pelot piersiowo-lędźwiowych należy rozsunąć zapięcie tapicerki na przedniej (Zdj. 12.2.1) i tylnej stronie oparcia (Zdj. 12.2.2). Następnie należy wykręcić pokrętła (pokrętła od pelot, Zdj. 12.2.3), które znajdują się na tylnej stronie oparcia oraz przełożyć peloty w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Peloty należy dobrze przykręcić pokrętłami. Na koniec zasunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia (Zdj. 12.2.4).



Zdj. 12.2.1.

Rozpięcie tapicerki

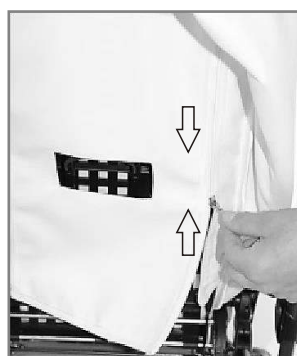

Zdj. 12.2.2.

Rozpięcie tapicerki



Zdj. 12.2.3.

Wykręcenie śrub



Zdj. 12.2.4.

Zapięcie tapicerki

12.3. Stolik terapeutyczny

Wózek wyposażony jest w antypoślizgowy stolik terapeutyczny, którego maksymalne obciążenie wynosi 3kg. W celu montażu stolika należy wsunąć go w mocowanie stolika lub bariery aż do kliknięcia.

Stolik będzie prawidłowo zamontowany dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo wsunięty w mocowanie stolika lub bariery. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze połączonych mocowania stolika lub bariery.



Zdj. 12.3

Stolik terapeutyczny

W celu demontażu stolika należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się przy mocowaniu stolika lub barierki oraz wysunąć stolik.

Uwaga. Poziome ułożenie stolika może ulegać zmianie wraz z regulacją kołyski a tym samym przedmioty umieszczone na stoliku muszą zostać zabezpieczone.

12.4. Wkładki zwężająco-sptycające

Wózek Mewa wyposażony jest w zestaw wkładek zwężająco-sptycających (Zdj. 12.4). Służą one do regulacji wewnętrznych wymiarów szerokości i głębokości siedziska. Tapicerka wkładek jest zdejmowalna błyskawicznemu, co umożliwia ich wymianę lub czyszczenie.

- Montaż. Wkładki montujemy w dowolnym miejscu wózka, na dowolnej wysokości dostosowując się do wskazań pacjenta. Montaż odbywa się za pomocą rzepów na dolnej, tylnej i zewnętrznej stronie wkładki.

- Demontaż odbywa się ściągając element – odrywając rzep od tapicerki wózka.



Zdj. 12.4

Wkładki zwężająco-sptycające

12.5. Torba turystyczna

Duża i elegancka torba turystyczna montowana jest na dwóch uchwytych, znajdujących się na wewnętrznej stronie rączki do pchania wózka. Maksymalne obciążenie torby wynosi 2kg.

12.6. Parasolka przeciwsłoneczna

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w parasolkę przeciwsłoneczną, która pomaga chronić dziecko przed słońcem.

12.7. Rękawice zimowe

Dwie rękawice zimowe, zwiększające komfort asystenta dziecka podczas chłodniejszej pogody, można założyć na rączkę do pchania wózka. Najpierw należy założyć dwie materiałowe obejmy i zapiąć je rzepem na rączce do pchania wózka po czym na te materiałowe obejmy nakłada się rękawice i spina je napami. Zdj. 12.7.



Zdj. 12.5

Torba turystyczna



Zdj. 12.6

Parasolka przeciwsłoneczna



Zdj. 12.7

Rękawice zimowe

12.8. Śpiwór na nogi

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w śpiwór na nogi, zwiększający komfort dziecka podczas chłodniejszej pogody. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego - barierki.

W celu montażu śpiwora na nogi, należy założyć go od dołu na podnózek, a od góry przełożyć przez barierkę zabezpieczającą i spiąć go napami do ramy wózka. Zdj. 12.8

12.9. Moskitiera

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w moskitierę, która utrudnia owadom bezpośrednią styczność z dzieckiem. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego. W celu montażu moskitiery należy połączyć ją zamkiem w budce a następnie zasłonić moskitierą siedzisko wózka i podnózek mocując z boku. Zdj. 12.9

12.10. Folia przeciwdeszczowa

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w folię przeciwdeszczową, która pomaga chronić dziecko przed wilgocią. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego. W celu montażu folii przeciwdeszczowej należy nałożyć ją od góry na całą regulowaną budkę z okienkiem a następnie zasłonić folią siedzisko wózka i podnózek. Zdj. 12.10.



Zdj. 12.8
Śpiwór na nogi



Zdj. 12.9
Moskitiera



Zdj. 12.10
Folia przeciwdeszczowa

13. Specyfikacja techniczna wózka Mewa

Producent	MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna
Adres	ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
Typ	Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
Model	Mewa

długość wózka	111 cm
szerokość wózka	65 cm
wysokość wózka	120 cm
masa całkowita	od 23 kg
efektywna głębokość siedziska	26,5*/29
szerokość siedziska	28*/33
wysokość oparcia	62 cm
szerokość oparcia	31 cm
odległość podnóżka od siedziska	19-29 (co 2,5 cm)
długość wózka złożonego do transportu	rama 84 / siedzisko 88
szerokość wózka złożonego do transportu	rama 64 / siedzisko 45
wysokość wózka złożonego do transportu	rama 26 / siedzisko 43
nośność kosza	3 kg
nośność torby	2 kg
maksymalne obciążenie	35 kg

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych. Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°.

13.1. Parametry użytkownika

max. waga pacjenta	35 kg
wzrost pacjenta	90-125 cm

13.2. Skład surowcowy wózka

Stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

14. Dostawa i narzędzia

Wózek inwalidzki Mewa jest dostarczany w kartonie i wstępnie zmontowany. W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama wózka wraz z siedziskiem i oparciem, podnóżek oraz koła, budka
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Przed użyciem należy sprawdzić i upewnić się, że w otrzymanym kartonie znajdują się wszystkie elementy i żaden z nich nie uległ uszkodzeniu np. podczas transportu. W przypadku stwierdzenia, że w

otrzymanym kartonie brakuje jakiegoś elementu lub jakiś element uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą i Producentem, w celu otrzymania brakujących elementów lub wymiany produktu na nowy, w pełni kompletny i sprawny.

Wielofunkcyjność oraz bardzo bogate wyposażenie wózka inwalidzkiego Mewa pozwalają na dopasowanie wózka do osobistych wymagań użytkownika. W tym celu zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania.

Do montażu i demontażu wózka inwalidzkiego Mewa nie są wymagane żadne narzędzia za wyjątkiem regulacji wysokości podnóżka, gdzie jest potrzebny śrubokręt krzyżakowy.

15. Montaż i demontaż wózka

• **Montaż wózka.** Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany. Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) zamontować koła tylne na oś
- b) rozłożyć ramę wózka wraz z podnóżkiem regulując parametry:
 - załączyć / wyłączyć blokadę kierunku jazdy przednich kół
 - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania wózka
 - ustawić kąt pochylenia siedziska
 - ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy
 - wyregulować długość pasów pięciopunktowych
 - wyregulować wysokość podnóżka oraz kąt pochylenia podnóżka
- c) zamontować odpowiednie wyposażenie oraz wyregulować parametry, przykładowo:
 - wyregulować szerokość i głębokość użytkową siedziska (wkładki zwężająco-splycające)
 - założyć barierkę bezpieczeństwa lub stolik terapeutyczny
 - wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące
 - wyregulować budkę z okienkiem
 - założyć i wyregulować klin
 - założyć torbę turystyczną
 - założyć kosz na zakupy
 - założyć wybrane elementy wyposażenia dedykowanego porom roku: śpiwór na nogi, rękawice zimowe, moskitiera, folia przeciwdeszczowa, parasolka

• **Demontaż wózka.** W celu demontażu wózka należy:

- a) zdemontować wyposażenie dodatkowe
- b) odpiąć siedzisko
- c) zablokować koła przednie, złożyć podnóżek i ramę wózka
- d) odpiąć koła tylne
- e) złożyć wózek zamykając go blokadą transportową

16. Przygotowanie do użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka:

- należy zadbać, żeby obuwiu dziecka było wygodne i dobrze stabilizowało staw skokowy.

- należy zadbać, żeby dziecko nie było umieszczone w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką wózka. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała dziecka oraz względy higieniczne dziecka.
- W przypadku dzieci mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko wózka specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania wózka.

W celu rozpoczęcia prawidłowego użytkowania wózka należy wykonać wszystkie wymienione poniżej czynności:

- Sprawdzić dobry stan techniczny wózka i wszystkich jego elementów, a jeżeli stan techniczny wózka lub jego pojedynczego elementu jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości, to wtedy wózka nie wolno użytkować. Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą i Producentem.
- Umieścić wózek na płaskiej i bezpiecznej powierzchni.
- Prawidłowo rozłożyć wózek
- Załączyć hamulec centralny.
- Wykonać wszystkie niezbędne regulacje wózka
- Przygotować do założenia pasy pięciopunktowe, taśmy na podnóżku oraz pasy odwodząco-stabilizujące, o ile te wyposażenie jest dostępne.
- Umieścić dziecko w wózku i upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla dziecka odpowiednie i bezpieczne.
- Założyć dziecku pasy pięciopunktowe i taśmy na podnóżku.
- Założyć dziecku inne niezbędne wyposażenie wózka, o ile jest dostępne.

17. Użytkowanie wózka

17.1. Przenoszenie wózka

Najlepszym sposobem przenoszenia wózka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół. W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe (np. w celu transportu wózka w samochodzie), to ze względów bezpieczeństwa, wózek można podnosić i przenosić po uprzednim demontażu wyposażenia dodatkowego oraz kół, w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka z zamontowanymi kołami, należy zachować szczególną ostrożność.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka z zamontowanymi kołami, należy złożyć ramę wózka, a następnie trzymać ramę wózka wyłącznie za wskazane elementy stałe ramy.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy podnosić całego wózka, czyli ramy z siedziskiem i z oparciem na plecy, kołami, podnóżkiem i zamontowanym wyposażeniem dodatkowym, ponieważ grozi to uszkodzeniem zdrowia.

Nie należy podnosić wózka chwytając za jego podnóżek lub barierkę zabezpieczającą, stolik terapeutyczny ani żadne inne wyposażenie dodatkowe, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu i zagraża bezpieczeństwu innych osób z otoczenia.

17.2. Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka inwalidzkiego należy umieścić wózek jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulec centralny jest załączony, a płyta podnóżka podniesiona jest do góry w celu uniknięcia stawania na niej, użytkownik może się przesiadać.

17.3. Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.

17.4. Jazda na wózku inwalidzkim

Podczas użytkowania wózek zawsze należy trzymać za rączkę do pchania wózka, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się wózka. Zwolnij hamulec centralny jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj wózek w bezpiecznym kierunku.

17.5. Poruszanie się po powierzchniach pochyłych

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawiać wózek przodem do kierunku jazdy.

Ogranicz prędkość na powierzchniach pochyłych i poruszaj się jak najwolniej. Asystent prowadzący wózek (rodzic, opiekun) musi dysponować odpowiednią siłą pozwalającą kontrolować stabilność wózka inwalidzkiego.

17.6. Pokonywanie progów lub krawężników

Podczas pokonywania małych przeszkód (niewielkie progi, małe krawężniki itp.), należy przyblokować stopą stopkę przechyłową oraz rączkę do pchania wózka w kierunku w dół i do siebie, żeby unieść przednie koła wózka i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania wózka do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła wózka i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

17.7. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

- W celu przewiezienia wózka Mewa w samochodzie należy zdemontować z wózka wszystkie akcesoria i przechować je w bezpiecznym miejscu. Następnie należy zdemontować wózek i umieścić go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielnym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach

komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z wózkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach należy zdemontować z wózka wszystkie akcesoria i przechować je w bezpiecznym miejscu. Następnie należy zdemontować wózek (patrz rozdział 14) i umieścić go w miejscu przechowywania bagażu w danym pojeździe. Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku pojazdu oddzielnym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu.

Wózka Mewa nie należy używać jako siedziska do przewożenia dziecka w pojeździe.

17.8. Czyszczenie i pielęgnacja

Niewielkie wycieki i plamy mogą być usunięte z powierzchni za pomocą kuchennej gąbki oraz przy użyciu czystej, ciepłej wody.

Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka. Nie ścieraj - ścieranie spowoduje rozprzestrzenienie się plamy na większą powierzchnię i może zniekształcić teksturę tkaniny.

Postępowanie w przypadku wodnych plam, takich jak plamy z jedzenia, napojów i olejów roślinnych, jest następujące:

- Osusz plamę dociskając na całej jej powierzchni biały papierowy ręcznik, chusteczkę lub chłonną, czystą szmatkę.
- Mały kawałek szmatki nasącz słabym roztworem detergentu i ciepłej wody (lub zimnej wody w przypadku zabrudzeń krwią) i opłucz plamę usuwając ją od zewnątrz do środka, żeby uniknąć jej powiększania się. Nie używaj zbyt mokrej szmatki, gdyż nadmierna ilość cieczy może spowodować powstanie obwódki po wyschnięciu lub powiększenie się plamy i zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
- Może być konieczne powtórzenie powyższej czynności w zależności od rodzaju plamy i ilości zaplamionego materiału. Powyższą czynność należy kontynuować, aż do całkowitego usunięcia plamy, ale zawsze pamiętaj, żeby usunąć nadmiar wilgoci z zaplamionego materiału przed ponownym opłukiwaniem.
- Następnie należy opłukać materiał używając tylko letniej wody bez detergentu, za pomocą czystej gąbki lub czystej białej szmatki. Jak powyżej, należy opłukiwać materiał w miejscu po plamie w odpowiednim kierunku, czyli od zewnątrz do środka.

Środki dezynfekujące nie zawierające rozpuszczalników organicznych mogą być stosowane zgodnie ze wskazówkami producenta środka.

Nie należy zamaczać tkaniny. Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.

Nie należy używać rozpuszczalników organicznych lub środków do prania chemicznego.

W celu dezynfekcji można użyć małą ilość zwykłego, domowego wybielacza, rozcieńczonego z wodą o maksymalnym stężeniu 3% wybielacza.

UWAGA! Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

18. Przechowywanie wózka

Wózek należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C.

18.1. Przygotowanie wózka do długotrwałego przechowywania

W celu przygotowania wózka inwalidzkiego Mewa do długotrwałego przechowywania, należy zabezpieczyć produkt i wykonać wszystkie czynności serwisowe przedstawione w rozdziale "Przeglądy okresowe" tak, jakby nastąpił ich czas.

Wózek należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

18.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu uniknięcia uszkodzeń korozyjnych wózka, nie powinno się go użytkować ani zostawiać w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Po zamoczeniu wózka, należy wytrzeć wszystkie zamoczone elementy miękką szmatką do sucha oraz zabezpieczyć środkiem konserwującym na bazie lekkiego oleju. Nie dotyczy to tapicerki wózka, której zapewnienie czystości i konserwacji opisane jest szczegółowo w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja.

Standardowo wózek pokryty jest powłokami najwyższej jakości. W razie uszkodzenia lakieru należy uszkodzenie zabezpieczyć poprzez nałożenie zaprawki przy użyciu proponowanego przez Producenta lakieru.

Regularne czyszczenie i smarowanie mechanizmów wózka lekkim olejem, gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie wózka inwalidzkiego.

19. Powtórne użycie

Produkt nadaje się do powtórnego użycia.

Wszelkie produkty powtórnego użycia podlegają szczególnemu obciążeniu.

W związku z tym ich cechy i osiągi mogą odbiegać od produktu nowego w takim stopniu, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów i osób trzecich w trakcie ich użytkowania.

Produkt przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji zachowuje swoją jakość przez okres 3 lat i tyle wynosi spodziewany okres jego użytkowania.

W celu wtórnego użycia należy:

- Zdemontować wszystkie elementy tapicerowane i wymienić je na nowe.
- Ramę wózka wraz z kołami i elementami do prowadzenia należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować dostępnymi na rynku środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.
- Następnie produkt musi zostać sprawdzony przez autoryzowany Serwis (patrz rozdział 25) lub Producenta pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Wszelkie zużyte części oraz komponenty niepasujące lub nienadające się dla użytkownika należy wymienić na nowe.
- Tak przygotowany produkt może zostać ponownie wprowadzony do użycia.

20. Serwis i przeglądy okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wózka inwalidzkiego Mewa, należy regularnie i dokładnie poddawać go przeglądom i czynnościom serwisowym wskazanym w tabeli poniżej.

W sytuacji, gdy użytkownik wózka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wózek do specjalistycznego punktu serwisującego wózki inwalidzkie lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt) lub bezpośrednio u Producenta.

W wózku mogą być stosowane tylko oryginalne części zamienne, które są dostarczone lub zalecone przez Producenta.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem wózka**
 - Kontrola sprawności hamulca centralnego - Po załączeniu hamulca centralnego oba tylne koła wózka powinny być zablokowane i nie mogą się obracać
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie siedziska terapeutycznego z oparciem na plecy do ramy wózka, prawidłowe zamontowanie wszystkich czterech kół, prawidłowe funkcjonowanie pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.
 - Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte
 - Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- **Co każdy jeden miesiąc**
 - Czyszczenie wózka - Należy oczyścić miękką szmatką wszelkie elementy ruchome, łożyska, mechanizmy regulacyjne, a następnie nasmarować je kilkoma kroplami lekkiego oleju. Zaleca się ostrożność, żeby nie ubrudzić tapicerki wózka lub własnego ubrania
 - Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów - Należy dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub i pokręteł znajdujących się w wózku.
- **Co każde sześć miesięcy**
 - Sprawdzenie czystości tapicerki i sprawdzenie ogólnego stanu wózka - Nie należy dopuszczać do zaniedbania wózka, zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja"
 - Sprawdzenie stanu ogólnego wózka. Nie należy dopuszczać do zaniedbania wózka

21. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zużyty wózek należy oddać do punktu zajmującego się recyklingiem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

22. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wózek inwalidzki Mewa spełnia wymagania zasadnicze Dyrektywy Rady Europy nr 93/42 EEC zmienionej przez 2007/47/WE dla wyrobów medycznych.

Wózek inwalidzki Mewa, zgodnie z Dyrektywą 93/42 EEC, jest nieinwazyjnym, nieaktywnym wyrobem medycznym klasy I według reguły 1.



MYWAM Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna
ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
tel. 0048 32 733 11 31
mywam@mywam.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wytwórca: <i>Manufacturer:</i>	MYWAM Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland
Produkt: <i>Product:</i>	Wózek inwalidzki specjalny MEWA Specialist Stroller MEWA

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wózek inwalidzki specjalny Mewa, będący wyrobem medycznym klasy I, jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady Europy o wyrobach medycznych - 93/42/EEC z 14 czerwca 1993 roku zmienionej przez 2007/47/EEC z 21 marca 2010 roku, przyjętej w Polsce na mocy ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. nr 107, poz. 679), oraz zgodny z normami zharmonizowanymi:

I solely declare that the specialist Stroller Mewa is a class I device, and it is in conformity with the requirements of EU Council Directive for Medical Devices 93/42/EEC of 14 June 1993 amended by 2007/47/EEC of 21 March 2010, implemented in Poland under the Medical Devices Act of 20 May 2010 (Dz. U. nr 107, poz. 679), and is in conformity with harmonized standards:

PN-EN 12183:2014	PN-EN 12182:2012	ISO 7176-1:2014
ISO 7176-3:2012	ISO 7176-5:2008	ISO 7176-7:2001
ISO 7176-8:2014	PN-EN 1021-1:2007	PN-EN 980:2010
PN-EN 1041:2010	PN-EN ISO 14971:2011	



Chorzów, 05 listopad 2019r./05 November 2019

Data/Date

Małgorzata Uchman
Małgorzata Uchman
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY

Podpis/Signature

 **MYWAM**
Kupiec, Bartold, Angres Spółka Jawna
41-516 Chorzów, ul. Szczecińska 10
www.MyWam.pl
tel. 32 733 11 31, email: mywam@mywam.pl
NIP 627 273 67 93, REGON 243426050
KRS 0000467471

23. Notatki

25. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.pl

adres e-mail: mywam@mywam.pl

26. Karta Gwarancyjna

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

27. Warunki gwarancji

- Producent udziela nabywcy na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie.
- Nabywca reklamujący wózek powinien dostarczyć wózek do Sprzedawcy lub do Producenta na własny koszt w opakowaniu wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i jego elementy.
- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy wózka.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wózka powinno odbywać się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji.
- Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wózka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji. Ich naprawa odbywa się na koszt użytkownika.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wózka prowadzi jego odpłatny serwis pogwarancyjny.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją wózka proszę kierować do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Producenta.