

CE



go.spider

Instrukcja obsługi i konserwacji

Edycja 1 / 2022-08-30

Pionizator – **go.spider**



UWAGA! Użytkownik z niesprawnością widzenia, czytania lub niesprawnością poznawczą proszony jest o zgłoszenie się do Producenta w celu uzyskania informacji dla użytkownika w odpowiednim formacie.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obsługi i konserwacji zawiera podstawowe informacje niezbędne dla prawidłowego użytkownika pionizatora go.spider, w tym zasady bezpieczeństwa jego użytkowania, opis jego budowy, obsługi i regulacji, przygotowania pionizatora do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia pionizatora.

Przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (asystentów dziecka - rodziców, opiekunów), które będą korzystały z pionizatora. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących pionizator.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania pionizatora, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu i każdorazowo musi być dołączona do sprzedawanego produktu. **Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość!** Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z udziałem pionizatora go.spider, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.pl



Wersja Instrukcji obsługi i konserwacji: PL **Edycja 1** / 2022-08-30

MyWam Kupiec, Bartold, Angres sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji obsługi i konserwacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.

Spis treści

▪ Wprowadzenie	5
1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania pionizatora go.spider	5
2. Podstawowe informacje o pionizatorze go.spider	5
▪ Bezpieczeństwo	6
3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa	6
4. Tabliczka znamionowa	7
5. Tabliczka z kodem UDI	7
6. Tablice ostrzegawcze	7
7. Oznaczenie symboli.....	7
▪ Produkt	8
8. Ogólna budowa pionizatora.....	8
9. Pionizator	9
9.1. Rozkładanie pionizatora	9
9.2. Składanie pionizatora	10
9.3. Regulacja wysokości stabilizatora tułowia	11
9.4. Regulacja stabilizatora biodrowego	11
9.5. Regulacja wysokości stabilizatora kolan	12
9.6. Regulacja stabilizatora stóp	12
9.7. Regulacja pelot	12
10. Urządzenie wspomagające chodzenie	13
10.1. Ogólna budowa urządzenia wspomagającego chodzenie	14
10.2. Mechanizm składania ramy	15
10.3. Rozkładanie ramy urządzenia wspomagającego chodzenie.....	15
10.4. Składanie ramy urządzenia wspomagającego chodzenie.....	16
10.5. Blokada transportowa.....	16
10.6. Blokada kierunku jazdy przednich kół.....	16
10.7. Spowalniacz koła tylnego	17
10.8. Blokada cofania niekontrolowanego	17
10.9. Regulacja wysokości górnej dostawki.....	18
10.10. Siedzisko majtkowe.....	18
10.11. Uchwyty do podtrzymywania	19
11. Specyfikacja techniczna pionizatora go.spider	19
11.1. Skład surowcowy pionizatora	19
12. Dostawa i narzędzia.....	19
13. Montaż i demontaż pionizatora	20
14. Przygotowanie do użytkowania	20
15. Użytkowanie pionizatora.....	21
15.1. Przenoszenie pionizatora	21
15.2. Prawdłowa pozycja w pionizatorze.....	21
15.3. Transport w samochodzie i w innych pojazdach	21
15.4. Czyszczenie i pielęgnacja.....	21
16. Przechowywanie pionizatora	22

16.1.	Przygotowanie pionizatora do długotrwałego przechowywania	22
16.2.	Zabezpieczenie antykorozyjne	22
17.	Powtórne użycie	22
18.	Serwis i przeglądy okresowe	23
19.	Utylizacja	24
20.	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych	24
21.	Notatki	25
22.	Lista autoryzowanych punktów serwisowych	26
23.	Karta Gwarancyjna	27

▪ Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu za zakup pionizatora go.spider. Mamy nadzieję, że będzie on okazją do wielu wspaniałych chwil z Waszym dzieckiem i będzie pomocny każdego dnia. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty spełniały Wasze oczekiwania i najwyższe standardy. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami oraz śledzenia nas na naszej stronie internetowej www.mywam.eu oraz w mediach społecznościowych. Możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszych produktach.

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania pionizatora go.spider

go.spider to zaprojektowany z myślą o użytkownikach niepełnosprawnych pionizator stanowiący specjalistyczny system terapeutyczny wspomagający pacjenta w pionizacji przodem.

Pionizator oparty jest na ramie wykonanej z elementów aluminiowych oraz stalowych. Wyrób może również pełnić funkcję urządzenia wspomagającego chodzenie, który w przyszłości będzie można doposażyć w szereg akcesoriów poprawiających funkcjonalność i komfort użytkowania.

Pionizator go.spider jest wyrobem medycznym klasy I, wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie stać.

Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty. Wskazania kliniczne to m.in. mózgowo porażenie dziecięce, uszkodzenie mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkie zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych, przy osłabieniach kończyn dolnych z zaburzeniami równowagi, itp. Wyrób przewidziany jest dla użytkowników o wzroście z przedziału od 100 do 145cm i wadze do 45 kg. Użytkownicy nie mogą korzystać z pionizatora samodzielnie, a jedynie pod opieką opiekuna. Inne niż opisane stosowanie wyrobu jest zakazane. Pionizator musi być używany zgodnie z instrukcją użytkowania, wyłącznie przez osoby dorosłe opiekujące się użytkownikiem. Młodzież i dzieci jak również wszelkie inne osoby bez odpowiedniego przeszkolenia nie powinny używać wyrobu.

2. Podstawowe informacje o pionizatorze go.spider

Pionizator go.spider posiada funkcje pozwalające na dopasowanie go do użytkownika, np:

- stabilizator tułowia (patrz pkt 9.3)
- stabilizator biodrowy (patrz pkt 9.4)
- stabilizator kolan (patrz pkt 9.5)
- stabilizator stóp (rzepy na stopy) (patrz pkt 9.6)

▪ Bezpieczeństwo

3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa

- Zabrania się użytkowania pionizatora w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
- UWAGA! W zależności od wykonanych regulacji pionizatora go.spider - dotyczy ustawienia regulacji wysokości górnej dostawki - pionizator ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- UWAGA! Przed każdorazowym użyciem pionizatora należy wykonać rozpisane poniżej czynności, a w przypadku nieprawidłowości nie wolno używać pionizatora. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.
- UWAGA! Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy, należy upewnić się, czy po obu stronach jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wyrobu.
- UWAGA! Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika.

OSTRZEŻENIE!



- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w pionizatorze, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem!
- Nie chwytaj za uchwyty mokrymi i zabrudzonymi rękami – grozi upadkiem i poślizgnięciem.
- Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
- Nie przenosić pionizatora z dzieckiem.
- Nie noś ani nie wieszaj żadnych przedmiotów na pionizatorze (niebezpieczeństwo przechylenia).
- Pionizator zapakowany jest w worek. Worek nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Nie nakładać na głowę. Niebezpieczeństwo uduszenia.

- UWAGA! Zabrania się użytkowania pionizatora, jeżeli stan techniczny pionizatora lub pojedynczego elementu pionizatora jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości, pionizator jest uszkodzony lub istnieje tylko podejrzenie, że wystąpiło uszkodzenie lub działanie pionizatora nie jest prawidłowe. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.

4. Tabliczka znamionowa

- Na tabliczce znamionowej znajdują się podstawowe informacje o produkcie: nazwa, model, numer seryjny (identyfikacyjny), maksymalne obciążenie, data produkcji, potwierdzenie o zgodności produktu dla wyrobów medycznych, ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji oraz dane producenta (patrz rysunek).
- Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części ramy pionizatora, po jej lewej stronie, przyklejona od góry.




5. Tabliczka z kodem UDI

- Tabliczka z kodem UDI zawiera informację o produkcie: nazwa, model, kod UDI oraz dane producenta (patrz rysunek).








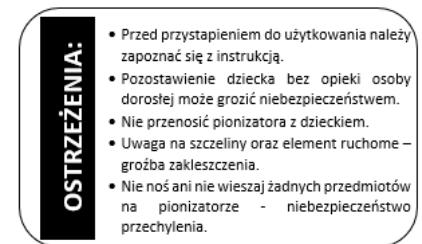


6. Tablice ostrzegawcze

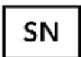- Na tabliczce ostrzegawczej znajdują się ważne ostrzeżenia dla użytkownika (patrz rysunek).
- Tabliczka ostrzegawcza znajduje się na tylnej części ramy pionizatora, po jej prawej stronie, przyklejona od góry.



7. Oznaczenie symboli

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji produktu		

▪ Produkt

8. Ogólna budowa pionizatora

Pionizator go.spider składa się ze składanej ramy z kołami wraz z dostawką górną oraz właściwego modułu pionizującego.

- **Stalowa rama pionizatora wraz z modułem pionizującym**

Do podstawowych elementów ramy pionizatora należą:




- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1- stabilizator tułowia | (patrz pkt 9.3) |
| 2- stabilizator biodrowy | (patrz pkt 9.4) |
| 3- stabilizator kolan | (patrz pkt 9.5) |
| 4- stabilizator stóp (rzepy na stopy) | (patrz pkt 9.6) |

9. Pionizator

9.1. Rozkładanie pionizatora







W celu rozłożenia pionizatora należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

UWAGA! Nie wolno przekraczać zakresu minimalnego i maksymalnego znajdującego się na dostawce górnej.

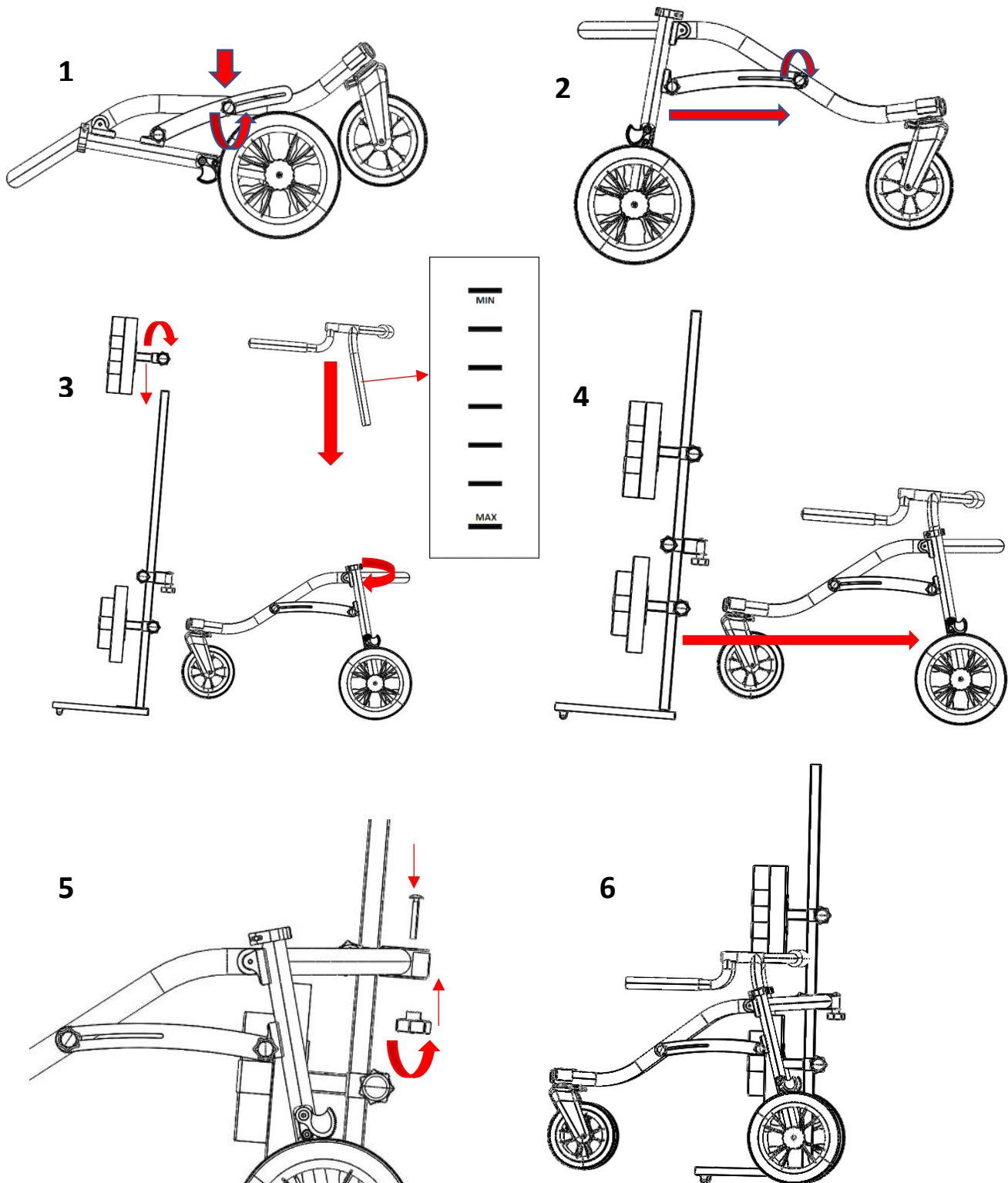


9.2. Składanie pionizatora

W celu złożenia pionizatora należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

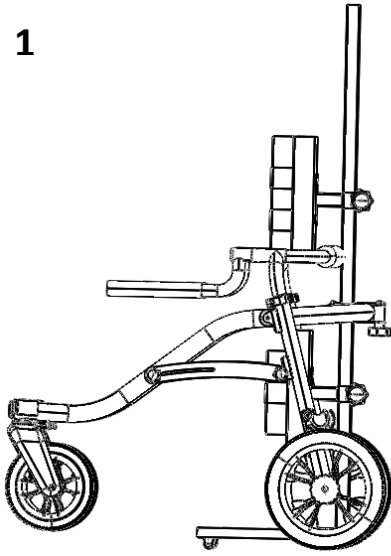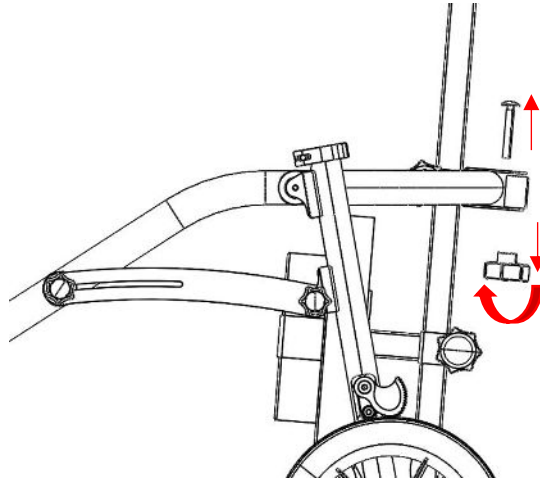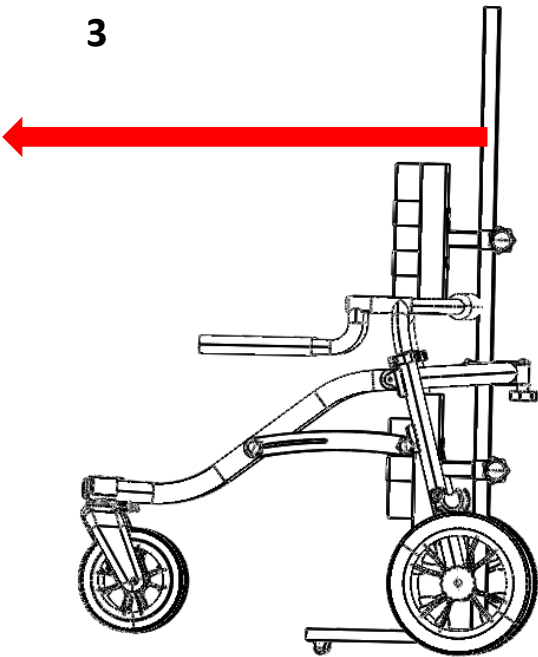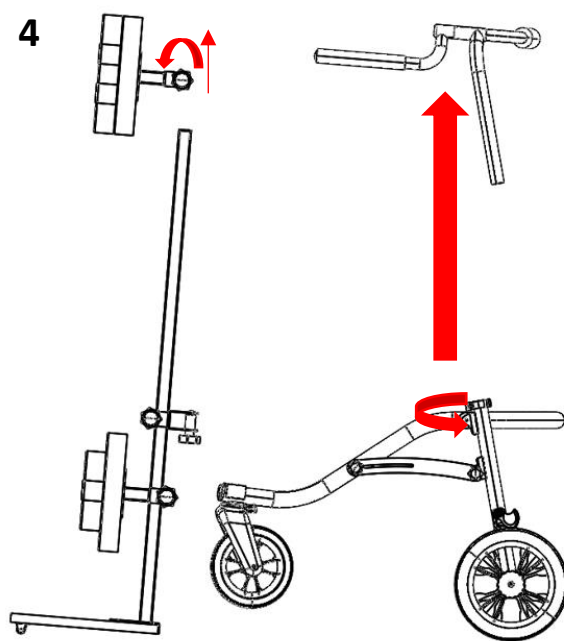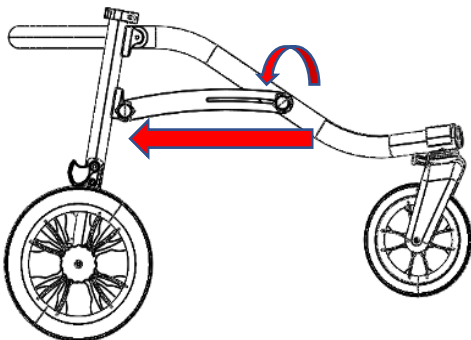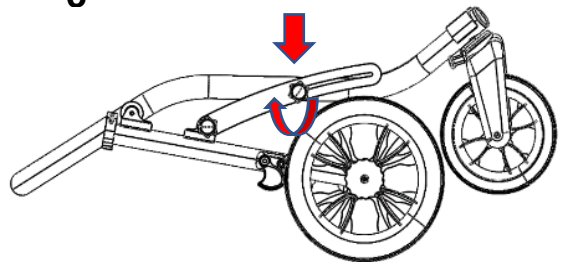1**2****3****4****5****6**

9.3. Regulacja wysokości stabilizatora tułowia

Aby wyregulować wysokość stabilizatora tułowia należy postępować zgodnie z rysunkami.

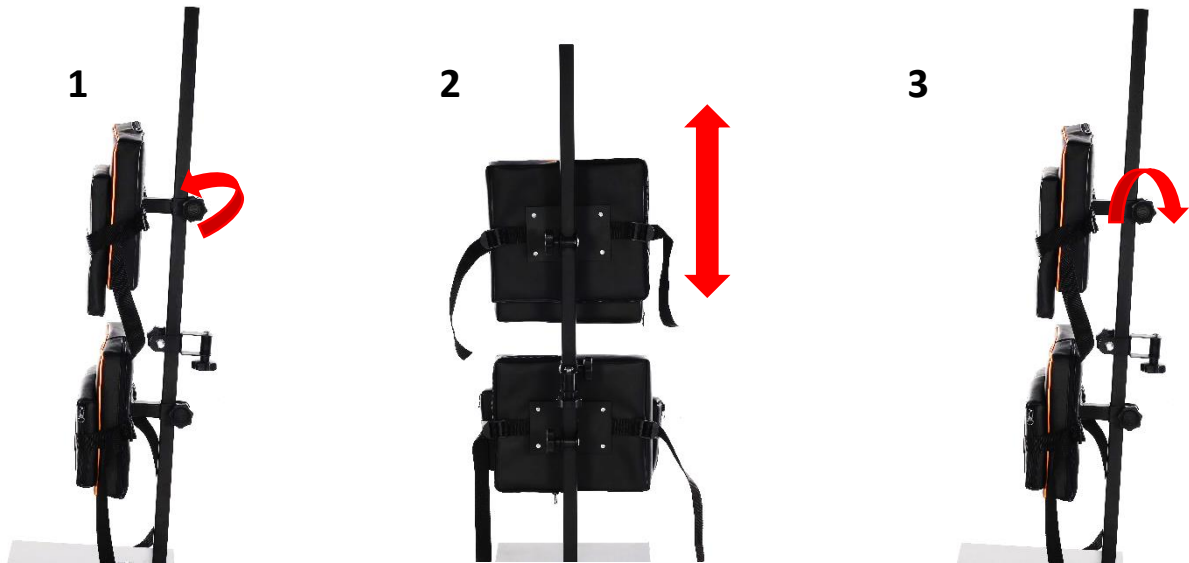


9.4. Regulacja stabilizatora biodrowego

Aby wyregulować wysokość stabilizatora biodrowego należy postępować zgodnie z rysunkami.



9.5. Regulacja wysokości stabilizatora kolan

Aby wyregulować wysokość stabilizatora kolan należy postępować zgodnie z rysunkami.

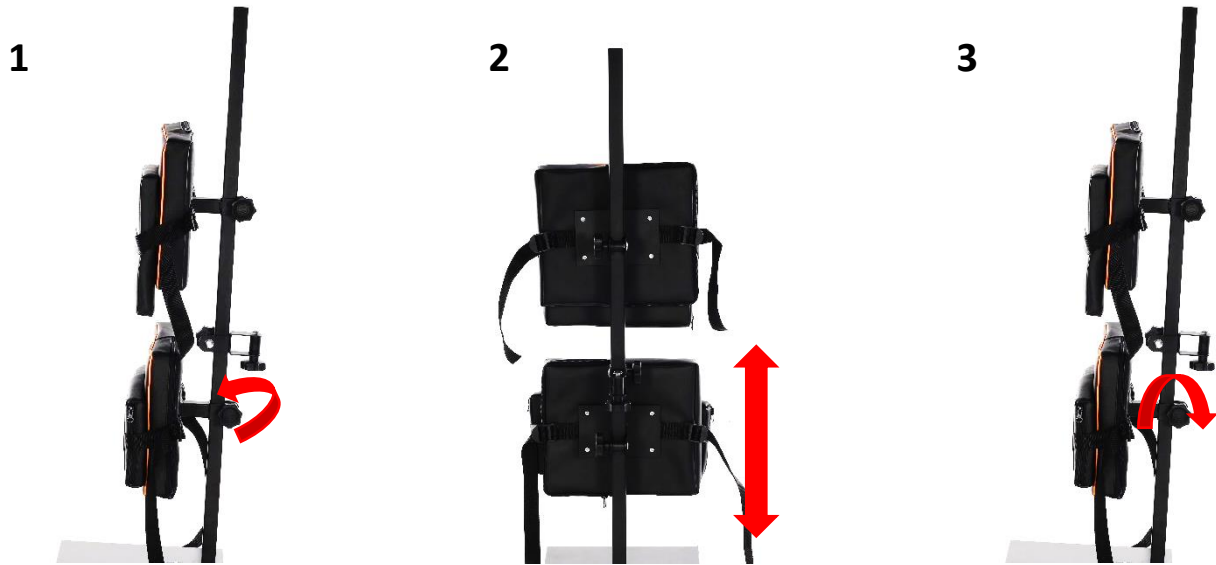

9.6. Regulacja stabilizatora stóp

Aby wyregulować stabilizator stóp należy postępować zgodnie z rysunkiem.







9.7. Regulacja pelot


Aby wyregulować peloty należy postępować zgodnie z rysunkiem.



10. Urządzenie wspomagające chodzenie

Po zdemontowaniu modułu pionizującego, pionizator można wykorzystać jako urządzenie wspomagające chodzenie. Aby wyrób mógł służyć jako urządzenie wspomagające chodzenie należy postępować zgodnie z rysunkami.

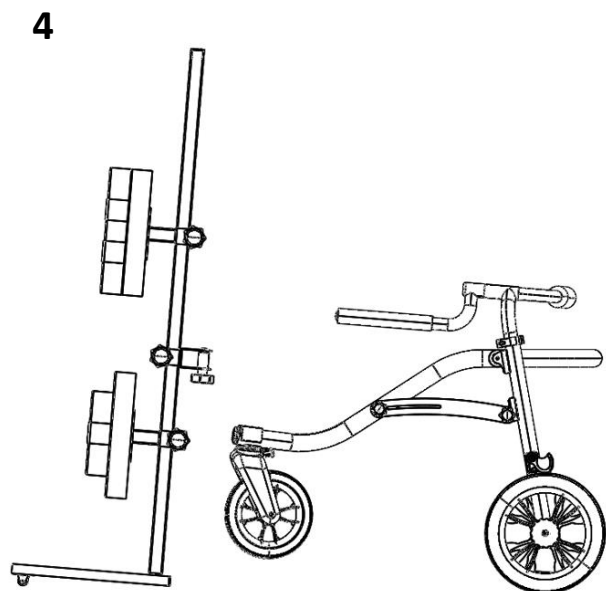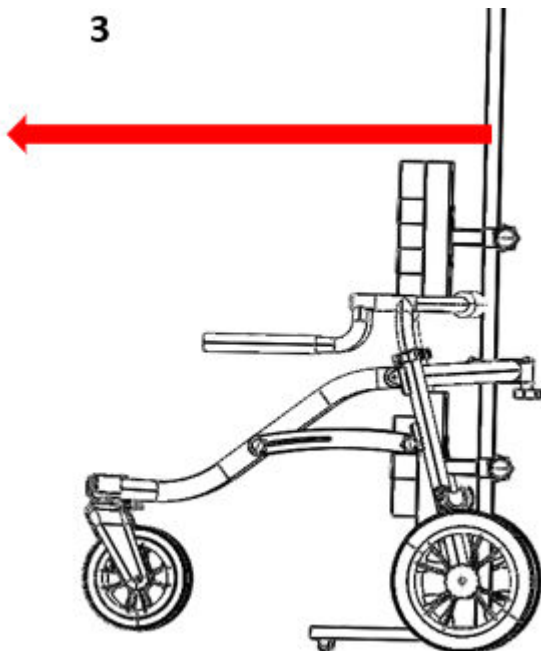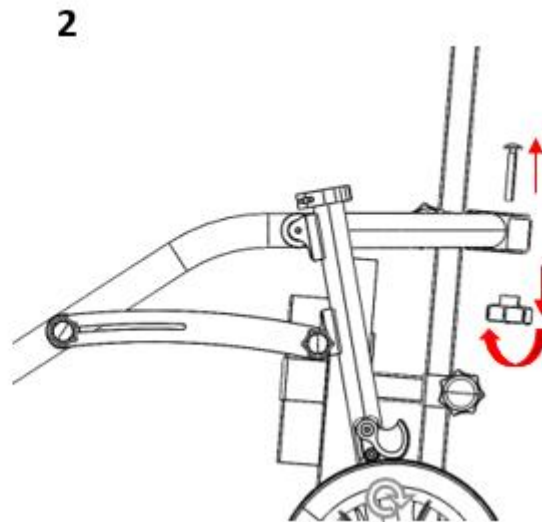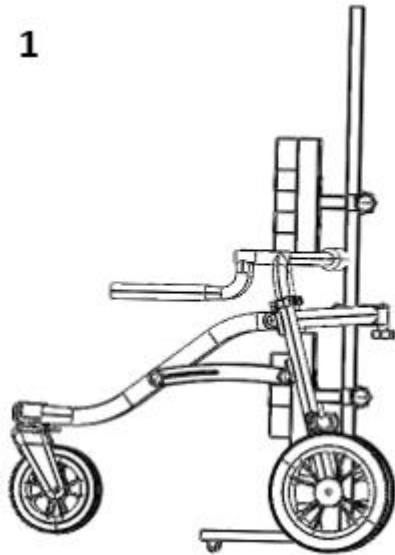

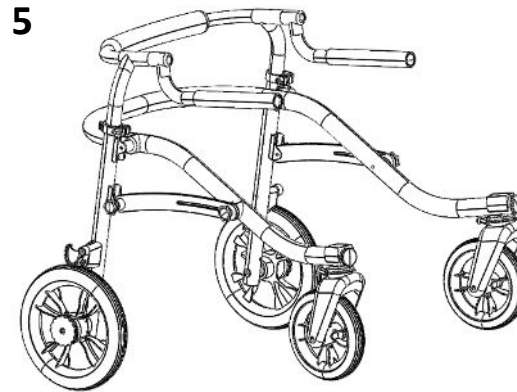


10.1. Ogólna budowa urządzenia wspomagającego chodzenie

Urządzenie wspomagające chodzenie składa się z ramy i dostawki górnej oraz wyposażenia dodatkowego, które należy dobrać według indywidualnych potrzeb użytkowników.

- **Stalowa rama urządzenia wspomagającego chodzenie wraz z dostawką górną**


Do podstawowych elementów ramy urządzenia wspomagającego chodzenie należą:

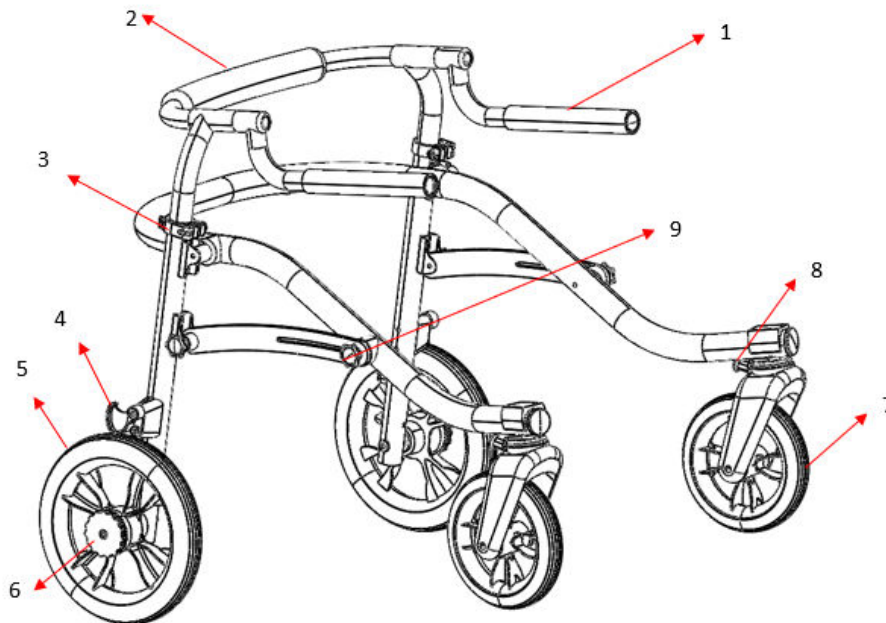

- | | |
|---|-------------------|
| 1- Uchwyt do podtrzymywania | - patrz pkt 10.11 |
| 2- Dostawka górna | - patrz pkt 10.9 |
| 3- Regulacja wysokości dostawki górnej | - patrz pkt 10.9 |
| 4- Blokada cofania niekontrolowanego | - patrz pkt 10.8 |
| 5- Tylne koła, pełne | - patrz pkt 10.6 |
| 6- Spowalniacz koła tylnego | - patrz pkt 10.7 |
| 7- Przednie koła skrętne, pełne | - patrz pkt 10.6 |
| 8- Blokada kierunku jazdy kół przednich | - patrz pkt 10.6 |
| 9- Mechanizm składania ramy | - patrz pkt 10.2 |

10.2. Mechanizm składania ramy


Mechanizm składania ramy znajduje się na zewnątrz ramy w jednym miejscu w jej lewej i prawej części (patrz rysunek).

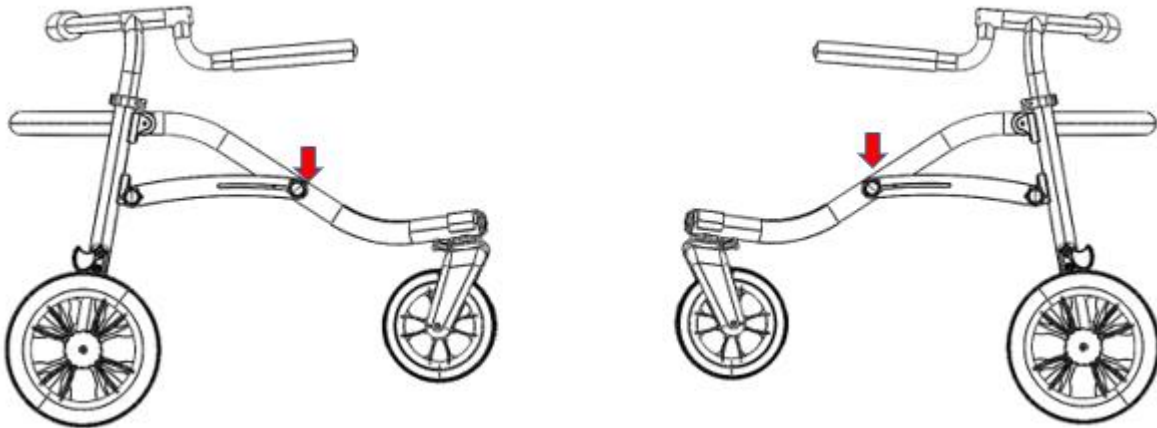

10.3. Rozkładanie ramy urządzenia wspomagającego chodzenie


W celu rozłożenia (otwarcia) ramy urządzenia wspomagającego chodzenie należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

UWAGA! Nie wolno przekraczać zakresu minimalnego i maksymalnego znajdującego się na dostawce górnej.

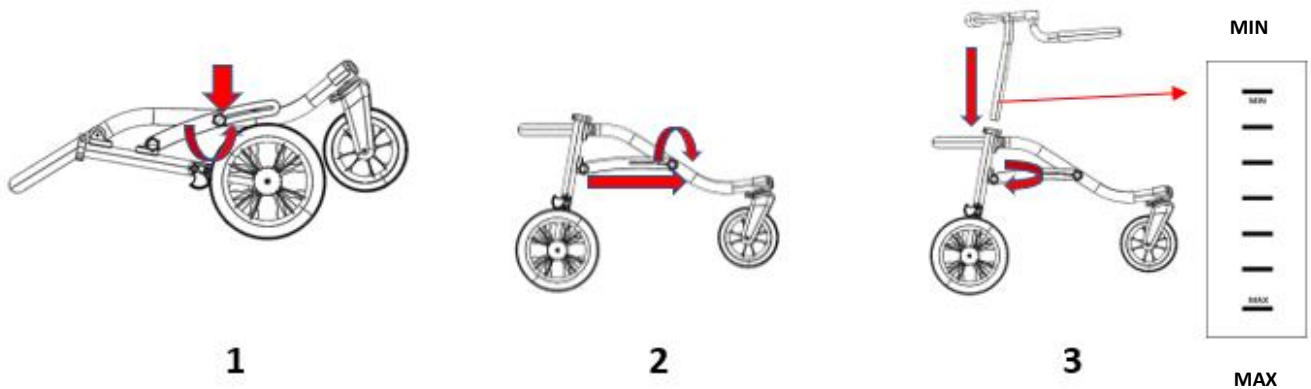

10.4. Składanie ramy urządzenia wspomagającego chodzenie

W celu złożenia (zamknięcia) ramy urządzenia wspomagającego chodzenie należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

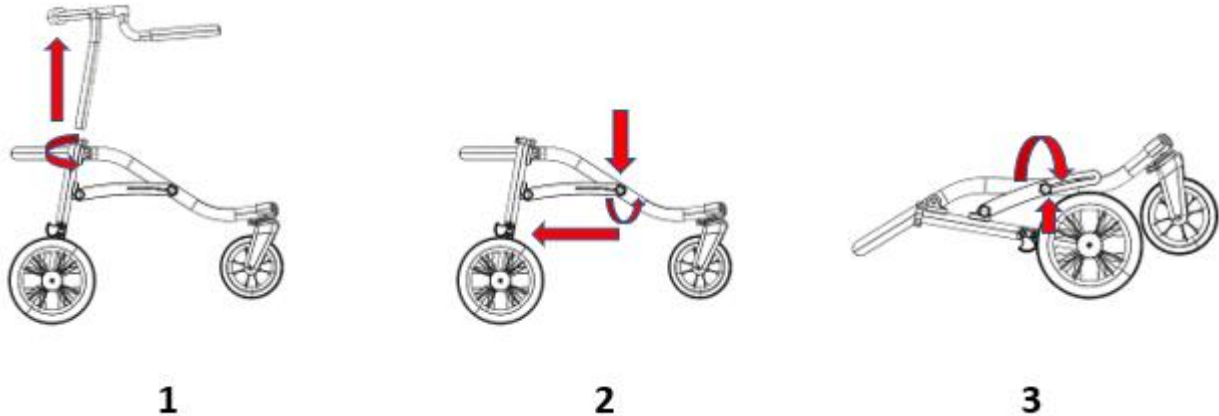

10.5. Blokada transportowa.

W celu zabezpieczenia ramy przed samoczynnym jej otwarciem, należy najpierw złożyć ramę i postępować zgodnie z rysunkiem. Po wsunięciu śruby w otwór należy ją zakręcić w celu zablokowania.



10.6. Blokada kierunku jazdy przednich kół

Oba koła przednie można ustawić do jazdy na wprost lub odblokować je do skręcania, co znacznie ułatwia manewrowanie urządzenia wspomagającego chodzenie.


Zaleca się wyłączenie blokady i umożliwienie skręcania przednich kół podczas prowadzenia urządzenia wspomagającego chodzenie po zupełnie gładkiej powierzchni. Włączenie i wyłączenie blokady przedstawiają poniższe rysunki.



10.7. Spowalniacz koła tylnego


Spowalniacz koła tylnego (Rys. 1), służy do spowalniania obu tylnych kół urządzenia wspomagającego chodzenie i znajduje się przy obu kołach tylnych.

W celu włączenia spowalniacza koła tylnego należy postępować zgodnie z rys. 2, a w celu wyłączenia zgodnie z rys. 3.

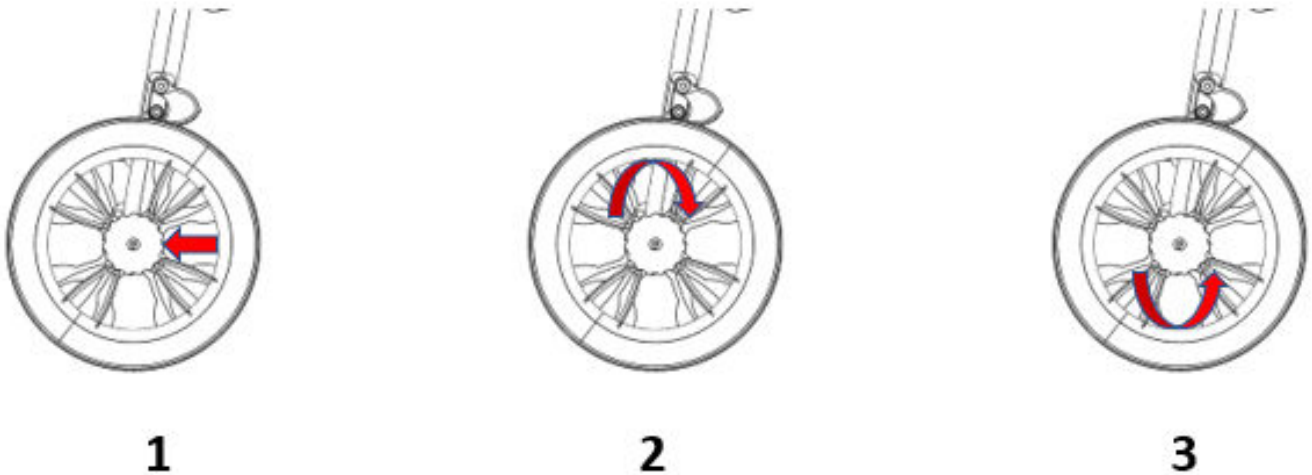


10.8. Blokada cofania niekontrolowanego

Urządzenie wspomagające chodzenie posiada możliwość blokady cofania niekontrolowanego, która ma na celu blokowanie koła podczas ruchu urządzenia w tył. Blokada cofania niekontrolowanego znajduje się na obu tylnych kołach. Aby włączyć blokadę należy postępować zgodnie z rys. 1. Miejsce, w którym znajduje się blokada przedstawia rys. 2.

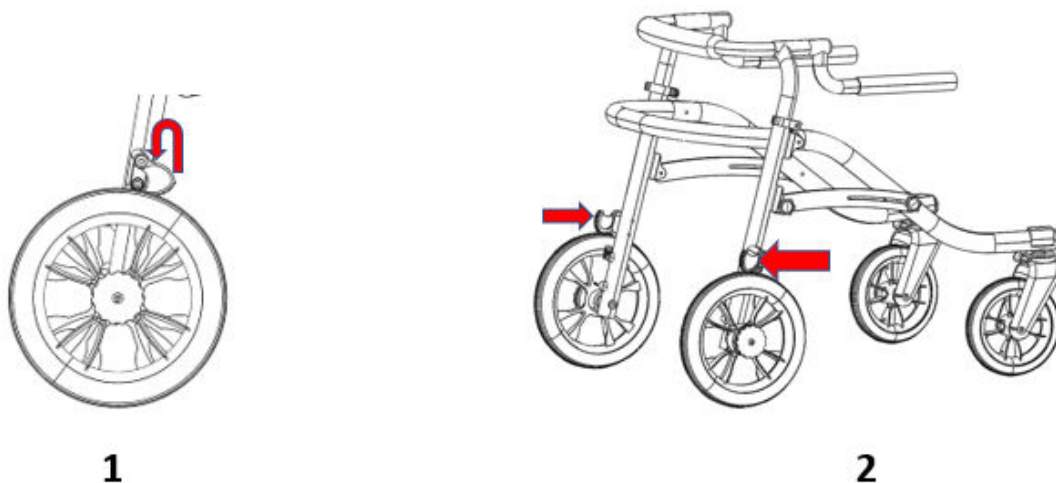

10.9. Regulacja wysokości górnej dostawki

Aby wyregulować wysokości górnej dostawki należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

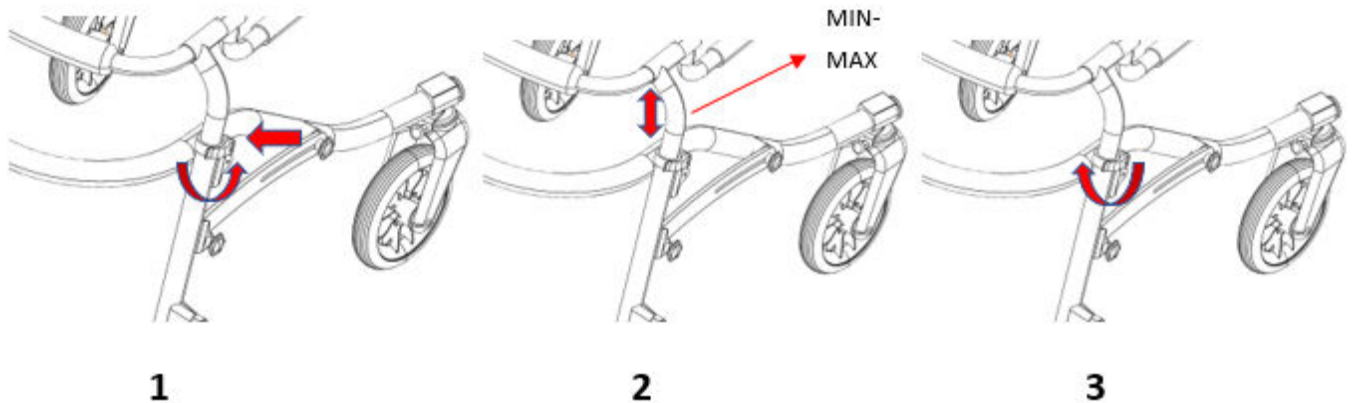

UWAGA! Nie wolno przekraczać zakresu minimalnego i maksymalnego znajdującego się na dostawce górnej.


10.10. Uprząż majtkowa

Urządzenie wspomagające chodzenie posiada możliwość zamontowania do dostawki górnej uprząży majtkowej w celu odciążenia tułowia dziecka. Uprząż należy zamontować zgodnie z rysunkiem.



10.11. Uchwyty do podtrzymywania

Chodzik jest wyposażony w uchwyty do podtrzymywania, z możliwością regulacji szerokości ich rozstawu oraz wysokości. Aby zmienić szerokość ich rozstawu uchwytu, należy postępować zgodnie z rysunkami. Aby zmienić wysokość uchwytów, należy zmienić wysokość górnej dostawki (patrz punkt 10.9). Czynność należy wykonać po obu stronach chodzika.

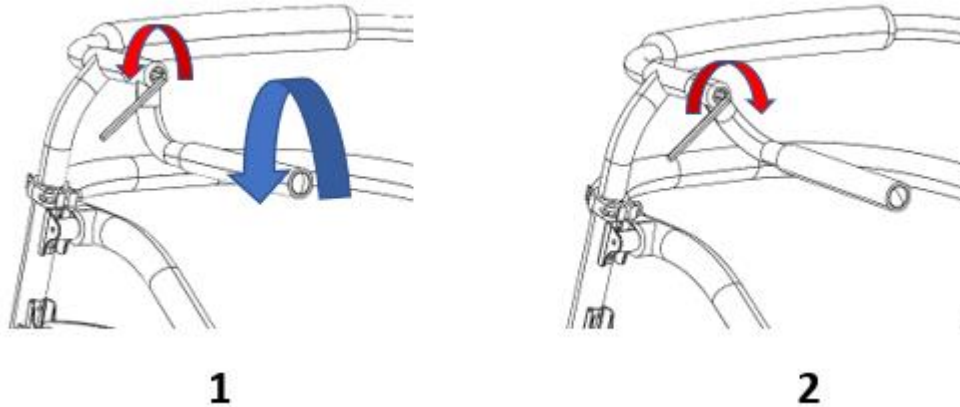

11. Specyfikacja techniczna pionizatora go.spider

długość pionizatora	80 cm
szerokość pionizatora	68 cm
wysokość pionizatora	103 cm
masa całkowita	11,6 kg
długość pionizatora złożonego do transportu	80 cm
szerokość pionizatora złożonego do transportu	68 cm
wysokość pionizatora złożonego do transportu	30 cm
max. waga pacjenta	45 kg
wzrost pacjenta	100-145 cm

UWAGI:

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg

11.1. Skład surowcowy pionizatora

Stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne.

12. Dostawa i narzędzia

Pionizator go.spider jest dostarczany w kartonie i wstępnie zmontowany. W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama pionizatora z dostawką górną
- Kompletny moduł pionizujący
- Instrukcja obsługi
- Klucz imbusowy 6 mm.

Przed użyciem należy sprawdzić i upewnić się, że w otrzymanym kartonie znajdują się wszystkie elementy i żaden z nich nie uległ uszkodzeniu np. podczas transportu. W przypadku stwierdzenia, że w otrzymanym kartonie brakuje jakiegoś elementu lub jakiś element uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą i/lub Producentem, w celu otrzymania brakujących elementów lub wymiany produktu na nowy, w pełni kompletny i sprawny.

Wyposażenie pionizatora go.spider pozwala na dopasowanie go do osobistych wymagań użytkownika. W tym celu zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania. Do montażu i demontażu pionizatora go.spider nie są wymagane żadne narzędzia.

Do regulacji szerokości rozstawu uchwytów do podtrzymywania potrzebny jest klucz imbusowy.

13. Montaż i demontaż pionizatora

- Montaż pionizatora. Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany. Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) rozłożyć pionizator – patrz pkt. 9.1
- b) zamontować i wyregulować moduł pionizujący – patrz pkt. 9.3, 9.4, 9.5. 9.6
- c) zamontować i wyregulować dostawkę górną – patrz pkt 10.9

- Demontaż pionizatora. W celu demontażu pionizatora należy:

- a) zdemontować dostawkę górną
- b) zdemontować moduł pionizujący
- c) złożyć pionizator zamykając go blokadą transportową.

14. Przygotowanie do użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania pionizatora należy:


- Sprawdzić stan techniczny pionizatora i wszystkich jego elementów, a jeżeli stan techniczny pionizatora lub jego pojedynczego elementu jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości, to wtedy pionizatora nie wolno użytkować. Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą i/lub Producentem.
- Sprawdzić, czy pionizator został prawidłowo rozłożony oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Sprawdzić, czy moduł pionizujący został prawidłowo zamontowana do ramy.
- Sprawdzić stan ogumienia bieżnika wszystkich czterech kół.
- Sprawdzić sprawność działania spowalnicza koła tylnego poprzez załączenie spowalnicza koła tylnego (patrz pkt. 10.7).
- Włączyć blokadę kierunkową kół przednich.
- Sprawdzić sprawność działania blokady cofania niekontrolowanego poprzez załączenie blokady cofania niekontrolowanego (patrz pkt. 10.8).
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować pionizator do potrzeb dziecka, w tym ustawić odpowiednią wysokość i szerokość całej górnej dostawki. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
- Zadbać, żeby dziecko nie było umieszczone w pionizatorze bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z modułem pionizującym. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała dziecka oraz względy higieniczne dziecka.
- Zadbać, aby obuwie dziecka było wygodne, dobrze stabilizujące staw skokowy.

- W przypadku wskazań do stosowania zaopatrzenia ortopedycznego (kołnierż szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne) należy je założyć.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania pionizatora.

15. Użytkowanie pionizatora

15.1. Przenoszenie pionizatora

Najlepszym sposobem przenoszenia rozłożonego pionizatora jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół. Producent dopuszcza możliwość prowadzenia pionizatora złożonego także z wykorzystaniem kół w pozycji wskazanej na rysunku.

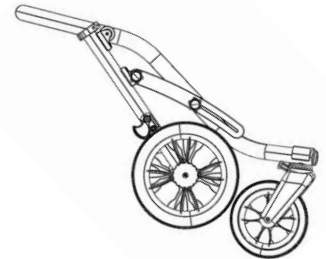

UWAGA!!! NIEDOPUSZCZALNE jest przenoszenie lub popychanie pionizatora wraz z korzystającym z niego dzieckiem.

15.2. Prawidłowa pozycja w pionizatorze

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał pozycję stojącą. Wszystkie stabilizatory powinny być prawidłowo wyregulowane, a stabilizator bioder powinien być tak wyregulowany, aby zabezpieczyć przed ruchami bioder w przód i tył. Stopy powinny być stabilnie przypięte do podstawy.

15.3. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

- W celu przewiezienia pionizatora go.spider w samochodzie należy go zdemontować (patrz rozdział 13) i umieścić w bagażniku.

Jeśli zdemontowany pionizator nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę pionizatora do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia pionizatora w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z pionizatorem oraz o stosowne wymagania.

15.4. Czyszczenie i pielęgnacja

Stabilizator biodrowy (uprząż majtkową) można prać tylko ręcznie przy zachowaniu ostrożności, w temperaturze do 30°C.

Nie wolno prać w pralce. Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Nie ścieraj - ścieranie spowoduje rozprzestrzenienie się plamy na większą powierzchnię i może zniekształcić teksturę tkaniny oraz zniszczyć jej powłokę.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w
suszarce bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

Postępowanie w przypadku wodnych plam, takich jak plamy z jedzenia, napojów i olejów roślinnych:

- Osusz plamę dociskając na całej jej powierzchni biały papierowy ręcznik, chusteczkę lub chłonną, czystą szmatkę.
- Mały kawałek szmatki nasącz słabym roztworem detergentu i ciepłej wody (lub zimnej wody w przypadku zabrudzeń krwią) i opłucz plamę usuwając ją od zewnątrz do środka, żeby uniknąć jej powiększania się. Nie używaj zbyt mokrej szmatki, gdyż nadmierna ilość cieczy może spowodować powstanie obwódki po wyschnięciu lub powiększenie się plamy i zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
- Może być konieczne powtórzenie powyższej czynności w zależności od rodzaju plamy i ilości zaplamionego materiału. Powyższą czynność należy kontynuować, aż do całkowitego usunięcia plamy, ale zawsze pamiętaj, żeby usunąć nadmiar wilgoci z zaplamionego materiału przed ponownym opłukiwaniem.
- Następnie należy opłukać materiał używając tylko letniej wody bez detergentu, za pomocą czystej gąbki lub czystej białej szmatki. Wysuszyć.

16. Przechowywanie pionizatora

Pionizator należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

16.1. Przygotowanie pionizatora do długotrwałego przechowywania

W celu przygotowania pionizatora go.spider do długotrwałego przechowywania, należy zabezpieczyć produkt i wykonać wszystkie czynności serwisowe przedstawione w rozdziale "Przeglądy okresowe" tak, jakby nastąpił ich czas.

Pionizator należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

16.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu uniknięcia uszkodzeń korozyjnych, pionizatora nie powinno się użytkować ani zostawiać w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, najlepiej w temp 0-35°C.

Po zamoczeniu pionizatora, należy wytrzeć wszystkie zamoczone elementy miękką szmatką do sucha oraz zabezpieczyć środkiem konserwującym na bazie lekkiego oleju. Nie dotyczy to elementów niewykonanych z metalu i aluminium, których zapewnienie czystości i konserwacji opisane jest szczegółowo w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja.

W razie uszkodzenia lakieru należy uszkodzenie zabezpieczyć poprzez nałożenie zaprawki przy użyciu proponowanego przez Producenta lakieru.

Regularne czyszczenie i smarowanie mechanizmów pionizatora lekkim olejem, gwarantuje długie i bezproblemowe jego użytkowanie.

17. Powtórne użycie

Produkt nadaje się do powtórnego użycia.

Wszelkie produkty powtórnego użycia podlegają szczególnemu obciążeniu.

W związku z tym ich cechy i osiągi mogą odbiegać od produktu nowego w takim stopniu, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów i osób trzecich w trakcie ich użytkowania.

Produkt przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji zachowuje swoją jakość przez okres 3 lat i tyle wynosi spodziewany okres jego użytkowania.

W celu wtórnego użycia należy:

- Ramę pionizatora wraz z kołami i elementami do prowadzenia należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować dostępnymi na rynku środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.
- Następnie produkt musi zostać sprawdzony przez autoryzowany Serwis (patrz rozdział 22) lub Producenta pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Wszelkie zużyte części oraz komponenty niepasujące lub nienadające się dla użytkownika należy wymienić na nowe.
- Tak przygotowany produkt może zostać ponownie wprowadzony do użycia.

18. Serwis i przeglądy okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z pionizatora go.spider, należy regularnie i dokładnie poddawać go przeglądom i czynnościom serwisowym wskazanym w tabeli poniżej.

W sytuacji, gdy użytkownik pionizatora nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać pionizator do specjalistycznego punktu serwisującego pionizatory lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 22) lub bezpośrednio u Producenta.

W pionizatorze mogą być stosowane tylko oryginalne części zamienne, które są dostarczone lub zalecone przez Producenta.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem pionizatora**
 - Kontrola sprawności spowalnicza koła tylnego oraz blokady cofania niekontrolowanego - Po załączeniu spowalnicza koła tylnego, oba tylne koła pionizatora nie powinny się obracać. Po załączeniu blokady cofania niekontrolowanego koło powinno się blokować podczas ewentualnego ruchu pionizatora w tył. Upewnić się, że blokada kierunkowa kół przednich jest włączona.
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy pionizatora i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie modułu pionizującego, prawidłowe zamontowanie dostawki górnej, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji szerokości uchwytów podtrzymujących, prawidłowe zablokowanie ramy.
 - Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte.
 - Kontrola stałych elementów ramy - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.

Co każdy jeden miesiąc

- Czyszczenie pionizatora -Należy oczyścić miękką szmatką wszelkie elementy ruchome, łożyska, mechanizmy regulacyjne, a następnie nasmarować je kilkoma kroplami lekkiego oleju. Zaleca się ostrożność, żeby nie ubrudzić własnego ubrania.
 - Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów - Należy dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub i pokręteł znajdujących się w pionizatorze.
- **Co każde sześć miesięcy**
 - Sprawdzenie czystości i ogólnego stanu pionizatora - Nie należy dopuszczać do zaniedbania pionizatora, zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja".

19. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zużyty pionizator należy oddać do punktu zajmującego się recyklingiem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

20. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu.

21. Notatki

22. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.pl

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

23. Karta Gwarancyjna

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

Warunki gwarancji

- Producent udziela nabywcy na zakupiony pionizator gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie.
- Nabywca reklamujący pionizator powinien dostarczyć pionizator do Sprzedawcy lub do Producenta w opakowaniu wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami pionizatora.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki pionizatora i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę pionizatora i jego elementy.
- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy pionizatora.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie pionizatora powinno odbywać się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Użytkowanie pionizatora niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych pionizatora powoduje utratę gwarancji.
- Uszkodzenia pionizatora powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania pionizatora, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji. Ich naprawa odbywa się na koszt użytkownika.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki pionizatora powoduje utratę gwarancji.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny pionizatora.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent pionizatora prowadzi jego odpłatny serwis pogwarancyjny.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją pionizatora proszę kierować do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Producenta.