

CE



Instrukcja obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi
wybranych wózków inwalidzkich specjalnych
Edycja 1 / 2022-09-09

Podstawa pokojowa

Wyposażenie dodatkowe dla wózków inwalidzkich
specjalnych Mewa/Mouse/ Grizzly

Rozkładanie podstawy pokojowej

Złożoną ramę należy podnieść, a następnie rozłożyć podpory poprzeczne i dokręcić je pokrętkami gwiazdowymi znajdującymi się u podstawy ramy (Zdj. 1).



(Zdj. 1)

W mechanizmie mocowania siedziska podstawy pokojowej należy rozłożyć podpory poprzeczne, a następnie dokręcić pokrętkami gwiazdowymi do ramy głównej pionowej (Zdj. 2-5).



Zdj. 2



Zdj. 3



Zdj. 4



Zdj. 5

Wysokość rączki wózka dopasować według indywidualnych potrzeb opiekuna.

Mewa/Mouse

Montaż siedziska

Siedzisko należy zamontować przodem do kierunku jazdy. W celu zamontowania siedziska:

a) Zablokować hamulce, aby podstawa pokojowa była stabilna i nieruchoma (Zdj. 6-7).



Zdj. 6 Dobrze



Zdj. 7 Źle

b) nałóż siedzisko w zaczepy podstawy jezdnej. Dociśnij siedzisko, aż do dwóch kliknięć. O prawidłowym założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów podstawy siedziska (Zdj. 8-9).



Zdj. 8



Zdj. 9

Demontaż siedziska

W celu zdemontowania siedziska, należy wcisnąć w dół, w kierunku podłoża, po obu stronach podstawy pokojowej białe przyciski (Zdj. 10), znajdujące się u spodu obu zaczepów ramy. Następnie wysunąć siedzisko z zaczepów ramy.



Zdj. 10

Grizzly

Siedzisko należy zamontować przodem do kierunku jazdy.

W celu zamontowania siedziska do podstawy pokojowej należy wykonać następujące czynności, według podanej kolejności:

- a) zablokować hamulce, żeby podstawa pokojowa była stabilna i unieruchomiona (Zdj. 11-12).



Zdj. 11 Dobrze



Zdj. 12 Źle

- b) założyć adapter do mocowania siedziska podstawy pokojowej. O prawidłowym założeniu adaptera świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów mechanizmu mocowania siedziska (Rys. 13-14).



Rys. 13



Rys. 14

- c) upewnić się, że mechanizm mocowania w siedzisku jest w pozycji z blokadą otwartą.
d) nałożyć oba mocowania TYLNE siedziska na pierwszy zaczep adaptera podstawy pokojowej (Rys.15).



Rys. 15

- e) nałożyć oba mocowania PRZEDNIE siedziska na drugi zacpek adaptera podstawy pokojowej.
- f) docisnąć oba mocowania PRZEDNIE siedziska do drugiego zacpeku adaptera aż do dwóch kliknięć. O prawidłowym założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z dwóch zamykających się blokad mechanizmu mocowania siedziska do adaptera podstawy pokojowej (Rys. 16).



Rys. 16

Demontaż siedziska

W celu zdemontowania siedziska należy wykonać następujące czynności, według podanej kolejności:

- a) załączyć hamulec, żeby wózek był stabilny i unieruchomiony.
- b) odciągnąć uchwyt poprzeczny mechanizmu mocowania siedziska w tył co rozpoczyna otwieranie blokady mechanizmu mocowania siedziska (Rys. 17).



Rys. 17

- c) następnie kontynuować odciąganie uchwyty poprzeczny w tył oraz do góry, co powoduje zatrzymanie się blokady mechanizmu mocowania siedziska w pozycji otwartej.
- d) ściągnąć oba mocowania PRZEDNIE siedziska z zacpek adaptera, poprzez podniesienie przedniej części siedziska w kierunku do góry, od podłoża (Rys. 18).



Rys. 18

- e) po czym ściągnąć oba mocowania TYLNE siedziska z zaczepów adaptera, poprzez podniesienie tylnej części siedziska w kierunku na skos do przodu, do przedniej części siedziska i do góry, od podłoża.

Regulacja wysokości

Mechanizm regulacji wysokości znajduje się na środku ramy. Aby zmienić wysokość ramy należy odblokować zacisk mimośrodowy znajdujący się po obu stronach podstawy pokojowej (skrzydełka powinny znajdować się po prawej stronie) (Rys. 19),



Rys. 19

następnie dopasować wysokość (skala wysokości została opisana cyframi 1-6) (Rys. 20-21).



Rys.20



Rys. 21

UWAGA! Przed zablokowaniem mechanizmu należy upewnić się, że wysokość po obu stronach jest identyczna!

Zablokuj zacisk (skrzydełka powinny znajdować się po lewej stronie) (Rys. 22) i dociśnij ramę, aby upewnić się, że mechanizm regulacji wysokości został prawidłowo zablokowany.



Rys. 22

UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

Składanie podstawy pokojowej

Przed złożeniem podstawy pokojowej należy zablokować hamulce oraz ustawić rączkę podstawy w pozycji „0”. Aby złożyć podstawę pokojową należy wypiąć siedzisko i ustawić wysokość podstawy pokojowej na najniższą (oznaczoną cyfrą 1). Następnie odkręcić pokrętło gwiazdowe mocowania siedziska w podstawie pokojowej i schować podpory poprzeczne w mocowaniu (rys. 23).




Rys. 23

Następnie należy odkręcić pokrętło gwiazdowe znajdujące się przy ramie podstawy pokojowej. Następnie należy wyjąć śrubę zabezpieczającą, po czym złożyć odbezpieczone podpory do wewnątrz podstawy składając przy tym powoli ramę (rys. 24). Po złożeniu zamontować z powrotem śrubę zabezpieczającą i zablokować ramę blokadą transportową (rys. 25).



Rys. 24

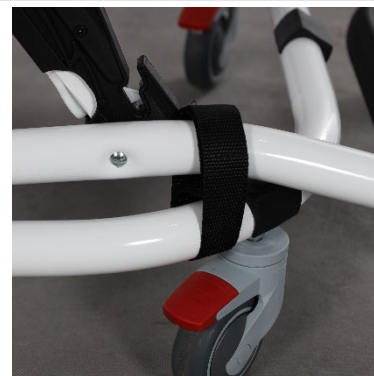

Rys. 25

UWAGA! Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).

UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać **BEZ DZIECKA** umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

OSTRZEŻENIA:

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Pozostawienie dziecka bez opieki osoby dorosłej może grozić niebezpieczeństwem.
- **UWAGA!** Podstawa jezdna służy do użytku domowego. Podstawa jezdna może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).
- Uwaga na szczeliny oraz elementy ruchome – groźba zakleszczenia.
- **UWAGA!** Wszelkie regulacje podstawy jezdnej i jego elementów należy wykonywać **BEZ DZIECKA** umieszczonego w podstawie jezdnej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!