

CE



mouse

**Manual de operare si mentenanta**

Edition 7 date 2022-10-25

**Caruciorul special Mouse**

Un carucior modern foarte usor de manevrat



**Atentie! Utilizatorii cu dificultati cognitive, de vedere sau de citire vor notifica producatorul pentru a primi informatiile in format potrivit nevoilor lor.**

### Scopul manualului

Manualul de operare si mentenanta contine informatii de baza necesare pentru folosirea corecta a caruciorului : folosirea in siguranta, modul de asamblare, ajustari, pregatirile de dinainte de ajustare, ingrijirea si depozitarea produsului, conditiile de garantie etc.

Este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilitati( asistenti, parinti) care vor fi transportati in carucior.

Este destinat pentru doctori dar si pentru specialisti in fizioterapie.

**ATENTIE : Cititi integral prezentul inainte de folosirea caruciorului !**

Acest manual se va revinde odata cu caruciorul. Acesta va fi pastrat pentru a putea fi verificat atunci cand intampinati dificultati.

**ATENTIE : In cazul unor incidente legate de caruciorul nostru aveti obligatia de a ne anunta imediat prin scris (scrisoare sau email).**

---

Detaliile de contact ale producatorului :

- Adresa postala : MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland
- Contact phone number: +48 32 733 11 31
- adresa de email: [mywam@mywam.pl](mailto:mywam@mywam.pl)



Versiunea manualului : **RO Edition:7 Date: 2022-10-25**

## Curpins:

<b>1. SCOPUL CARUCIORUL</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMATII DE BAZA DESPRE CARUCIORUL MOUSE</b>	<b>4</b>
<b>3. ÎNCEPUT RAPID</b>	<b>5</b>
<b>4. INSTRUCIUNI IMPORTANTE SI REGULI DE SIGURANTA</b>	<b>6</b>
<b>5. 5.1 PLACUTA DE IDENTIFICARE :</b>	<b>7</b>
<b>5.2 PLĂCUȚA CU CODUL UDI</b>	<b>7</b>
<b>6. ETICHETE DE AVERTIZARE</b>	<b>7</b>
<b>7. SIMBOLURILE</b>	<b>7</b>
<b>8. ASAMBLAREA GENERALA A CARUCIORULUI</b>	<b>8</b>
<b>9. CONFIGURATIA SI FOLOSIREA RAMEI DE ALUMINIUM</b>	<b>9</b>
9.1 <i>Mecanismul de rabatare al ramei</i>	9
9.3 <i>Inchiderea ramei</i>	9
9.4 <i>Rotile pivotante (se misca la 360 de grade) din fata. Blocarea directiei de mers a rotilor.</i>	10
9.5 <i>Rotile din spate. Instalarea si deinstalarea lor.</i>	10
9.6 <i>Sistemul de amortizare a rotilor din spate</i>	11
9.7 <i>Manerul ergonomic de impins caruciorul. Mecanismul de ajustare a manerului.</i>	11
9.8 <i>Frana centrala. Activarea si dezactivarea franei.</i>	11
9.9 <i>Picioarul pentru inclinarea caruciorului</i>	12
9.10 <i>Manerul pentru transport</i>	12
9.11 <i>Suportul pentru picioare. Ajustari si localizare</i>	12
<b>10. ATASAREA SI INDEPARTAREA SCAUNULUI DE PE RAMA DIN ALUMINIU.</b>	<b>12</b>
10.1 <i>Atasarea si indepartarea scaunului de pe rama de aluminiu.</i>	12
10.3 <i>Spatar ajustabil</i>	13
<b>11. ECHIPAMENT DE BAZA</b>	<b>14</b>
11.1 <i>Hamul in 5 centuri</i>	14
11.2 <i>Bara de protectie.</i>	14
11.3 <i>Baldachin ajustabil, cu fereastră</i>	14
11.4 <i>Cosul pentru cumparaturi</i>	15
11.5 <i>Centuri pentru siguranta.</i>	15
11.6 <i>Perna tip wedge</i>	15
11.7 <i>Pernele pentru captuseala</i>	15
11.8 <i>Tapiseria</i>	15
<b>12. ACCESORII</b>	<b>16</b>
12.1 <i>Suport pentru cap ajustabil - ↔ si ↕</i>	16
12.2 <i>Pad-uri ajustabile pentru piept si spate - ↔ and ↕</i>	16
12.3 <i>Masa pentru terapie</i>	16
12.4 <i>Kitul de micșorare al scaunului.</i>	17
12.5 <i>Geanta de calatorie</i>	17
12.6 <i>Umbrela pentru soare</i>	17
12.7 <i>Mănușile pentru iarna</i>	17
12.9 <i>Plasă de țânțari</i>	17
12.10 <i>Protecția de ploaie</i>	18
<b>13. SPECIFICATII TEHNICE</b>	<b>19</b>
13.1 <i>COMPOZIȚIA MATERIALULUI DIN CARE ESTE FĂCUT CĂRUCIORUL</i>	19
<b>14. LIVRARE SI UNELTE</b>	<b>19</b>

---

<b>15. ASAMBLAREA SI DEZASAMBLAREA PRODUSULUI</b>	<b>20</b>
<b>16. PREGATIRI DE FOLOSIRE</b>	<b>20</b>
<b>17. FOLOSIREA CARUCIORULUI</b>	<b>21</b>
17.1 Transportul caruciorului	21
17.2 Punerea si scoaterea copilului in si din carucior	21
17.3 POZITIA CORECTA ATUNCI CAND FOLOSIM CARUCIORUL	21
17.4 Conducerea caruciorului	21
17.5 Conducerea caruciorului pe suprafete in panta	21
17.6 Pragurile si curbele	22
17.7 Transportul caruciorului in masina sau in late vehicule	22
17.8 Curatarea si pastrarea caruciorului	22
<b>18. DEPOZITAREA CARUCIORULUI</b>	<b>23</b>
18.1 Pregatirea caruciorului pentru o depozitare indelungata	23
18.2 Protectie impotriva coroziunii	23
<b>19. REVANZAREA CARUCIORULUI</b>	<b>23</b>
<b>20. SERVICE SI INSPECTIILE PERIODICE</b>	<b>23</b>
<b>21. ARUNCAREA CARUCIORULUI</b>	<b>24</b>
<b>22. ACTUL DE CONFORMITATE POTRIVIT LEGILOR EUROPENE PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICALE</b>	<b>25</b>
<b>23. NOTITE</b>	<b>26</b>
<b>24. SERVICE-URI AUTORIZATE</b>	<b>27</b>
<b>25.. CARDUL DE GARANTIE</b>	<b>28</b>

## INTRODUCERE

Vă multumim ca ati ales caruciorul nostru special MOUSE. Speram sa fie cauza a multor momente speciale alaturi de copilul dumneavoastra si ca va va fi folositor in fiecare zi. Facem eforturi mari ca produsele noastre sa fie exact ceea ce va asteptati. Nu ezitati sa ne urmariti pe toate platformele noastre sociale si sa vizitati site-ul nostrum pentru mai multe informatii, dealtfel nu ezitati sa ne contactati pentru orice nelamurire legata de produsele noastre.

### 1. Scopul caruciorul

Mouse" este un carucior multifunctional destinat pentru copii cu dizabilitati. Caruciorul are o structura de aluminiu cu elemente din fier. Permite scoaterea fara dificultate a rotilor sau a suportului pentru cap. La caruciorul nostru se pot atasa diverse accesorii pentru a spori functionalitatea acestuia: masa, centuri de siguranta, plasa de tantari, protective impotriva soarelui/ploii, sac de dormit, geanta pentru cumparaturi etc. Utilizatorii nu pot folosi caruciorul singuri ci doar ajutati de un adult/parinte/asistent medical etc. Caruciorul poate fi folosit atat in interior cat si afara pe diferite suprafete: asfalt, beton, pamant, etc. cat si in diferite conditii meteo. Alta folosire a caruciorului in afara de cele mentionate este strict interzisa. Caruciorul trebuie folosit asa cum este descris in prezentul manual si doar de un adult. Copii, adolescentii si persoanele neinstructite nu sunt sfatuite sa foloseasca acest carucior.

MOUSE este un dispozitiv medical de clasa I menit sa fie folosit de copii cu dizabilitati care, datorita conditiei lor, nu pot merge sau sta "in fund" singuri. Produsul va fi folosit pentru transportarea copiilor cu dizabilitati, mutarea lor si corectarea posturii acestora.

Indicatii clinice: Pentru copii care sufera de paralizie cerebrala, meningita, distrofie, paralizie, etc.

Acest produs este menit pentru copii intre 2 si 6 ani. Inainte de folosirea produsului va sfatuim sa vorbiti cu un medic specialist sau cu un specialist in terapie de recuperare.

**Contraindicatii:** În caz de contraindicație a poziției șezând și/sau poziționării verticale pasive, reglarea căruciorului trebuie consultată cu un kinetoterapeut sau cu medicul curant.

### 2. Informatii de baza despre caruciorul MOUSE

Caruciorul MOUSE are multe optiuni e.g.:

- Ajustarea spatarului 10.3
- Ajustarea spatarului si a bazei scaunului. 10.2
- Ajustarea adancimii scaunului 12.4
- Ajustarea suportului pentru picioare 9.11
- Stabilizarea torsoului 12.11 si 12.2
- Echipament optional 12

### 3. Început rapid

Pentru a incepe sa folosesti caruciorul, acesta trebuie despachetat si pregatit pentru folosire conform punctului 15 si a punctului 16. Mai jos aveti o scurta pictograma care nu va inlocui insa citirea cu atentie a intregului manual.



## Siguranta

### 4. Instructiuni importante si reguli de siguranta

- Este interzisa folosirea necorespunzatoare a caruciorului.
- Produsul contine componente mici – PERICOL DE INGHITIRE !
- Caruciorul are O POISBILITATE DE AJUSTARE FOARTE MARE – Atentie ca in timpul ajustarilor capul copilului sa nu ajunga sub linia pelvisului – PERICOL DE SUFOCARE!
- ESTE INTERSIZA folosirea de rucsacuri sau genti atarnate de spatarul scaunului – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului si ranirea copilului dvs. In caz ca aveti nevoie de spatiu pentru depozitare se pot achizitiona accesoriile speciale pentru acest lucru.
- ATENTIE! In functie de ajustarile pe care le faceti caruciorului acesta isi poate modifica dimensiunile !
- ATENTIE! De fiecare data, inainte de folosire, trebuie urmati toti pasii din prezentul manual, iar caruciorul trebuie verificat sa nu aiba defectiuni ce va pot pune in pericol pe dvs. si pe copilul dvs. Pentru orice nelamurire nu ezitati sa ne contactati.
- ATENTIE! Atunci cand treceti cu caruciorul printr-un spatiu care are usi, asigurati-va ca este spatiu destul in lateralele caruciorului pentru nu va prinde mainile sau pentru a nu zgaria caruciorul.

---

#### ATENTIE!



- NU va lasati niciodata copilul nesupravegheat in carucior.
- Acest produs nu este menit pentru alergare si/sau patine cu rotile.
- Caruciorul nu se va folosi ca scaun pentru masina!
- Nu carati/ridicati caruciorul in timp ce copilul dvs se afla in scaun.
- Caruciorul este impachetat intr-o punga de plastic. Punga nu este o jucarie si ar trebui tinuta departe de copii – PERICOL DE SUFOCARE !

---

**ATENTIE! Este interzisa folosirea căruciorului atunci cand nu sunteti siguri ca acesta este intr-o conditie perfecta sau daca suspectati ca una din partile componente ale caruciorului este defecta. Daca aveti orice suspiciune legata de siguranta caruciorului va sfatuim sa nu il folositi si sa ne contactati cat de repede posibil.**

**5. 5.1 Placuta de indentificare :**

- Placuta de indentificare contine: numele caruciorului, modelul, numarul de serie, greutate maxima admisa, data producerii, semnul CE, marca de dispozitiv medical si anumite atentionari. (vezi fig.5.1)
- Placuta de indentificare este localizata pe rama caruciorului, pe partea stanga.

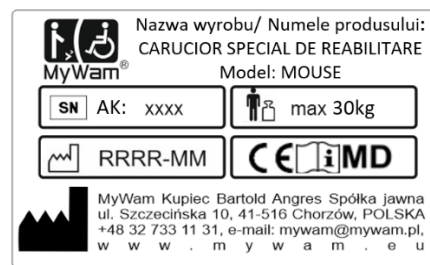


Fig. 5.1

**5.2 Plăcuța cu codul UDI**

Plăcuța cu codul UDI include următoarele informații: numele, modelul, codul UDI, detaliile producătorului (vezi Fig. 5.2)



Fig. 5.2

**6. Etichete de avertizare**

- Etichetele de avertizare contin atentionari care vizeaza utilizatorul.
- Etichetele de avertizare sunt situate pe fiecare parte a ramei caruciorului !

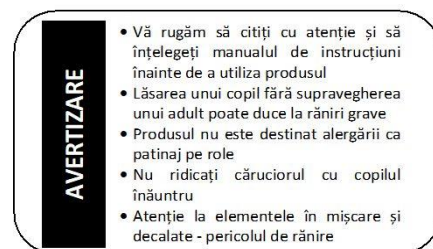


Fig. 6.1

**7. Simbolurile**

Număr de serie	Numele producătorului
Greutate maxima admisă	Produsul este un dispozitiv medical
Data producerii	
Conformitate cu normele europene	Semnul folosit pentru a atrage atenția cititorului privind anumite pericole.
Avertizare – folosirea căruciorului conform prezentului manual de utilizare.	



## 8. Asamblarea generala a caruciorului

Caruciorul MOUSE este alacatuit din doua mari parti : Rama caruciorului si scaunul therapeutic. MOUSE ofera o varietate de accesorii pentru diferitele nevoi pe care le puteti avea.

Rama de fier cu elemente din aluminiu contine (Fig.4.1.):

Ghidon ergonomic, ajustabil	(Fig.8.1.-nr 2)
Roti pivotante in fata	(Fig.8.1.-nr12)
Funcția de blocare a rotilor din fata	(Fig.8.1.-nr15)
Sistem de absorbtie a socurilor (rotile din fata)	(Fig.8.1.-nr14)
Sistem de impachetare a rotilor din fata	Fig.8.1.-nr13)
Rotile din spate	(Fig.8.1.-nr 8)
Sistem de absorbtie a socului (rotile din spate)	(Fig.8.1.-nr24)
Sistem de impachetare a rotilor din spate	(Fig.8.1.-nr23)
Frana centrala	(Fig.8.1.-nr 9)
Cos de cumparaturi	(Fig.8.1.-nr11)
Carlige de prindere a scaunului de rama	(Fig.8.1.-nr 6)
Inchizatoare	(Fig.8.1.-nr 3)
Sistem de impachetare a ramei	(Fig.4.1.-nr 4)

Scaunul ajustabil contine :

Scaunul este fabricat din material sintetic	
Perne laterale	(Fig.8.1.-nr18)
Spatar ajustabil	(Fig.8.1.-nr5)
Inchizatoare bariera de sigurant	(Fig.8.1.-nr7)
Bariera de siguranta	(Fig.8.1.-nr19)
Centura de siguranta	(Fig.8.1.-nr20)
Opritor	(Fig.8.1.-nr17)
Perne ajustabile	(Fig.8.1.-nr21)
Baldachin ajustabil cu fereastră	(Fig.8.1.-nr1)
Support pentru picioare ajustabil	(Fig.8.1.-nr16)
Extensie pentru suportul de picioare	(Fig.8.1.-nr22)
Bara de inclinare optionala	(Fig.8.1.-nr10)

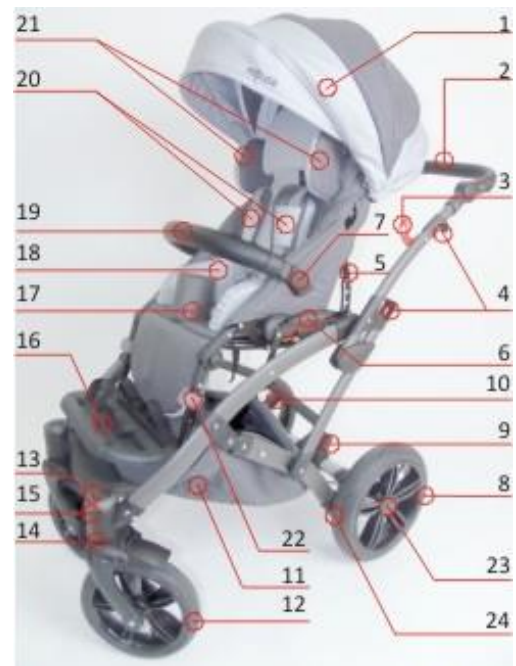


Fig. 8.1  
Construcția principală a căruciorului

## 9. Configuratia si folosirea ramei de aluminiu

### 9.1 Mecanismul de rabatare al ramei

Mecanismul de rabatare al ramei este localizat pe interiorul ramei, in doua puncte pe partea dreapta si in trei locuri pe partea stanga.



Fig. 9.1.

*Puncte de pliere*

### 9.2 Deschiderea ramei. Blocarea in timpul transportului.

Pentru a deschide rama caruciorului, pozitionati caruciorul orizontal pe podea si defaceti siguranta pentru transport. (Fig. 9.2.1). Apoi aduceti usor spatarul in pozitie dreapta. Fig. 9.2.2.). Pentru a seta caruciorul trageți ușor de maneta în sus în timp ce aduceți caruciorul în poziția dorită până când siguranța este activată. Rama caruciorului nu se va deface corespunzător până ce mecanismul de rabatare nu este activat. Acest lucru se va întâmpla atunci când veți auzi un clic – ceea ce va asigura ca dispozitivul este rabatat corect si sigur pentru folosire.

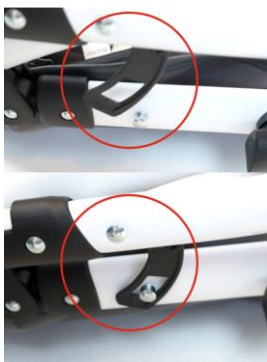


Fig. 9.2.1

*Încuietoare de transport*



Fig. 9.2.2

*Desfacerea cadrului*

### 9.3 Inchiderea ramei

- **Descrierea mecanismului de rabatare din partea de jos a ramei caruciorului:**

Pentru rabatarea ramei: pozitioneaza levierul sub manerul de impingere al caruciorului, pe partea dreapta a ramei si ridica simultan ambele manere deasupra mecanismului de rabatare. Rabatati apoi rama caruciorului si atasati siguranta pentru transport. (poza 9.3.1.)

- **Descrierea mecanismului de rabatare din partea de sus a ramei caruciorului:**

Pentru rabatarea ramei: pozitioneaza levierul sub manerul de impingere al caruciorului, pe partea dreapta a ramei, si ridica simultan ambele manere deasupra mecanismului de rabatare. Rabatati apoi rama caruciorului si atasati siguranta pentru transport.



Fig. 9.3.1

*Mecanismul de jos*



Fig. 9.3.2

*Mecanismul de sus*



Fig 9.4.1  
Buton de eliberare  
rapidă



Fig 9.4.2  
Buton de blocare a  
direcției

#### 9.4 Rotile pivotante (se misca la 360 de grade) din fata. Blocarea directiei de mers a rotilor.

Rotile durabile ale caruciorului asigura cea mai buna calitate a plimbarilor si a condusului caruciorului. Anvelopele sunt fara camera, pline cu un gel care ajuta la absorbirea socurilor.

Ambele roti din fata pot fi blocate sa mearga doar drept sau pot fi setate sa se invarta la 360 de grade, ceea ce face manevrarea caruciorului mult mai usoara. Datorita sigurantei care se poate atasa sau se poate activa sau dezactiva, caruciorul este mult mai maleabil pentru diferite tipuri de activitati.

Este recomandat sa indepartati siguranta si sa lasati rotile sa se invarta atunci cand folositi caruciorul pe o suprafata plana (in magazine, scoala, acasa, etc).

- **Asamblarea:** Pentru a atasa rotile, inserati axa rotii in slotul special destinat al sistemului de rabatare pana auziti un clic. Clicul este semnul ca asamblarea a fost facuta corect. Pentru demontarea rotilor din fata apasati butonul din fata rotilor si scoateti axa rotilor din slotul special destinate. (Fig. 9.4.1 )

- **Blocarea directiei rotilor.** In caz de suprafete denivelate sau suprafete alunecoase si/sau curbe este recomandat sa instalati siguranta si sa blocati rotile. Pentru a le bloca rotile rasuciti de buton. (Fig.9.4.2)

#### 9.5 Rotile din spate. Instalarea si dezinstalarea lor.

Rotile durabile si rezistente asigura confortul folosirii caruciorului nostru. Rotile sunt fara camera, umplute cu un gel special care are rolul absorbirii socurilor.

Datorita posibilitatii de a scoate rotile, caruciorul devine mic si practic dupa rabatare si faciliteaza transportarea si depozitarea.

Mecanismul de asamblare este situat in spatele rotilor din spate si asigura asamblarea si dezasamblarea rapida a rotilor. Apasam pe clama mecanismului de asamblare spre centrul rotii, dupa care roata se poate atasa sau se poate scoate cu usurinta.

- **Asamblarea:** Cand instalati rotile din spate pe axa lor, apasati pe clema mecanismului spre centrul rotii si puneti roata la inceputul axei. Apoi opriti-va din a apasa pe clema si glisati roata pana auziti un clic.
- **Dezmembrarea:** Pentru a scoate rotile apasati pe clema si glisati roata din axa ei Fig 9.5.2.



Fig 9.5.1  
Cataramă cu montare rapidă



Fig 9.5.2  
Dezasamblare roata

### 9.6 Sistemul de amortizare a roților din spate

Caruciorul este echipat cu un sistem de amortizare pe arcuri a ramei și a roților din spate. Acesta funcționează automat. Ajustarea se face prin activarea levierului de sub amortizor. Pentru a facilita schimbarea setărilor este permisă punerea presiunii pe arcul amortizor. Atunci când levierul este mutat arcul de amortizare se va strânge (potrivit pentru sol tare) sau se va extinde (potrivit pentru sol moale).

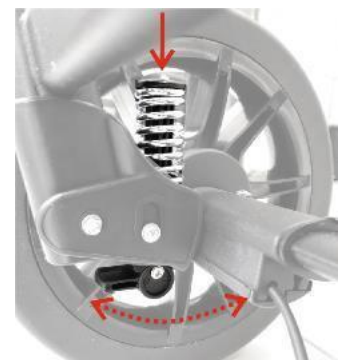


Fig 9.6

*Sistem de amortizare a roților*

### 9.7 Manerul ergonomic de împins caruciorul. Mecanismul de ajustare a manerului.

Manerul este folosit pentru a împinge caruciorul, asigurând o prindere fermă pentru orice fel de condiții. Este prevăzut cu un sistem de reglare în funcție de înălțimea celui care conduce caruciorul. Fig. 9.7

- Mecanismul de ajustare: Manerul are două butoane localizate în afara ramei, la îmbinările manerului.
- Unghiul de ajustare al manerului. Pentru a schimba unghiul manerului de împingere, apăsați ambele butoane ale mecanismului și schimbați unghiul. După ce așezați manerul în poziția dorită, opriti-vă din a apăsa butoanele. Acest lucru va face ca manerul să se blocheze automat în poziția dorită.



Fig 9.7

*Reglarea unghiulară a mânerului*

### 9.8 Frana centrală. Activarea și dezactivarea franei.

Pedala pentru frana centrală se află pe mijlocul bari transversale din spate. Aceasta pedala blochează roțile din spate direct.

- **Oprirea și pornirea franei**

Pentru a activa frana apăsați pe pedala din mijloc până auziți un clic. Activarea corectă este indicată de clicul pe care îl auziți. Pentru a dezactiva frana ridicați de pedala în sus.



Fig 9.8

*Frână centrală*



Fig 9.9

*Suport picior inclinare*

### 9.9 Picioarul pentru inclinarea caruciorului

Picioarul pentru inclinarea caruciorului se afla pe partea dreapta a barii transversale, in spatele ramei. Pentru a il folosi apasati pe picioarul de inclinare in timp ce trageți de maner ca sa impingeti caruciorul – acest lucru va face ca partea din fata a caruciorului sa se ridice cu tot cu roți. (Fig. 9.9) Folosirea picioarului pentru inclinare ajuta conducerea caruciorului peste obstacole mici sau in curbe.



Fig 9.10  
Mâner de transport

### 9.10 Manerul pentru transport

Manerul pentru transport este localizat deasupra cosului de cumparaturi. (Fig. 9.10)

### 9.11 Suportul pentru picioare. Ajustari si localizare

- Pentru a schimba inclinarea suportului pentru picioare, apasa pe butoanele evidentiate in imagine, de pe ambele parti ale suportului pentru picioare. Tineti butoanele apasate si potriviti suportul in pozitia dorita. Opriti-va din a apasa pe butoane. (Fig. 9.11.1)

- Pentru a schimba inaltimea suportului pentru picioare desurubati suruburile si trageți de manerele pentru ajustare. In locul suportului pentru picioare trebuie instalate doua tuburi si restranse surburile. Suportul pentru picioare trebuie inserat in tub pentru a obtine un suport de picioare aflat cu 3 pozitii mai sus. (Fig. 9.11.2). Suportul pentru picioare este prevazut cu centuri care asigura picioarele copilului. Este recomandat sa le strangeti in timp ce folositi caruciorul.



Fig. 9.11.1  
Butoane de înclinare



Fig. 9.11.2.  
Șuruburi și prelungiri

## 10. Atasarea si indepartarea scaunului de pe rama din aluminiu.

### 10.1 Atasarea si indepartarea scaunului de pe rama de aluminiu.

Cele doua carlige ale ramei atasate sunt un element foarte important. Ele sunt destinate atasarii scaunului de rama de aluminiu. Folosirea conforma a celor doua carlige este esentiala pentru siguranta utilizatorului. Inainte de orice folosire asigurati-va ca nu exista nicio crapatura sau spartura in rama de aluminiu. Verificati daca aceasta functioneaza corespunzator. Nu este permisa folosirea caruciorului daca aveti orice indoiala legata de siguranta componentelor acestuia.

- **Asamblarea scaunului.** Scaunul poate fi positionat cu fata sau cu spatele la cel care conduce caruciorul. Pentru a instala scaunul, positionati-l pe carligele de pe rama si apasati pana auziti un clic. Fig 10.1.1.



Fig. 10.1.1  
Cârlige pentru montarea scaunului



Fig. 10.1.2  
Buton de eliberare a scaunului

- **Dezmembrarea scaunului.**

Pentru a dezmembra scaunul apasa pe cele doua butoane colorate aflate in partea de jos a carligelor. Scoateti apoi scaunul din carligele de pe rama. (Fig 10.1.2.)

### 10.2 Scaun ajustabil, spatar cu functie de inclinare

Caruciorul are un scaun care poate fi ajustat in 4 pozitii diferite, inclusiv intr-o pozitie de “patut”. Pentru a schimba pozitia, trage de manerul din fier din spatele scaunului si schimba usor pozitia. Dupa ce v-ati asigurat ca scaunul este in pozitia dorita, opriti-va din a trage de maner.

**Atentie! Fiecare schimbare de pozitie altereaza centrul de greutate si afecteaza stabilitatea caruciorului.**

**Atentie! Nu lasati niciodata copilul in carucior in timp ce faceti ajustarile necesare!!!**



Fig. 10.2  
Scaun reglabil

### 10.3 Spatar ajustabil

Spatarul caruciorului poate fi ajustat in numeroase pozitii – pozitie de stat vertical – pozitie orizontala. Pentru a schimba pozitia aduceti intai spatarul in pozitia de “stat in fund”. Trageti apoi de maneta afalata in spatele spatarului si modificati pana ajungeti la pozitia dorita. Dupa ce ajungeti la pozitia dorita trageti de maneta in jos.



Fig 10.3  
Mâner înclinare spatar

**Atentie ! Orice modificare a pozitiei spatarului inseamna o modificare in centura cu 5 puncte!**

**Atentie ! Nu lasati niciodata copilul in carucior in timp ce executati ajustarile necesare !**

**Atentie ! In timpul ajustarilor frana trebuie sa nu fie apasata!**

## 11. Echipament de baza

### 11.1 Hamul in 5 centuri

Caruciorul este prevazut cu un ham format din 5 centuri (dotarile standard)

- Ajustarea centurii in 5 puncte. Ajustati centura pe marimea copilului dvs. Inainte de a o atasa la carucior. Ajustati lungimea centurilor.

- Folosire. Pentru a pune copilul in hamul cu 5 puncte de inchidere, puneti bretele pe ambele parti ale copilului si atasati ambele bretele la inchizatoarea centurii atasata de scaun. Pentru a scoate copilul din hamul cu 5 puncte apasati pe butonul de pe inchizatoare si desfaceti bretelele.

**ATENTIE: La orice modificare a pozitiei spatarului va fi nevoie sa reajustati hamul.**



Fig 11.1.  
Centuri in 5 puncte

### 11.2 Bara de protectie.

Căruciorul poate fi echipat cu o bariera de protectie care impiedica utilizatorul caruciorului sa cada "spre fata".

- Bara de protectie se monteaza folosind acelasi mecanism ca atunci cand montati masa terapeutica, deci nu veti putea folosi ambele accesorii in acelasi timp. Pentru a fixa bariera de protectie la rama caruciorului, folositi-va de tuburile de fixare si glisati pana auziti un clic. Pentru a scoate bara de protectie desfaceti ambele sisteme de prindere si trageti de bara in acelasi timp.



Fig 11.2  
Bara de protectie

### 11.3 Baldachin ajustabil, cu fereastră



Fig 11.3  
Baldachinul ajustabil

Caruciorul poate fi prevazut cu un baldachin ajustabil cu fereastră care ajuta la protejarea copilului dvs. de soare sau ploaie. Elementele din care este format baldachinul sunt: Rama baldachinului, mecanismul de ajustare al baldachinului, doua sisteme de prindere cu butoane rosii care ataseaza baldachinul la rama caruciorului, tapiseria baldachinului si o plasa de tantari cu fermoar.

- **Asamblarea baldachinului.** Sistemul de prindere al baldachinului este constituit din doua bucati de plastic situate in afara spatarului, in partea de sus. Aceste bucati din plastic vor fi folosite sa atasam baldachinul.

Pentru instalare, ridicati spatarul in pozitie orizontala si glisati inchizatoarele baldachinului in spatiile special concepute de pe spatarul scaunului in acelasi timp. Montati baldachinul astfel incat

tapiseria acestuia sa se suprapuna cu spatele caruciorului.

- **Dezasamblarea baldachinului.** Pentru a dezambla baldachinul, apasati pe cele doua butoane rosii care asigura sistemul de prindere si glisati bucatile din plastic din spatial special conceput de pe spatarul scaunului.

- **Folosirea baldachinului.** Pentru a ajusta marimea baldachinului, tineti arcul din spate al baldachinului si arcul din fata al baldachinului si apropiati-le sau departati-le pentru a ajunge la forma dorita. Un lucru special pe care il are baldachinul nostru este fereastra, special conceputa pentru aerisire. Fereastra se inchide si se deschide cu ajutorul unui fermoar si este prevazuta cu o plasa pentru tantari.

#### 11.4 Cosul pentru cumparaturi

Caruciorul poate fi prevazut cu un cos pentru cumparaturi. Acesta este prevazut pentru a transporta lucruri mici rezistente la socuri, apa si murdarie.

Se va monta sub scaunul caruciorului. Acesta se va infasura pe rama caruciorului si va fi asigurat cu un fermoar special prevazut.

Incarcatura maxima a cosului de cumparaturi este de 3 kg.



Fig 11.4

*Cosul de cumparaturi*

#### 11.5 Centuri pentru siguranta.

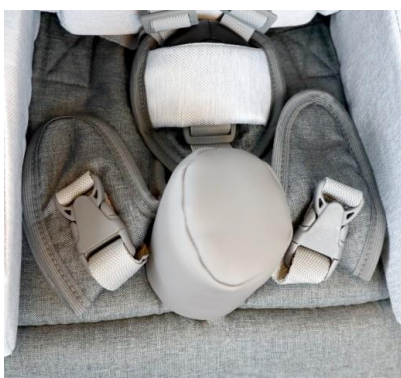


Fig 11.5

*Centurile de stabilizare*

Centurile pentru siguranta sunt folosite pentru un support pelvin additional si previn alunecarea copilului dvs. din carucior. Modul corect de a le folosi este sa asiguram copasele copilului in asa fel incat zona lui pelvina sa fie cat mai apropiata de spatul scaunului. Acest lucru va asigura o pozitie mai corecta si mai sanatoasa a copilului..

- **Ajustare.** Pentru a ajusta lungimea centurilor trebuie sa mutam dispozitivele de reglare in sus sau in jos in functie de lungimea pe care ne-o dorim.
- **Folosire.** Pentru a putea folosi centurile, infasurati picioarele copilului dvs. si asigurati centurile inchizandu-le in cataramele din fata.

#### 11.6 Perna tip wedge

Caruciorul poate fi cumparat cu un wedge care este montat intre picioarele copilului dvs. pentru a preveni inclinarea spre stanga sau spre dreapta a acestora. Wedge-ul poate fi ajustat in 2 pozitii. Fig.11.6



Fig 11.6

*Pana/Abductor*

#### 11.7 Pernele pentru captuseala



Fig 11.7

*Pernele pentru captuseala*

Caruciorul este prevazut cu perne pentru captuseala ca asigura materialul din Velcro de pe spatul scaunului in caz ca nu este montat niciun alt echipament suplimentar.. Fig 11.7.

#### 11.8 Tapiseria

Caruciorul este prevazut cu tapiserie care este total detasabila pentru a putea fi curatata mai usor. Pentru a scoate tapiseria, desfaceti sigurantele cu care este atasata la rama caruciorului. Metodele de curatare recomandate sunt listate la capitolul 17, punctul 8.



## 12. Accesorii

### 12.1 Suport pentru cap ajustabil - ↔ si ↕

Pentru a ajusta suportul pentru cap, dati la o parte tapiseria din fata si din spatele scaunului. Apoi indepartati butoanele suportului pentru cap care sunt situate in spatele scaunului. Ajustati suportul pentru cap. Cand ajungeti la pozitia dorita insurubati la loc butoanele in golurile special destinate. La final trageți inapoi tapiseria scaunului.. Fig 12.1



Fig 12.1

*Padurile laterale*

### 12.2 Pad-uri ajustabile pentru piept si spate - ↔ and ↕

Pentru a ajusta pad-urile pentru spate si piept indepartati intai tapiseria din fata si din spatele scaunului. (Fig 12.2.1) (Fig 12.2.2). Apoi scoateti butoanele pentru padurile de piept si spate, situate in partea din spate a scaunului (Fig 12.2.3) si ajustati pad-urile in fata scaunului. Cand ajungeti la pozitia dorita, puneti butoanele la loc si trageți inapoi tapiseria din fata si din spatele scaunului. (Fig 12.2.4)

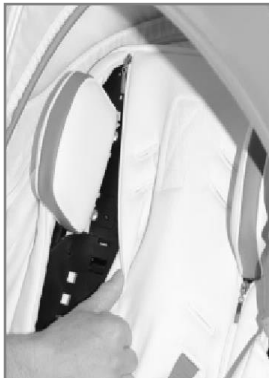


Fig 12.2.1

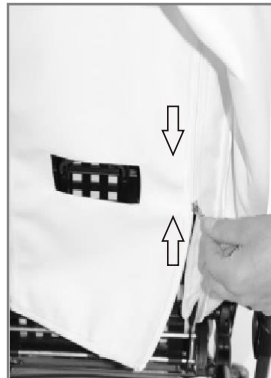


Fig 12.2.2

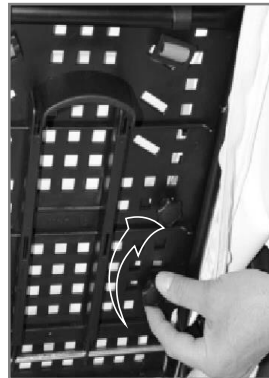


Fig 12.2.3



Fig 12.2.4



Fig 12.3

Masuta terapie

### 12.3 Masa pentru terapie

Caruciorul poate fi prevazut cu o masa terapeutica, cu o suprafata nealunecoasa si care poate suporta o incarcatura pana la 3 kg.– Fig.12.3.

Masa se monteaza cu acelasi system cu care se monteaza si bariera de protectie deci nu pot fi folosite concomitent.

Glisati masa in tuburile de fixare pana auziti un clic. Atasati apoi tuburile de rama caruciorului. Pentru a dezmembra masa deschideti ambele inchizatori de pe rama caruciorului si trageți de masa in acelasi timp.

Atentie! In timpul modificarilor aduse scaunului obiectele de pe masa trebuie securizate.



Fig 12.4

*Kit de minimizare a scaunului*

#### 12.4 Kitul de micșorare al scaunului.

Caruciorul este prevăzut cu insertii (vezi fig.12.4) care vor fi folosite pentru a micșora spațiul din scaunul caruciorului. Aceste insertii sunt detașabile (prevăzute cu fermoar).

- **Asamblare:** Inserțiile se pun în scaunul caruciorului și se adaptează la toate ajustările scaunului. Se atachează printr-un material Velcro.
- **Scoaterea insertiilor** se face prin simpla tragere a acestora de pe tapiseria scaunului.

#### 12.5 Geanta de calatorie

Geanta de calatorie este montată pe manerele de sub manerul de împingere

al caruciorului. (see Fig. 12.5). Incărcatura maximă este de 2 kg.



Fig 12.5

*Geanta de voiaj*

#### 12.6 Umbrela pentru soare

Caruciorul poate fi prevăzut cu o umbrelă de soare care are rolul de a vă proteja copilul atunci când soarele devine mult prea puternic. (vezi Fig. 12.6)



Fig 12.6

*Umbrela de soare*

#### 12.7 Mănușile pentru iarna

Manșile de iarnă sunt pentru cel care manevrează și conduce caruciorul (parinte, asistent medical, etc) Acestea ajută parintele să împingă caruciorul chiar și în condiții termice neplăcute, temperaturi scăzute (vezi Fig.12.7). Prima oară se atachează bucatile de arici de manerul de împingere al caruciorului. Apoi manșile se pun pe bucatile de arici și se securizează cu închizătorile special prevăzute.



Fig 12.7

*Manusi pentru iarna*

#### 12.8 Sac de dormit pentru iarna.

Caruciorul poate fi prevăzut cu un sac de dormit pentru iarnă. Acesta asigură confortul copilului dvs. la temperaturi mai scăzute. (Fig. 12.8).

#### 12.9 Plasă de țânțari

Caruciorul poate fi prevăzut cu o plasă de țânțari (vezi Fig. 12.9). Acest accesoriu adițional trebuie să fie compatibil cu celelalte accesorii. Puneți plasa de țânțari de sus, peste baldachin și acoperiți în întregime scaunul dar și suportul pentru picioare.

## 12.10 Protecția de ploaie

Caruciorul poate fi prevăzut cu o protecție de ploaie care vă oferă avantajul de a putea folosi caruciorul indiferent de condițiile meteo. Acest accesoriu trebuie montat peste alte accesorii incluse ale caruciorului. Pentru montare, puneți protecția de ploaie peste baldachin și acoperiți scaunul și suportul pentru picioare. (see Fig. 12.10).



Fig 12.8  
*Sacul de dormit pentru iarna*



Fig 12.9  
*plasa de tantari*



Fig 12.10  
*Protecția de ploaie*

### 13. Specificatii tehnice

Lungimea caruciorului	95-124 cm
Latimea caruciorului	60 cm
Inaltimea caruciorului	122 - 134 cm
Greutate totala	17,2 - 23,2kg
Adancimea scaunului	22* / 26 cm
Latimea scaunului	24* / 32 cm
Inaltimea spatarului	52 cm
Latimea spatarului	30 cm
Distanta dintre sup. de picioare si spatar. / numarul de ajustari	14,5-23 cm / 4 pozitii
Lungimea caruciorului pliat	Cadru 84 cm /Scaun 72 cm
Latimea caruciorului pliat	Cadru 58 cm /Scaun 42 cm
Inaltimea caruciorului pliat	Cadru 25 cm /Scaun 39 cm
Capacitatea cosului de cumparaturi	5 kg
Capacitatea gentii de calatorie	2 kg
Greutate maxima admisa a caruciorului	30 kg
Inaltimea maxima a utilizaorului	80 - 110 cm
Unghiurile scaunului / Nr. De pozitii/ajustari	8°-23° / 4 pozitii
Unghiurile spatarului / Nr.de pozitii/ajustari	16°-88° / 4 pozitii + intins
Unghi sup. picioare / Nr.de pozitii/ajustari	ok 84°-173° / 6 pozitii

#### COMMENTARII

\*) VALORILE MARCATE ASTFEL

TOLERANTA VALORILOR +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 °

PRODUCATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A FACE MODIFICARI PRIVIND PARAMETRII TEHNICI

#### 13.1 COMPOZIȚIA MATERIALULUI DIN CARE ESTE FĂCUT CĂRUCIORUL

Fier pudrat si aluminiu, materiale 100% polyester si plastic (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

#### 14. Livrare si unelte

Căruciorul este livrat intr-o cutie de carton si este pre-asamblat. Pachetul ar trebui sa conțină următoarele :

- Rama pliata cu scaun, spatar si roti.
- Echipamentul optional pe care l-ati comandat.
- Manual de utilizare si cardul de garantie.

Înainte de folosire asigurati-va ca pachetul contine tot ce ati comandat si ca niciunul din elemente nu a fost stricat sau spart in timpul transportului. In cazul in care una din parti lipseste sau este stricata contactati vanzatorul si/sau producatorul pentru a putea primi elementul lipsa sau inlocui elementul stricat.

Datorita multifunctionalitatii si echipamentului suplimentar care poate fi atasat la caruciorul dvs. acesta poate fi personalizat pentru a se adapta cat mai bine nevoilor dvs. Pentru a face asta cititi integral prezentul manual.

Nu aveti nevoie de unelte pentru a asambla sau dezambla caruciorul.

O surbelniță Philips este necesară pentru ajustarea suportului pentru picioare. O cheie Allen este necesara pentru ajustarea inaltimei spatarului si a adancimii scaunului.

## 15. Asamblarea si dezasamblarea produsului

- **Asamblarea caruciorului.** In pachetul pe care il veti primi caruciorul este deja pre-asamblat. Duceti pana la capat asamblarea urmărind pasii:
  - a) **Montati rotile din spate pe axa special destinata**
  - b) **Desfaceti rama caruciorului si suportul pentru picioare:**
    - Porniti/opriti siguranta pentru rotile din fata
    - Ajustati inaltimea si unghiul manerului pentru impingere a caruciorului
    - Ajustati unghiul de inclinare al scaunului
    - Ajustati unghiul de inclinare al spatarului
    - Ajustati lungimea centurilor hamului
    - Ajustati unghiul de inclinare al suportului pentru picioare si inaltimea acestuia
  - c) **Instalati accesoriile recomandate:**
    - Ajustati marimea scaunului (kitul de miscorare al scaunului)
    - Instalati masa terapeutica sau bara de siguranta
    - Ajustati centurile de siguranta
    - Ajustati baldachinul cu fereastră
    - Instalati si ajustati wedge-ul
    - Instalati geanta pentru calatorie
    - Instalati cosul pentru cumparaturi
    - Instalati accesoriile pentru diferite anotimpuri (sacul de dormit pentru iarna, manusile pentru iarna, plasa de tantari, etc)
  - d) **Dezmembrarea caruciorului:**
    - Scoateti toate echipamentele
    - Desfaceti scaunului de pe rama din aluminiu.
    - Blocati rotile din fata, pliat suportul pentru picioare si rama
    - Desfaceti rotile din fata si din spate
    - Pliati scaunul si blocati siguranta de transport.

## 16. Pregatiri de folosire

### Inainte de a folosi caruciorul:

- Verificati ca toate componentele caruciorului sa fie in perfecta stare de functionare. In caz de piese defecte contactati producatorul si/sau vanzatorul.
- Verificati ca rama caruciorului sa fie pliata conform instructiunilor si ca este blocata cu siguranta pentru transport.
- Verificati ca scaunul sa fie corect atasat la rama caruciorului.
- Verificati ca toate rotile sa fie instalate corespunzator si ca toate anvelopele sunt in perfecta stare de functionare.
- Verificati ca frana centrala sa fie apasata si ca aceasta functioneaza corect.
- Faceti corect toate ajustarile conform nevoilor copilului dvs.
- Verificati ca tapiseria scaunului sa fie complet uscata.
- Securizati copilul ajutandu-va de toate elementele stabilizatoare ale caruciorului : insertiile de micorare, centurile, wedge-ul, suportul pentru picioare, etc.
- Asigurati-va ca utilizatorul este imbracat cu haine care acopera punctele corpului care iau contact cu centurile si restul elementelor stabilizatoare.
- In cazul in care copilul dvs. are probleme cu incontinenta urinara, o musama suplimentara trebuie pusa pe scaunul caruciorului. Aceasta musama poate fi cumparata din orice farmacie.

- In cazul folosirii altor dispozitive medicale (tuburi, catetere etc) aveti grija ca aceasta sa fie pozitionate corect si protejate.

## **17. Folosirea caruciorului**

### **17.1 Transportul caruciorului**

Cel mai bun mod de a transporta caruciorul este sa va folositi de roti. In cazurile unde acest lucru nu este posibil din motive de siguranta, caruciorul poate fi ridicat si transportat dupa ce toate echipamentele suplimentare au fost scoase. (inluzand rotile – pentru a il face mai usor). Atunci cand carati sau ridicati caruciorul, transportati-l folosind partile fixe ale ramei. Din motive de siguranta nu incercati sa ridicati caruciorul atunci cand toate echipamentele suplimentare si rotile sunt atasate. Nu ridicati caruciorul de bara de siguranta, de masa de terapie sau de orice alt echipament suplimentar atasat.

### **17.2 Punerea si scoaterea copilului in si din carucior**

Atunci cand puneti copilul in carucior aduceti caruciorul cat de aproape posibil de o suprafata sigura. Dupa ce ati apasat frana si ati ridicat suportul pentru picioare puteti pune copilul in carucior.

Nu va sprijiniti de suportul pentru picioare, acest lucru poate rasturna caruciorul si poate provoca ranirea dvs. sau a copilului dvs. Atunci cand scoateti copilul din carucioru asigurati-va ca acesta nu se sprijina de suportul pentru picioare – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului, provocand rniea dvs. si a copilului dvs.

### **17.3 POZITIA CORECTA ATUNCI CAND FOLOSIM CARUCIORUL**

Din motive de sanatate si siguranta, este recomandat ca zona pelvina si spatele copilului dvs. sa fie cat mai aproape de spatar.).

Coapsele utilizatorului trebuie sustinute de scaun in toata lungimea lor (ajustarea adancimii scaunului si picioarele trebuie sustinute de suportul pentru picioare. (veti impiedica alunecarea copilului dvs, din carucior). O pozitie corecta a picioarelor este esentiala in vederea mentinerii unui tonus muscular bun in membrele inferioare ale corpului.

Datorita optiunilor mari de ajustare a scaunului si a spatarului este posibila ajustarea pana ce capul copilului dvs sa fie sub zona pelvina. Aceasta pozitie este strict interzisa deoarece poate duce la sufocarea copilului dvs.

### **17.4 Conducerea caruciorului**

Atunci cand folosim cruciorul vom tine intotdeauna mainile pe manerul de impins. Dati drumul la frana centrala si impingeti de carucior intr-o directie sigura.

### **17.5 Conducusul caruciorului pe suprafete in panta**

Pozitionati intotdeauna scaunul astfel incat utilizatorul sa fie cu spatele la dvs. atunci cand conduceti caruciorul pe suprafete in panta. Urcati cat de usor posibil. Trebuie sa aveti control asupra caruciorului in orice moment.

Trebuie sa aveti intotdeauna in vedere faptul ca centrul de greutate al caruciorului se schimba in astfel de situatii. Atunci cand folositi rampe, verificati intotdeauna inainte de a urca caruciorul pe ea. Atunci cand urcati pe o rama asigurati-va ca rotile sunt destul de inainte pentru a o urca. Asigurati-va ca nu

atingeti cu rama caruciorului panta pe care doriti sa o urcati. In aceste situatii cel mai indica teste sa mai fie inca un adult present.

### 17.6 Pragurile si curbele

Atunci cand trecem cu caruciorul peste obstacole mici, blocati piciorul de inclinare si apasati usor pe manerul de impingere pentru a ridica usor rotile din fata ale caruciorului. Treceti cu atentie rotile caruciorului peste obstacol. Ridicati apoi de manerul de impingere in sus pentru a ridica si rotile din spate. Treceti usor cu rotile din spate peste obstacol.

### 17.7 Transportul caruciorului in masina sau in late vehicule

Pentru a transporta caruciorul in masina, scoateti toate accesoriile si depozitati-le intr-un loc sigur. Dezmembrati apoi caruciorul, pliat-l si depozitati-l in partbagajul masinii.

Daca caruciorul demontat nu este depozitat in portbagaj departe de orice persoana din masina, atunci acesta trebuie securizat foarte bine de suprafata din masina pe care il depozitati. Pentru a securiza caruciorul va puteti folosi de centurile de siguranta ale masinii. Pentru a transporta caruciorul in alt timp de vehicule : trenuri, autobuze, barci, avioane etc va rugam sa va informati inainte privind securitatea transportarii caruciorului. Pentru a transporta caruciorul folosindu-va de orice alt mijloc de transport, indepartati toate accesoriile si depozitati-le in siguranta in bagajul dvs.

## Căruciorul nu va fi folosit ca și scaun de masina!

### 17.8 Curatarea si pastrarea caruciorului

Tapiteria caruciorului trebuie spalata de mana ( temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisa spalarea tapiteriei in masina de spalat. Tapițeria trebuie spălată numai manual (apă recomandată la temperatura - 30 de grade). Toate petele trebuie curatate cat de repede se poate.

Atentie ! Nu curatati tapiteria cu solutii care contin chimicale, solvent sau decoloranti. Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a caruciorului cauzata de folosirea de solutii neaprobate.

Nu insistati asupra petelor – acest lucru poate distruge tesatura

Asigurati-va intotdeauna ca tapiteria este uscata integral inainte de folosire.



Spalare de mana



Fara decoloranti



Nu uscati la  
tambur



Uscati intr-o  
pozitie orizontala



Nu folositi fier de  
calcat

In caz de pete de mâncare, bautura, ulei:

- Uscati pata folosindu-va de servetele de hartie

- Pentru a nu mări pata, inmuiați o bucata de material in detergent si apa calduta si apasati pe pata. Clatiti orice urma de detergent. Uscati bine.

In functie de marimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetata.

Continuati procedura pana ce pata dispere.

De fiecare data cand adaugati detergent clatiti usor pana nu mai exista nicio urma de solutie.

## 18. Depozitarea caruciorului

Depozitati caruciorul intr-un loc curat, uscar si ventilat la o temperature intre 0 si 35 de grade.

### 18.1 Pregatirea caruciorului pentru o depozitare indelungata

Verificati ca toate componentele sa fie in perfecta stare de functionare si apoi depozitati caruciorul intr-un loc curat, uscat si bine aerisit.

### 18.2 Protectie impotriva coroziunii

Pentru a evita coroziunea ramei de aluminiu acesta nu trebuie depozitat in locuri umede. Atunci cand rama se uda aveti grija sa o stergeti si sa o uscati inainte de depozitare. Stergeti partea de aluminiu cu o carpa uscata imbibata cu un ulei de protectie usor. Curatarea si ungerea regulate a ramei de aluminiu cu lubrifianti de protectie, asigura o viata mai lunga caruciorului dvs.

## 19. Revanzarea caruciorului

Acest produs se poate revinde.

Produsul bine ingrijit are o perioada de viata de 3 ani.

Pentru revanzarea produsului parcurgeti urmatoorii pasi :

- Inlocuiti toate bucatile de tapiserie cu unele noi.
- Rama caruciorului trebuie curatata si dezinfectata.
- Produsul trebuie verificat de un service autorizat (capitolul 24)
- Toate partile componente care prezinta urme de uzura ar trebui inlocuite cu componente noi.
- Doar produsele care trec prin pasii de mai sus pot fi revandute.

## 20. Service si inspectiile periodice

Pentru folosirea in siguranta a produsului acesta trebuie verificat periodic.

Pentru situatiile in care persoana care a cumparat caruciorul nu poate intreprinde aceste activitati singur, caruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producator, contracost.

Toate reparatiile se vor face in service-uri autorizate sau direct la producator.

Se vor folosi doar accesoriile originale ale caruciorului.

### Verficarile trebuie facute:

- **De fiecare data inainte de folosirea caruciorului:**
  - a. Verificati frana centrala – dupa activare ambele roti din spate ar trebui sa se blocheze.
  - b. Verificati ca toate accesoriile suplimentare sa fie bine atasate. Fiti atenti in special la : sistemul de atasare al scaunului la rama, la sistemul de atasare al rotilor, functionarea corecta a hamului, la mecanismul de blocare al inclinarii, atasarea corecta a suportului pentru picioare.
  - c. Verificati conditia cauciucurilor.
- **O data pe luna:**
  - d. Curatati caruciorul : Curatati toate componentele cu o carpa moale si ungeti cu un ulei usor partea de fier si aluminiu a caruciorului pentru a preveni coroziunea partilor.
  - e. Verificati toate sistemele de atasare – toate butoanele si suruburile.
- **O data la sase luni**



f. Verificati ca tapiseria sa fie curata si insepectati conditia generala a caruciorului.

### **21. Aruncarea caruciorului**

Aruncarea si reciclarea : Caruciorul folosit trebuie dus la un centrul de reciclare in conformitate cu legile din zona in care locuiti.

**22. Actul de conformitate potrivit legilor europene privind dispozitivele medicale**



Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Producătorul a emis o declarație de conformitate corespunzătoare pentru produs, care este disponibilă pe [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

## 23. Notite

**24. Service-uri autorizate**

POLAND  
MyWam Kupiec, Bartold, Angres sp. j.  
ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, PL  
tel: +48 32 733 11 31  
www.mywam.eu  
mywam@mywam.pl

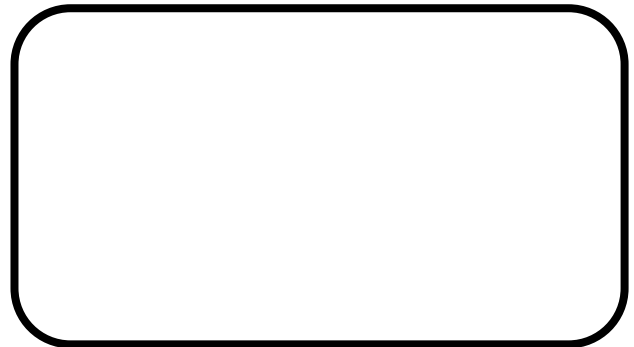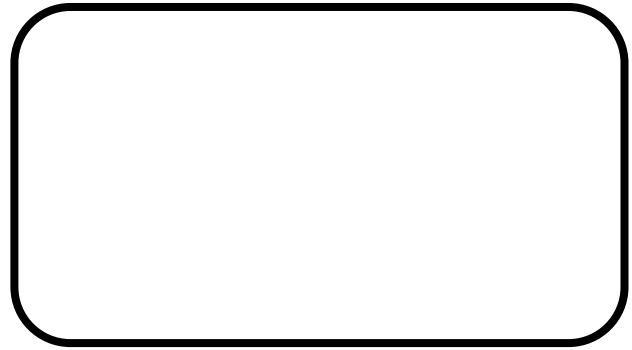

## 25. CARDUL DE GARANTIE

Serie si numar .....

Data achizitionarii: ..... - ..... - .....

Stampila si semnatura vanzatorului

### Conditii de garantie :

- Producatorul asigura cumparatorului o garantie de 24 de luni de la cumpararea caruciorului. Orice neplacere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis.
- Cumparatorul care are probleme cu caruciorul lui va trimite caruciorul bine ambalat spre reparare la vanzator sau producator.
- Orice defectiune survenita din folosirea neconforma a caruciorului nu se va repara in baza garantiei.
- Orice defectiune survenita din impachetarea incorecta a caruciorului nu se va repara pe baza garantiei.
- Pretul transportului va fi suportat de cumparator.
- Garantia va fi prelungita cu perioada in care caruciorul a fost reparat.
- Cumparatorul are dreptul la schimbarea caruciorului cu unul nou in caz ca, dupa reparare, acesta prezinta aceleasi probleme ca inainte.
- Caruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.
- Folosirea neconforma a caruciorului nu intra sub regulile garantiei.
- Facand orice modificare asupra caruciorului va veti anula garantia.
- Stricarea caruciorului prin : operarea gresita, ingrijirea gresita, depozitarea gresita etc, nu sunt acoperite de garantie.
- Producatorul avertizeaza asupra repararii caruciorului in service-uri neautorizate.
- Garantia valabila trebuie sa contina: Data cumpararii confirmata prin semnatura si stampila vanzatorului, tipul caruciorului si numarul de serie al acestuia.
- Garantia este valabila atata timp cat nu contine stersaturi sau corectari.
- Plangerile care nu intra sub garantie vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului civil.
- Toate plangerile legate de carucior trebuie adresate vanzatorului si/sau producatorului.