



Zdjęcie poglądowe



go.spider

chodzik ortopedyczny

Instrukcja obsługi i konserwacji

Edycja 4 / 2023-06-20

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

UWAGA! Użytkownik z niesprawnością widzenia, czytania lub niesprawnością poznawczą proszony jest o zgłoszenie się do Producenta.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obsługi i konserwacji zawiera podstawowe informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania chodzika ortopedycznego go.spider, w tym zasady bezpieczeństwa jego użytkowania, opis jego budowy, obsługi i regulacji, przygotowania chodzika ortopedycznego do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia chodzika.

Przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (asystentów dziecka - rodziców, opiekunów), które będą korzystały z chodzika. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących chodzik.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania chodzika ortopedycznego, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu i każdorazowo musi być dołączona do sprzedawanego produktu. Instrukcja w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z udziałem chodzika ortopedycznego go.spider, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.pl



Wersja Instrukcji obsługi i konserwacji: PL **Edycja 4** / 2023-06-20

MyWam Kupiec, Bartold, Angres sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji obsługi i konserwacji bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.

UWAGA! Zdjęcia zawarte w Instrukcji użytkowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

Spis treści

▪ Wprowadzenie	5
1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania chodzika ortopedycznego go.spider	5
2. Podstawowe informacje o chodziku ortopedycznym go.spider	5
▪ Bezpieczeństwo	6
3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa	6
4. Tabliczki	7
5. Oznaczenie symboli	7
▪ Produkt	8
6. Ogólna budowa chodzika ortopedycznego	8
7. Konfiguracja i użytkowanie – rama chodzika ortopedycznego	8
7.1. Mechanizm składania ramy	8
7.2. Rozkładanie ramy chodzika ortopedycznego	9
7.3. Składanie ramy chodzika	9
7.4. Blokada kierunku jazdy przednich kół	10
7.5. Spowalniacz koła tylnego	10
7.6. Blokada cofania	11
7.7. Regulacja wysokości górnej dostawki	11
7.8. Uprząż zabezpieczająca	12
7.9. Uchwyty do podtrzymywania	12
8. Wyposażenie dodatkowe	13
8.1. Rączka asekuracyjna	13
8.2. Podłokietniki	14
8.3. Podpory przeciwwywrotne	13
8.4. Zestaw pelot biodrowych	14
8.5. Siedzisko	14
8.6. Hamulce ręczne	15
9. Specyfikacja techniczna chodzika ortopedycznego go.spider	15
9.1. Skład surowcowy chodzika	15
10. Dostawa i narzędzia	15
11. Montaż i demontaż chodzika	16
12. Przygotowanie do użytkowania	16
13. Użytkowanie chodzika	17
13.1. Przenoszenie chodzika	17
13.2. Prawidłowa pozycja w chodziku ortopedycznym	17
13.3. Jazda chodzikiem ortopedycznym	17
13.4. Transport w samochodzie i w innych pojazdach	17
13.5. Czyszczenie i pielęgnacja	17
14. Przechowywanie chodzika	18
14.1. Przygotowanie chodzika do długotrwałego przechowywania	18
14.2. Zabezpieczenie antykorozyjne	18
15. Powtórne użycie	18
16. Serwis i przeglądy okresowe	18
17. Utylizacja	19

18.	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych	19
19.	Notatki	20
20.	Lista autoryzowanych punktów serwisowych.....	21
21.	Karta Gwarancyjna	22

■ Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu za zakup chodzika ortopedycznego go.spider. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty spełniały Wasze oczekiwania i najwyższe standardy. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami oraz śledzenia nas na naszej stronie internetowej www.mywam.eu oraz w mediach społecznościowych. Możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszych produktach.

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania chodzika ortopedycznego go.spider

go.spider to zaprojektowany z myślą o użytkownikach niepełnosprawnych chodzik ortopedyczny stanowiący specjalistyczny system terapeutyczny wspomagający pacjenta w reedukacji/nauce chodu. Umożliwia dziecku zdolnemu do poruszania nogami przemieszczanie się oraz ćwiczenie kończyn dolnych. Chodzik oparty jest na ramie wykonanej z elementów aluminiowych oraz stalowych. Wyrób wyposażony jest w szereg akcesoriów poprawiających funkcjonalność i komfort użytkowania, takich jak np.: rączka asekuracyjna, siedzisko, zestaw pelot biodrowych, podłokietniki, hamulce ręczne.

Chodzik ortopedyczny go.spider jest wyrobem medycznym klasy I, wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić i/lub stać.

Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

Wskazania kliniczne to m.in. rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych, przy osłabieniach kończyn dolnych z zaburzeniami równowagi, w przypadku kiedy dziecko nie jest w stanie poruszać się przy pomocy kul, itp.

Wyrób przewidziany jest dla użytkowników o wzroście z przedziału **od 100 do 135cm** i wadze **do 35 kg**.

Użytkownicy nie mogą korzystać z chodzika samodzielnie, a jedynie pod opieką opiekuna. Chodzik może być użytkowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Inne niż opisane stosowanie wyrobu jest zakazane. Chodzik musi być używany zgodnie z instrukcją użytkowania, wyłącznie przez osoby dorosłe opiekujące się użytkownikiem. Młodzież i dzieci jak również wszelkie inne osoby bez odpowiedniego przeszkolenia nie powinny używać wyrobu.

Przeciwwskazania:

Urazy kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na chodziku.

2. Podstawowe informacje o chodziku ortopedycznym go.spider

Chodzik ortopedyczny go.spider posiada wiele funkcji pozwalających na dopasowanie go do użytkownika, np:

- | | |
|---|------------------|
| • spowalniacz koła tylnego | (patrz pkt 7.5) |
| • blokadę kierunku jazdy kół przednich | (patrz pkt 7.4) |
| • blokadę cofania | (patrz pkt 7.6) |
| • regulację wysokości całej górnej dostawki | (patrz pkt 7.7) |
| • uchwyty do podtrzymywania | (patrz pkt 7.9) |
| • uprząż zabezpieczającą | (patrz pkt 7.8) |
| • podpory przeciwwywrotne | (patrz pkt 7.10) |

▪ Bezpieczeństwo

3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa

- Zabrania się użytkowania chodzika ortopedycznego w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
- **UWAGA!** Nie można odchyłać uchwytów na boki na zewnątrz chodzika – grozi utratą stabilności.
- **UWAGA!** Podczas użytkowania i obsługi chodzika ortopedycznego go.spider oraz podczas składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/opiekuna w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji należy ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.
- **UWAGA!** Przed każdorazowym użyciem chodzika należy wykonać rozpisane poniżej czynności, a w przypadku nieprawidłowości nie wolno używać chodzika. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą w celu otrzymania porady.
- **UWAGA!** Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy, należy upewnić się, czy po obu stronach jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wyrobu.
- **UWAGA!** Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika.

OSTRZEŻENIE!



- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w chodziku!
 - Nie chwytaj za uchwyty mokrymi i zabrudzonymi rękami – grozi upadkiem i poślizgnięciem.
 - Podczas chodzenia trzymaj obiema dłońmi za uchwyty.
 - Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
 - Nie przenosić chodzika z dzieckiem.
 - Nie noś ani nie wieszaj żadnych przedmiotów na chodziku (niebezpieczeństwo przechylenia).
 - Chodzik zapakowany jest w worek. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Nie nakładać na głowę. Niebezpieczeństwo uduszenia.
-
- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania chodzika jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.

4. Tabliczki


Tabliczka znamionowa



Tabliczka z kodem UDI



Tablica ostrzegawcza

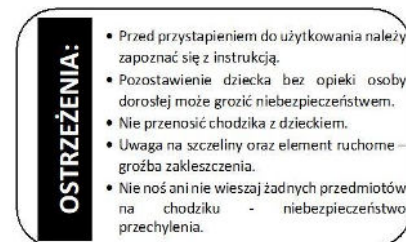

5. Oznaczenie symboli

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji	 OPIS "OSTRZEŻENIE!" i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.	
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji produktu		

Produkt

6. Ogólna budowa chodzika ortopedycznego

Chodzik ortopedyczny go.spider składa się z ramy i dostawki oraz wyposażenia dodatkowego, które należy dobrać według indywidualnych potrzeb użytkowników.

• Stalowa rama chodzika wraz z dostawką

Do podstawowych elementów ramy chodzika należą:

- | | |
|---|------------------|
| 1- Uchwyt do podtrzymywania | - patrz pkt 7.9 |
| 2- Dostawka górna | - patrz pkt 7.7 |
| 3- Regulacja wysokości dostawki górnej | - patrz pkt 7.7 |
| 4- Blokada cofania | - patrz pkt 7.6 |
| 5- Tylne koła, pełne | - patrz pkt 7.5 |
| 6- Spowalniacz koła tylnego | - patrz pkt 7.5 |
| 7- Przednie koła skrętne, pełne | - patrz pkt 7.4 |
| 8- Blokada kierunku jazdy kół przednich | - patrz pkt 7.4 |
| 9- Mechanizm składania ramy | - patrz pkt 7.1 |
| 10- Podpory przeciwwyrotne | - patrz pkt 7.10 |
| 11- Uprząż zabezpieczająca | - patrz pkt 7.8 |




• Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ✓ Rączka asekuracyjna | (patrz pkt 8.1) |
| ✓ Podłokietniki | (patrz pkt 8.2) |
| ✓ Zestaw pelot biodrowych | (patrz pkt 8.3) |
| ✓ Siedzisko | (patrz pkt 8.4) |
| ✓ Hamulce ręczne | (patrz pkt 8.5) |

7. Konfiguracja i użytkowanie – rama chodzika ortopedycznego

7.1. Mechanizm składania ramy

Mechanizm składania ramy znajduje się na zewnątrz ramy w jednym miejscu w jej lewej i prawej części (patrz rysunek).

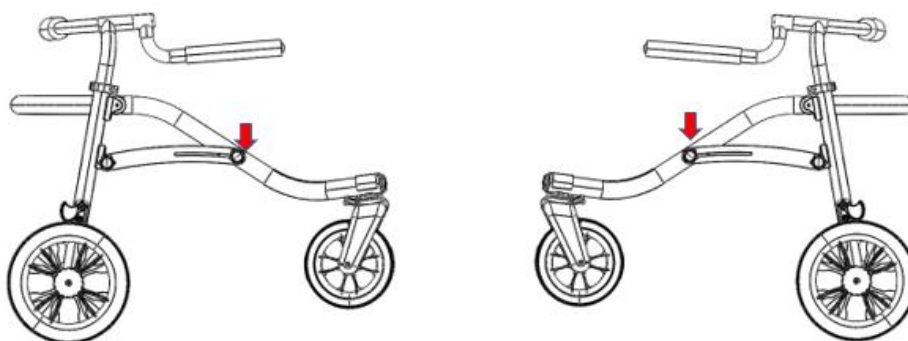

7.2. Rozkładanie ramy chodzika ortopedycznego

Przed rozkładaniem chodzika należy:


1. Poluzować plastikową nakrętkę (Rys. 1),
2. **Unieść rozpieracze ramy, tak aby śruba i nakrętka opuściły wcięcie, pozwoli to na swobodne rozłożenie ramy (Rys. obok),**



UWAGA! Pominięcie tego kroku, może skutkować wykrzywieniem śruby!


3. Rozłożyć ramę do pozycji użytkowej (Rys. 2),
4. Dokręcić plastikową nakrętkę (Rys. 2),
5. Zamontować dostawkę górną (Rys. 3).

UWAGA! Nie wolno przekraczać zakresu minimalnego i maksymalnego znajdującego się na dostawce górnej.

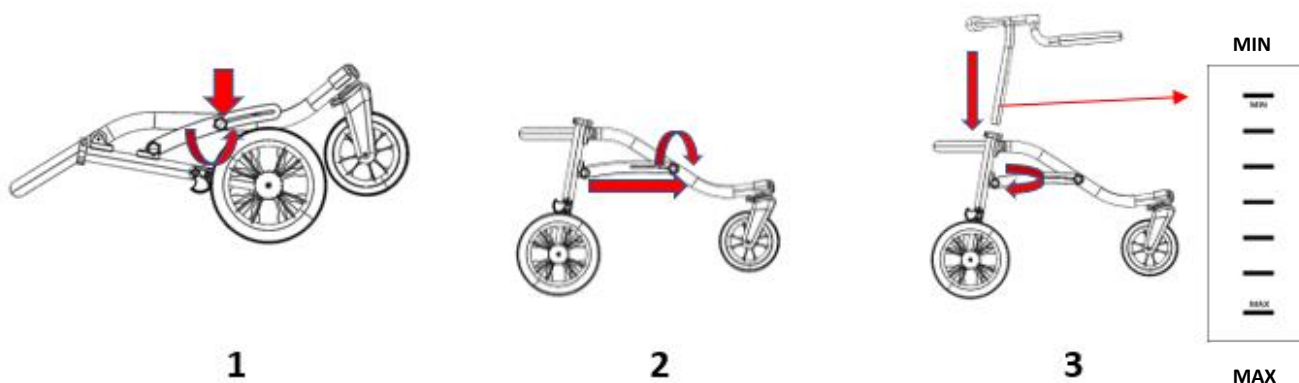

7.3. Składanie ramy chodzika

W celu złożenia (zamknięcia) ramy chodzika należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

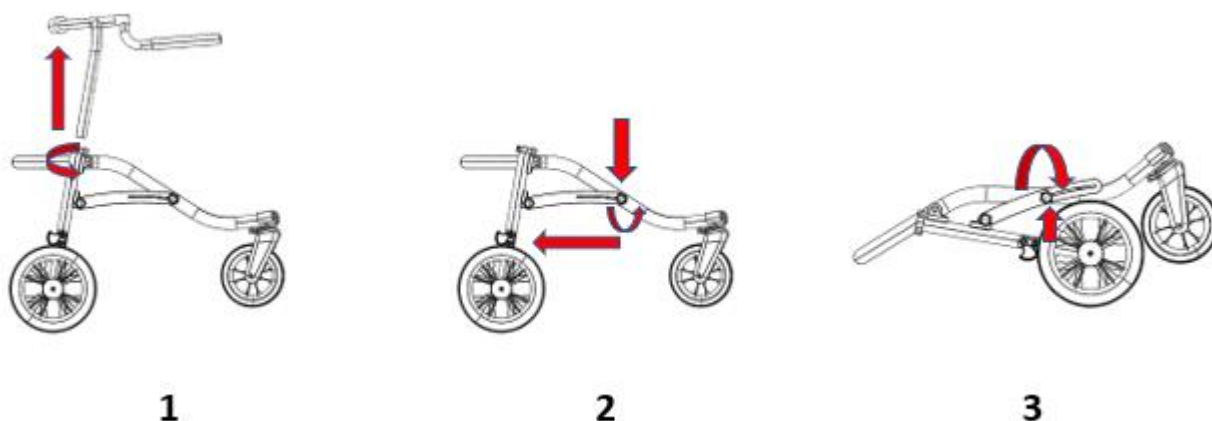

Po złożeniu chodzika naciśnij na koniec rozpieracza, tak aby śruba i nakrętka znalazły się we wcięciu, co zabezpieczy chodzik przed samoczynnym jego rozłożeniem, podczas przenoszenia. Następnie dokręć plastikową nakrętkę.



7.4. Blokada kierunku jazdy przednich kół

Oba koła przednie można ustawić do jazdy na wprost lub odblokować je do skręcania, co znacznie ułatwia manewrowanie chodzikiem.


Zaleca się wyłączenie blokady i umożliwienie skręcania przednich kół podczas prowadzenia chodzika po zupełnie gładkiej powierzchni. Włączenie i wyłączenie blokady przedstawiają poniższe rysunki.



7.5. Spowalniacz koła tylnego


Spowalniacz koła tylnego (Rys. 1), służy do spowalniania obu tylnych kół chodzika i znajduje się przy obu kołach tylnych.

W celu włączenia spowalniacza koła tylnego należy postępować zgodnie z rys. 2 (dokręcając zgodnie ze wskazówkami zegara zwiększamy siłę hamowania, oba koła powinny być ustawione na taki sam opór toczenia), a w celu wyłączenia zgodnie z rys. 3.

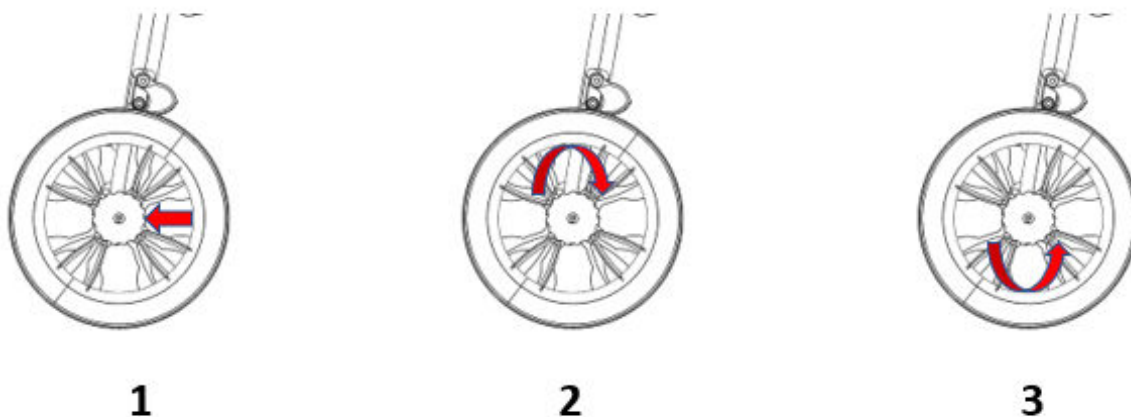


7.6. Blokada cofania

Chodzik posiada możliwość blokady cofania, która ma na celu blokowanie koła podczas ruchu chodzika w tył. Blokada cofania znajduje się na obu tylnych kołach. Aby włączyć blokadę należy postępować zgodnie z rys. 1. Miejsce, w którym znajduje się blokada przedstawia rys. 2.

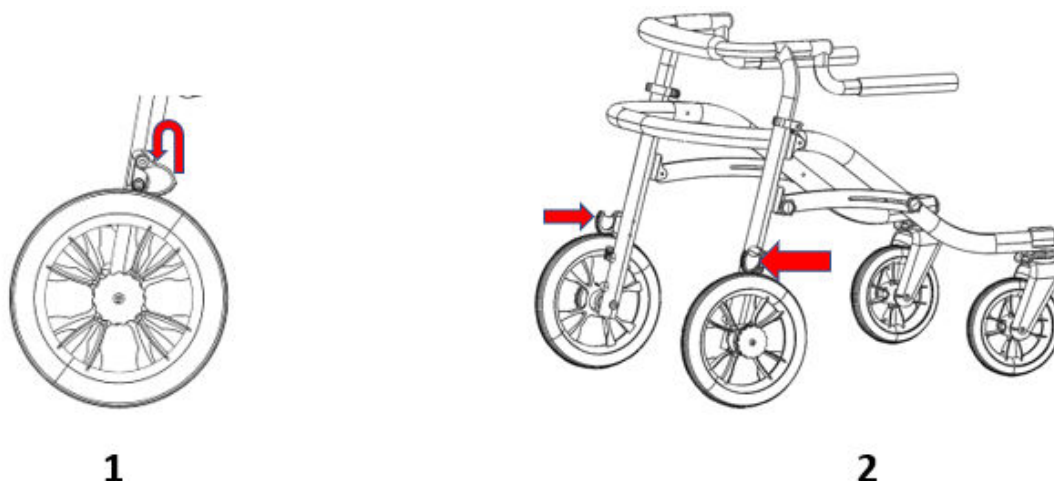

7.7. Regulacja wysokości górnej dostawki

Aby wyregulować wysokości górnej dostawki należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami.

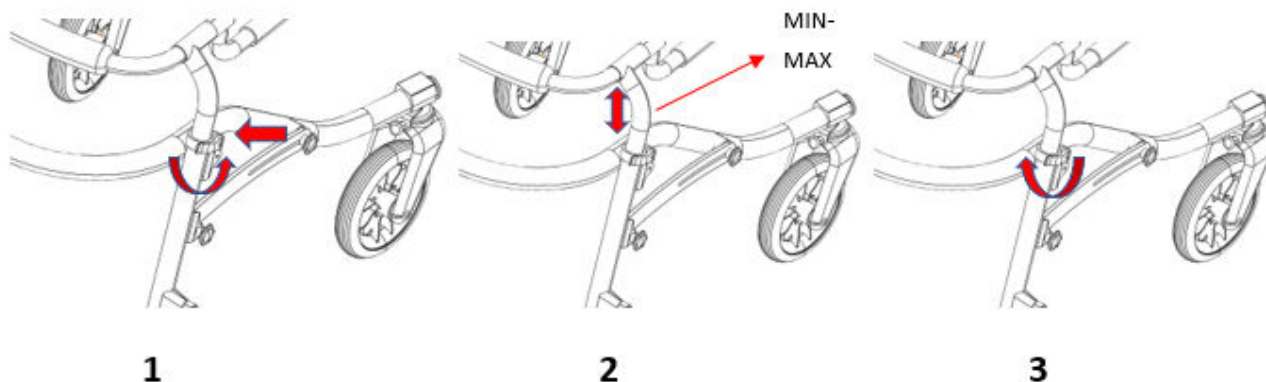

UWAGA! Nie wolno przekraczać zakresu minimalnego i maksymalnego znajdującego się na dostawce górnej.

7.8. Uprząż zabezpieczająca


Chodzik posiada możliwość zamontowania do dostawki górnej uprząży zabezpieczającej w celu odciążenia tułowia dziecka. Uprząż należy zamontować zgodnie z rys. 2.



Rys. 1




Rys. 3

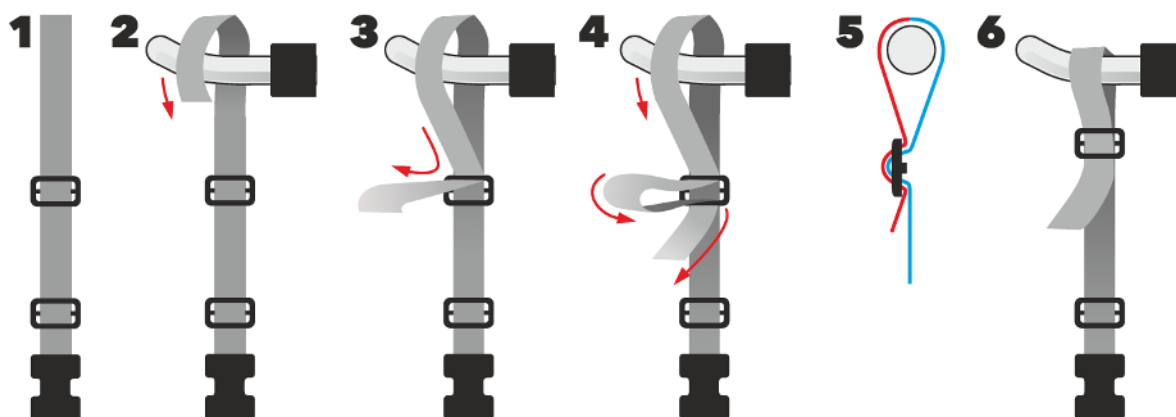


Rys. 2

7.9. Uchwyty do podtrzymywania

Chodzik jest wyposażony w uchwyty do podtrzymywania, z możliwością regulacji szerokości ich rozstawu oraz wysokości. Aby zmienić szerokość ich rozstawu uchwytu, należy postępować zgodnie z rysunkami. Aby zmienić wysokość uchwytów, należy zmienić wysokość górnej dostawki (patrz punkt 9.7). Czynność należy wykonać po obu stronach chodzika.

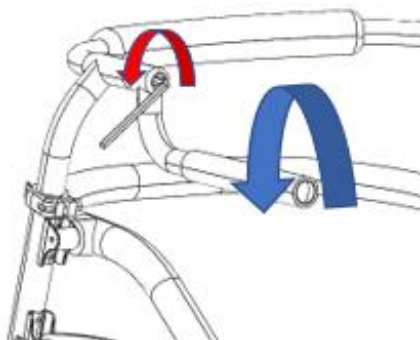


1

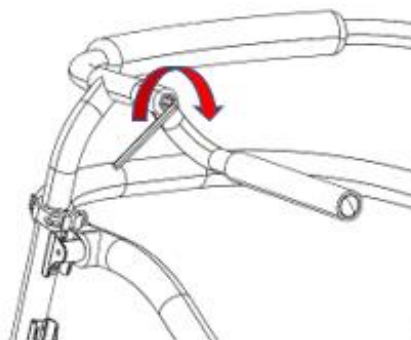


2

UWAGA! Nie można odchylać uchwytów na boki na zewnątrz – grozi utratą stabilności (rys. 3).

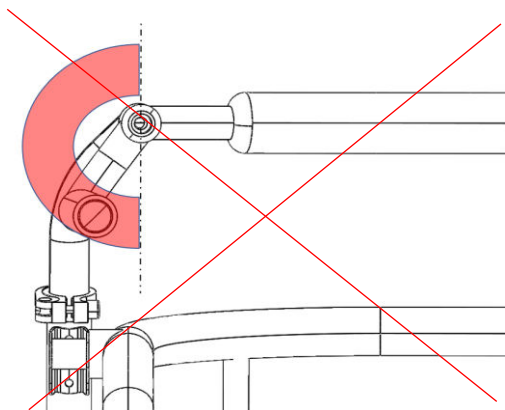

3 – Nieprawidłowa regulacja

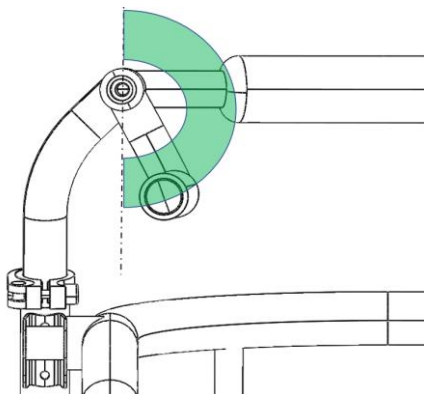

4 – Prawidłowa regulacja

7.10. Podpory przeciwwywrotne

Aby zamontować podpory przeciwwywrotne należy je przykręcić z obu stron w miejscu zaznaczonym na rysunku.



8. Wyposażenie dodatkowe

8.1. Rączka asekuracyjna

Aby zamontować rączkę asekuracyjną należy ją przykręcić z obu stron w miejscu zaznaczonym na rysunku 1.



Rys. 1

8.2. Podłokietniki

Aby zamontować podłokietniki należy odkręcić uchwyty do podtrzymywania (Rys. 1) stosując klucz typu imbus (w zestawie). Następnie w ich miejsce należy przykręcić podłokietniki za pomocą tego samego klucza zgodnie z rysunkiem 2.



Rys. 1



Rys. 2

8.3. Zestaw pelot biodrowych

Aby zamontować zestaw pelot biodrowych należy je przykręcić zgodnie z poniższym rysunkiem.



8.4. Siedzisko

Aby zamontować siedzisko należy je przykręcić zgodnie z rysunkiem – w miejscu montowania rozpieracza ramy. Następnie siedzisko należy zabezpieczyć wpiętymi taśmami.




8.5. Hamulce ręczne

Aby zamontować hamulce ręczne należy postępować zgodnie z rysunkiem.

1. Gryfy
2. Linka
3. Blokada cofania

Zamontować zaciski gryfu hamulcowego na obu uchwytych do podtrzymywania stycznie do nakładki przeciwpoślizgowej. Następnie wpiąć linkę w szybkozłączce umieszczone w blokadzie cofania, a następnie włączyć do gryfu hamulcowego. Wyregulować na śrubach regulacyjnych (gryf hamulcowy) równomierny naciąg obu kół.

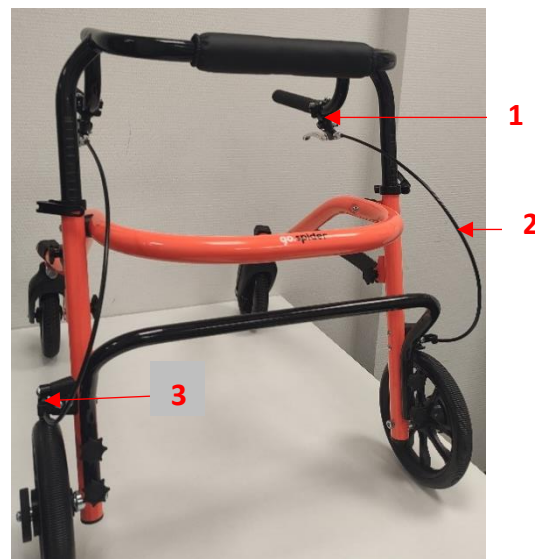

9. Specyfikacja techniczna chodzika ortopedycznego go.spider

długość chodzika	80 cm
szerokość chodzika	68 cm
wysokość chodzika	51-82 cm
masa całkowita	5,65 kg
długość chodzika złożonego do transportu	80 cm
szerokość chodzika złożonego do transportu	68 cm
wysokość chodzika złożonego do transportu	28 cm
max. waga pacjenta	35 kg
wzrost pacjenta	100-135 cm

UWAGI:

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg

9.1. Skład surowcowy chodzika

Stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne.

10. Dostawa i narzędzia

Chodzik ortopedyczny go.spider jest dostarczany w kartonie i wstępnie zmontowany. W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama chodzika oraz dostawka górna
- Wyposażenie dodatkowe (zgodne z zamówieniem),
- Instrukcja obsługi
- Klucz imbusowy 6 mm.

Przed użyciem:

- a. sprawdź czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (w przypadku uszkodzenia opakowania należy w obecności dostawcy rozpakować i sprawdzić czy żaden z elementów nie został uszkodzony),
- b. sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zawartość przesyłki (w przypadku braku jakiegoś z komponentów należy skontaktować się ze Sprzedawcą).

Wyposażenie chodzika ortopedycznego go.spider pozwala na dopasowanie go do osobistych wymagań użytkownika.

W tym celu zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania.

Do montażu i demontażu chodzika ortopedycznego go.spider nie są wymagane żadne narzędzia.

Do regulacji szerokości rozstawu uchwytów do podtrzymywania potrzebny jest klucz imbusowy.

11. Montaż i demontaż chodzika

- Montaż chodzika. Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany. Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) rozłożyć ramę chodzika – patrz pkt. 7.1
- b) zamontować i wyregulować dostawkę górną – patrz pkt 7.7
- c) zamontować wyposażenie dodatkowe – patrz pkt 8.

- Demontaż chodzika. W celu demontażu chodzika należy:

- a) zdemontować wyposażenie dodatkowe
- b) zdemontować dostawkę górną
- c) złożyć chodzik zamykając go blokadą transportową.

12. Przygotowanie do użytkowania


Przed rozpoczęciem użytkowania chodzika należy:

- Sprawdzić stan techniczny chodzika i wszystkich jego elementów, a jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą i/lub Producentem.
- Sprawdzić, czy chodzik został prawidłowo rozłożony oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Sprawdzić poprawność montażu wszystkich czterech kół i stan techniczny (brak uszkodzeń mechanicznych – złamania, pęknięcia).
- Sprawdzić sprawność działania spowalniacza koła tylnego poprzez załączenie spowalniacza koła tylnego (patrz pkt. 7.5).
- Włączyć blokadę kierunkową kół przednich.
- Sprawdzić sprawność działania blokady cofania poprzez załączenie blokady cofania (patrz pkt. 7.6).
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować chodzik do potrzeb dziecka, w tym ustawić odpowiednią wysokość i szerokość całej górnej dostawki. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
- Zadbać, żeby dziecko nie było umieszczone w chodziku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z uprzążą zabezpieczającą. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała dziecka oraz względy higieniczne dziecka.
- Zadbać, aby obuwiu dziecka było wygodne, dobrze stabilizujące staw skokowy.
- W przypadku wskazań do stosowania zaopatrzenia ortopedycznego (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwiu ortopedyczne) należy je założyć.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania chodzika.

13. Użytkowanie chodzika

13.1. Przenoszenie chodzika

Najlepszym sposobem przenoszenia chodzika ortopedycznego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół. Producent dopuszcza możliwość prowadzenia chodzika złożonego także z wykorzystaniem kół w pozycji wskazanej na rysunku.

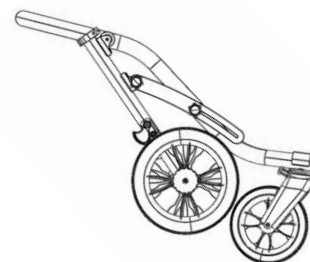

13.2. Prawidłowa pozycja w chodziku ortopedycznym

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał pozycję stojącą, zbliżoną jak najbardziej do pozycji chodu, z lekko ugiętymi kolanami i biodrami. Pozycja powinna umożliwiać swobodny dostęp do uchwytu podtrzymującego, a uprząż zabezpieczająca powinna być prawidłowo wyregulowana tak, aby nie ograniczała naturalnej mechaniki chodu, ale jednocześnie zabezpieczała przed upadkiem.

13.3. Jazda chodzikiem ortopedycznym

Podczas użytkowania chodzika ortopedycznego zawsze należy trzymać za uchwyty do podtrzymywania.

13.4. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

- W celu przewiezienia chodzika ortopedycznego go.spider w samochodzie należy zdemontować chodzik (patrz rozdział 11) i umieścić go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany chodzik nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę chodzika do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia chodzika ortopedycznego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z chodzikiem oraz o stosowne wymagania.

13.5. Czyszczenie i pielęgnacja

Uprząż zabezpieczającą można prać tylko ręcznie przy zachowaniu ostrożności, w temperaturze do 30°C. Nie wolno prać w pralce. Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Nie ścieraj - ścieranie spowoduje rozprzestrzenienie się plamy na większą powierzchnię i może zniekształcić teksturę tkaniny oraz zniszczyć jej powłokę.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w
suszarce bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

14. Przechowywanie chodzika

Chodzik należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

14.1. Przygotowanie chodzika do długotrwałego przechowywania

W celu przygotowania chodzika ortopedycznego go.spider do długotrwałego przechowywania, należy zabezpieczyć produkt i wykonać wszystkie czynności serwisowe przedstawione w rozdziale "Przeglądy okresowe" tak, jakby nastąpił ich czas.

Chodzik należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

14.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu uniknięcia uszkodzeń korozyjnych, chodzika nie powinno się użytkować ani zostawiać w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, najlepiej w temp 0-35°C.

Po zamoczeniu chodzika, należy wytrzeć wszystkie zamoczone elementy miękką szmatką do sucha oraz zabezpieczyć środkiem konserwującym. Nie dotyczy to elementów niewykonanych z metalu i aluminium, których zapewnienie czystości i konserwacji opisane jest szczegółowo w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja.

Regularne czyszczenie i smarowanie mechanizmów chodzika, gwarantuje długie i bezproblemowe jego użytkowanie.

15. Powtórne użycie

Po przeprowadzeniu kontroli technicznej (przez dedykowany serwis), wymianie zużytych elementów eksploatacyjnych produkt nadaje się do powtórnego użycia.

Produkt przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji zachowuje swoją jakość przez okres 3 lat i tyle wynosi spodziewany okres jego użytkowania.

16. Serwis i przeglądy okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z chodzika ortopedycznego go.spider, należy regularnie i dokładnie poddawać go przeglądom i czynnościom serwisowym w dedykowanych serwisach.

W sytuacji, gdy użytkownik chodzika nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać chodzik do specjalistycznego punktu serwisującego chodziki lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 20) lub bezpośrednio u Producenta.

W chodziku mogą być stosowane tylko oryginalne części zamienne, które są dostarczone lub zalecone przez Producenta.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem chodzika**

- Kontrola sprawności spowalniacza koła tylnego oraz blokady cofania - Po załączeniu spowalniacza koła tylnego, oba tylne koła chodzika powinny się obracać z wyczuwalnym oporem. Po załączeniu blokady cofania koło powinno się blokować podczas ruchu chodzika w tył.

- Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy chodzika i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie dostawki górnej, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej uchwytów podtrzymujących, prawidłowe zablokowanie ramy.
- Kontrola stanu kół - Należy sprawdzić czy koła nie posiadają uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania).
- Kontrola stałych elementów ramy - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.

Co każdy jeden miesiąc

- Czyszczenie chodzika -Należy oczyścić miękką szmatką wszelkie elementy ruchome, łożyska, mechanizmy regulacyjne, a następnie nasmarować je kilkoma kroplami smaru silikonowego. Zaleca się ostrożność, żeby nie ubrudzić własnego ubrania.
- Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów - Należy dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub i pokręteł znajdujących się w chodziku.

- **Co każde sześć miesięcy**

- Sprawdzenie czystości i ogólnego stanu chodzika - Nie należy dopuszczać do zaniedbania chodzika, zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja".

17. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zużyty chodzik należy oddać do punktu zajmującego się recyklingiem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

18. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu.

19. Notatki

20. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.euadres e-mail: mywam@mywam.pl

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

21. Karta Gwarancyjna

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

Warunki gwarancji

- Sprzedawca udziela nabywcy na zakupiony chodzik ortopedyczny gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- Nabywca reklamujący chodzik powinien go dostarczyć do Sprzedawcy w opakowaniu, czysty (wolny od plam, dodatkowego wyposażenia nie należącego do chodzika, wilgoci, sierści itp.) wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami chodzika.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki chodzika i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę chodzika i jego elementy.
- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy chodzika.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie chodzika niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych chodzika powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia chodzika powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania chodzika, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki chodzika powoduje utratę gwarancji.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny chodzika.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent chodzika prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją chodzika proszę kierować do Sprzedawcy.