

CE



Manual de uso

Suplemento del manual de uso de
algunas sillas de ruedas especiales
Edición 2 / 2023-05-18

Base in.basic para interiores

Equipamiento adicional de las sillas
Mewa/Mouse

Desplegar la base

Levante el marco plegado, active los frenos, luego despliegue los soportes transversales y apriételos con las perillas de estrella ubicadas en la base del marco (Fig. 1).



(Fig. 1)

En el mecanismo de montaje del asiento de la base in.basic, despliegue los soportes transversales y luego apriételos con las perillas de estrella al marco principal vertical (Fig. 2-5).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Ajuste la altura del manillar según sea necesario mediante los botones ubicados a los dos lados del manillar.



Fig. 6



Fig. 7

Mewa/Mouse

Montaje del asiento

El asiento debe instalarse en el sentido de la marcha o en el sentido contrario. Para instalar el asiento:

a) bloquee los frenos para mantener la base estable e inmovilizada. (Fig. 8-9).



Fig. 8 Correcto



Fig. 9 Incorrecto

b) coloque el asiento en los enganches de la base. El asiento está correctamente ajustado si se escucha un claro sonido de "clic" de ambos enganches del marco (Fig. 10-11).



Fig. 10



Fig. 11

Desmontaje del asiento.

Con el fin de retirar el asiento, presione hacia abajo, en dirección al suelo, los botones blancos a ambos lados de la base in.basic (Fig. 12), situados en la parte inferior de ambos enganches del marco. Luego deslice el asiento fuera de los enganches del marco. de él hacia arriba para retirarlo de la base.



Fig. 12

Ajuste de la altura

El mecanismo de ajuste de altura está ubicado dentro de los brazos derecho e izquierdo del marco. Para cambiar la altura del marco, desbloquee la abrazadera excéntrica ubicada a ambos lados de la base (las alas deben estar al lado derecho) (Fig. 13)



Fig. 13

A continuación ajuste la altura (la escala de altura está marcada con números 1-6) (Fig. 14-15).



Fig.14



Fig. 15

¡ATENCIÓN! ¡Antes de bloquear el mecanismo, asegúrese de que la altura en ambos lados sea idéntica!

Bloquee la abrazadera (las alas deben estar al lado izquierdo) (Fig. 16) y presione el marco hacia abajo para asegurarse de que el mecanismo de ajuste de altura esté correctamente bloqueado.



Fig. 16

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier ajuste de la base y sus componentes debe realizarse SIN EL NIÑO colocado en la base! ¡El incumplimiento de las advertencias anteriores puede resultar un grave peligro para el niño que lo usa!

Plegado de la base

Antes de plegar la base, active los frenos y coloque el manillar en la posición de salida (Fig. 17).



Fig. 17

Para plegar la base, retire el asiento y ajuste la altura de la base a la más baja (marcada con el número 1). A continuación, desatornille la perilla de estrella del soporte del asiento en la base y pliegue los soportes transversales (Fig. 18).



Fig. 18

Luego desenrosque la perilla de estrella ubicada en el marco de la base . A continuación, retire los tornillos y luego pliegue los soportes desbloqueados hacia dentro de la base mientras pliega lentamente el marco (Fig. 19). Después del plegado, vuelva a colocar los tornillos y cierre el marco con el bloqueo de transporte (Fig. 20).



Fig. 19

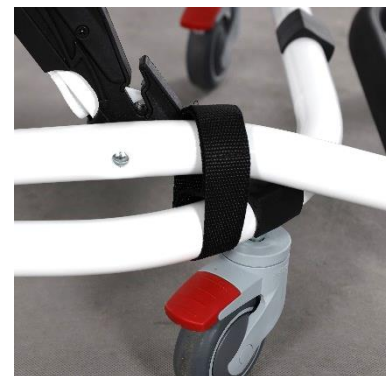


Fig. 20

¡ATENCIÓN! La base sirve para uso en interiores. La base se puede utilizar sobre una superficie plana (sin grandes escalones ni umbrales).

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier ajuste de la base y sus componentes debe realizarse SIN EL NIÑO colocado en la base! ¡El incumplimiento de las advertencias anteriores puede resultar un grave peligro para el niño que lo usa!

Placas

ADVERTENCIAS:

- Antes de usar, lea el manual de uso.
- Dejar al niño sin supervisión por parte de un adulto puede resultar peligro.
- ¡ATENCIÓN! La base sirve para uso en interiores. La base se puede utilizar sobre una superficie plana (sin grandes escalones ni umbrales).
- Tenga cuidado con los huecos y las piezas móviles: riesgo de atrapamiento.
- ¡ATENCIÓN! ¡Cualquier ajuste de la base y sus componentes debe realizarse SIN EL NIÑO colocado en la base! ¡El incumplimiento de las advertencias anteriores puede resultar un grave peligro para el niño que lo usa!

Nazwa wyrobu/ Nombre del producto:
BASE MÓVIL
 Model: IN.BASIC

MyWam®

SN PJ: XXXX max 40kg

RRRR-MM CE i MD

MyWam Kupiec Bartold Angres Spółka jawna
 ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, POLSKA
 +48 32 733 11 31, e-mail: mywam@mywam.pl,
 w w w . m y w a m . e u

Especificaciones técnicas de la base in.basic

Longitud de la base	95 cm
Ancho de la base	58 cm
Altura de la base	104 cm
Peso total	7,5 kg
Ajuste de la altura del asiento	53 - 71 cm
Longitud de la base plegada para transportar	107 cm
Ancho de la base plegada para transportar	57 cm
Altura de la base plegada para transportar	22 cm
Peso máximo del paciente Mouse / Mewa / Grizzly	30 / 40
Estatura del paciente Mouse / Mewa / Grizzly	80-110 cm / 90-125 cm / 85-140 cm