

CE



Руководство пользователя

Дополнение к инструкции по
эксплуатации некоторых специальных инвалидных колясок

Выпуск 1 / 2022-09-09

Мобильная база

Дополнительное оборудование для специальных инвалидных
колясок Mewa/Mouse/Grizzly

Раскладывание мобильной базы

Сложенную раму следует поднять, затем разложить поперечные опоры и затянуть звездообразными наконечниками, расположенными в основании рамы (рис. 1).



(Рис. 1)

В механизме рамы разверните поперечные опоры, а затем прикрутите их звездообразными наконечниками к вертикальной основной раме (рис. 2-5).



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Отрегулируйте высоту ручки базы в соответствии с индивидуальными потребностями опекуна.

Mewa/Mouse

Монтаж сиденья

Сиденье должно быть установлено лицом по ходу движения. Для установки сиденья:

- a) Заблокируйте тормоза, чтобы основание мобильной базы оставалось устойчивым и неподвижным (Рис. 6-7).



Рис. 6 Правильно



Рис. 7 Неправильно

- a) вставьте сиденье в защелки мобильной базы. Опустите сиденье до двух щелчков. Правильная установка сиденья подтверждается отчетливым щелчком, исходящим от обоих крючков основания сиденья (рис. 8-9).



Рис. 8



Рис. 9

Демонтаж сиденья

Для того, чтобы снять сиденье, нажмите вниз к полу по обеим сторонам основания белые кнопки (рис. 10), расположенные в нижней части обоих крючков рамы. Затем снимите сиденье с крючков рамы.



Рис. 10

Grizzly

Сиденье должно быть установлено лицом по ходу движения.

Для крепления сиденья к мобильной базе, выполните следующие действия в указанном порядке:

а) заблокируйте тормоза так, чтобы база была устойчивой и зафиксированной (рис. 11-12).



Рис. 11 Правильно

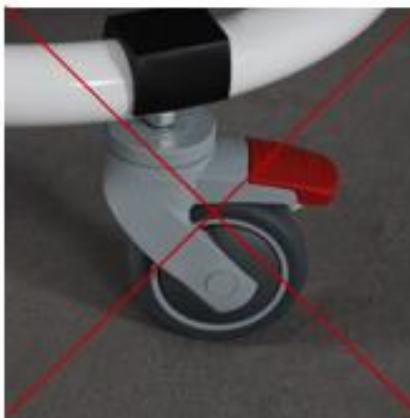


Рис. 12 Неправильно

б) наденьте адаптер для фиксации сиденья комнатной базы. Правильная установка адаптера подтверждается отчетливым щелчком, исходящим от обоих крючков механизма крепления сиденья (рис. 13-14).



Рис. 13



Рис. 14

в) убедитесь, чтобы механизм крепления сиденья находился в незапертом положении.

г) поместить оба ЗАДНИХ крепления сидений на первый крючок адаптера мобильной базы (рис.15).

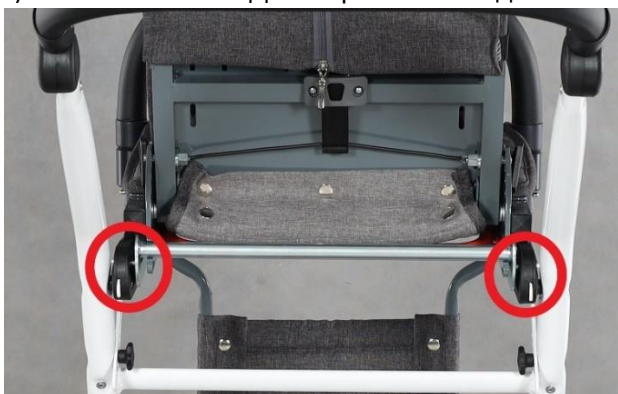


Рис. 15

д) наденьте оба ПЕРЕДНИХ крепления сидений на другой крючок адаптера мобильной базы.

е) прижмите обе ПЕРЕДНИЕ застежки сиденья ко второму крючку адаптера до двух щелчков. Правильность установки сиденья подтверждается отчетливым щелчком, исходящим от двух замыкающих замков механизма крепления сиденья к адаптеру основания (рис. 16).



Рис. 16

Демонтаж сиденья

Для снятия сиденья выполните следующие действия в указанном порядке:

а) задействуйте тормоз, чтобы база оставалась стабильной и неподвижной.

б) потяните поперечную ручку механизма крепления сиденья назад, что приведет к открытию замка механизма крепления сиденья (рис. 17).



Рис. 17

в) затем продолжите тянуть боковую ручку назад и вверх, в результате чего блокировка механизма крепления сиденья останавливается в открытом положении.

г) снять оба ПЕРЕДНИХ крепления с крючков адаптера, подняв переднюю часть сиденья вверх от пола (рис. 18).



Рис. 18

д) затем снять оба ЗАДНИХ креплений сиденья с крючков адаптера, подняв заднюю часть сиденья прямо вперед к передней части сиденья и вверх от пола.

Регулировка высоты

Механизм регулировки высоты расположен в центре рамы. Чтобы изменить высоту рамы, откройте эксцентрик с обеих сторон основания комнаты (крылья должны быть справа) (рис. 19),



Рис. 19

затем отрегулируйте высоту (шкала высоты описывается цифрами 1-6) (Рис. 20-21).



Рис.20



Рис. 21

ВНИМАНИЕ! Перед блокировкой механизма убедитесь, что высота с обеих сторон одинаковая!

Заблокируйте зажим (крылья должны быть слева) (рис. 22) и придавите раму вниз, чтобы убедиться, что механизм регулировки высоты правильно заблокирован.



Рис. 22

ВНИМАНИЕ! Любые корректировки мобильной базы и ее компонентов должны производиться БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА в базу! Несоблюдение вышеуказанных предупреждений может привести к серьезной опасности для ребенка!

Складывание мобильной базы

Заприте тормоза и установите ручку базы в положение "0" перед её складыванием.

Чтобы сложить мобильную базу, необходимо снять сиденье и установить высоту мобильной базы на самую низкую (1). Затем открутить звездообразные наконечники креплений сидений в основании рамы и спрятать боковые опоры в креплениях (рис. 23).



Рис. 23

Затем необходимо открутить звездообразные наконечники, расположенные на раме. Далее снимите запорный болт и сложите отстегнутые опоры внутрь, медленно складывая раму (рис. 24). После сборки переустановите запорный болт и зафиксируйте раму с помощью транспортного замка (рис. 25).



Рис. 24

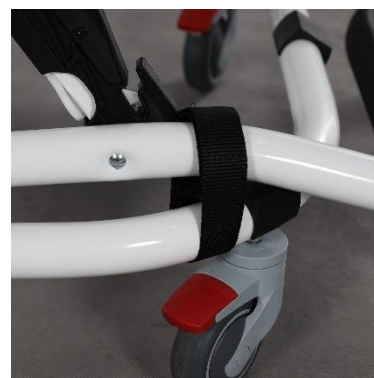


Рис. 25

ВНИМАНИЕ! Мобильная база предназначена для домашнего использования. Мобильную базу можно использовать на плоской поверхности (без больших подъемов, порогов).

ВНИМАНИЕ! Любые корректировки мобильной базы и ее компонентов должны производиться **БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА** в базу! Несоблюдение вышеуказанных предупреждений может привести к серьезной опасности для ребенка!

Таблички

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед началом использования необходимо ознакомиться с руководством пользователя.
- Небезопасно оставлять ребенка в базе без присмотра взрослого.
- Внимание! Мобильная база предназначена для домашнего использования. Мобильная база может быть использована на плоской поверхности (без высоких подъемов и порогов).
- Внимание на слоты и движущие части- угроза травмирования.
- **ВНИМАНИЕ!** Все регулировки мобильно базы и её компонентов должны быть произведены **БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА** в ней! Несоблюдение вышеуказанных предупреждений может привести к серьезной опасности для ребенка!

