



Zdjęcie poglądowe



Instrukcja obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi
wybranych wózków inwalidzkich specjalnych
Edycja 5 / 2023-12-05

Podstawa pokojowa in.basic

Wypożyczenie dodatkowe dla wózków inwalidzkich
specjalnych Mewa/Mouse

**Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania
lub etykietą.**

Rozkładanie podstawy pokojowej

Podnieść, włączyć hamulce, rozłożyć podpory poprzeczne i dokręcić je pokrętkami gwiazdowymi znajdującymi się u podstawy ramy (Zdj. 1).



Zdj. 1

Rozłóż podpory poprzeczne i dokręć pokrętkami gwiazdowymi do ramy głównej pionowej (Zdj. 2-5).



Zdj. 2



Zdj. 3



Zdj. 4



Zdj. 5

Wysokość rączki podstawy dopasuj według indywidualnych potrzeb opiekuna za pomocą przycisków po obu stronach rączki (Zdj. 6-7).



Zdj. 6



Zdj. 7

Mewa/Mouse**Montaż siedziska:**

Siedzisko zamontuj przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

a) Zablokuj hamulce (Zdj. 8-9).



Zdj. 8 Dobrze



Zdj. 9 Źle

b) nałóż siedzisko w zaczepy podstawy pokojowej aż do kliknięcia (Zdj. 10-11).



Zdj. 10



Zdj. 11

Demontaż siedziska:

Wciśnij w dół białe przyciski (Zdj. 12) i wysuń siedzisko z zaczepów ramy.



Zdj. 12


Regulacja wysokości:

a) Odblokuj zacisk mimośrodowy (skrzydełka powinny znajdować się po prawej stronie) (Zdj. 13),



Zdj. 13

- b) dopasuj wysokość (skala wysokości została opisana cyframi 1-6) (Zdj. 14-15).

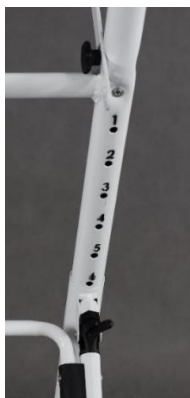

Zdj. 14



Zdj. 15

UWAGA! Przed zablokowaniem mechanizmu należy upewnić się, że wysokość po obu stronach jest identyczna!

- c) Zablokuj zacisk (skrzydełka powinny znajdować się po lewej stronie) (Zdj. 16) i dociśnij ramę, aby upewnić się, że mechanizm regulacji wysokości został prawidłowo zablokowany.



Zdj. 16

UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

Składanie podstawy pokojowej:

- a) Zablokuj hamulce i ustaw rączkę podstawy w pozycji wyjściowej (Zdj. 17).



Zdj. 17

- b) Wypnij siedzisko i ustaw wysokość podstawy pokojowej na najniższą (oznaczoną cyfrą 1). Odkręć pokrętło gwiazdowe mocowania siedziska i schowaj podpory poprzeczne w mocowaniu (Zdj. 18).



Zdj. 18

- c) Odkręć pokrętło gwiazdowe znajdujące się przy ramie podstawy pokojowej. Wyjmij śruby i złóż odbezpieczone podpory do wewnątrz podstawy składając przy tym powoli ramę (Zdj. 19). Po złożeniu zamontuj z powrotem śruby i zablokuj ramę blokadą transportową (Zdj. 20).



Zdj. 19



Zdj. 20

UWAGA! Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).

UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać **BEZ DZIECKA** umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

Tabliczki

OSTRZEŻENIA:

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Pozostawienie dziecka bez opieki osoby dorosłej może grozić niebezpieczeństwem.
- UWAGA! Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).
- Uwaga na szczeliny oraz elementy ruchome – groźba zakleszczenia.
- UWAGA! Wszelkie regulacje podstawy pokojowej i jego elementów należy wykonywać **BEZ DZIECKA** umieszczonego w podstawie pokojowej! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

		Nazwa / Name: Podstawa pokojowa / Indoor base Model: in.basic	
SN PJ xxxx	 max 40 kg		
 RRRR-MM	 		
 MyWam sp. z o.o. ul. Lwowska 34, 41-500 Chorzów, POLSKA +48 32 733 11 31, e-mail: mywam@mywam.eu w w w . m y w a m . e u			

Specyfikacja techniczna podstawy pokojowej in.basic

długość podstawy pokojowej	95 cm
szerokość podstawy pokojowej	58 cm
wysokość podstawy pokojowej	104 cm
masa całkowita	7,5 kg
regulacja wysokości siedziska	53 - 71 cm
długość podstawy złożonej do transportu	107 cm
szerokość podstawy złożonej do transportu	57 cm
wysokość podstawy złożonej do transportu	22 cm
max. waga pacjenta Mouse / Mewa	30 / 40 kg
wzrost pacjenta Mouse / Mewa	80-110 cm / 90-125 cm