

PRODUCENT / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Sp. z o.o.

CE



delfi

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



Instrukcja używania

Edycja 3 / 2025-08-06

Leżak kąpielowy Delfi

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja używania przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (asystentów - rodziców, opiekunów), które będą korzystać z leżaka kąpielowego w trakcie codziennych czynności higienicznych. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących leżaki kąpielowe.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania leżaka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z leżakiem kąpielowym Delfi, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp. z o.o., ul. Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.eu



Wersja Instrukcji używania: **PL Edycja 3 / 2025-08-06**

MyWam sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji używania bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji. Instrukcja w wersji elektronicznej będzie dostępna na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! Zdjęcia zawarte w Instrukcji używania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

MyWam sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych klasy I. System certyfikowany przez LL-C (Certification).



ISO 13485
LL-C (Certification)



SPIS TREŚCI

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI.....	2
1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA	4
2. TABLICZKI	4
3. OZNACZENIE SYMBOLI	5
4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	5
5. OGÓLNA BUDOWA LEŻAKA KĄPIELOWEGO	6
6. FUNKCJE LEŻAKA	7
6.1. Kąt odchylenia zagłówka.....	7
6.2. Kąt odchylenia oparcia.....	7
6.3. Kąt odchylenia podnóżka	8
6.4. Regulacja głębokości siedziska.....	9
6.5. Regulacja nóg	9
6.6. Peloty zagłówka	10
6.7. Pas biodrowy.....	10
6.8. Pasy stabilizujące nogi.....	11
6.9. Tapicerka	11
7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE	12
7.1. Peloty biodrowe	12
7.2. Pas stabilizujący	13
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LEŻAKA KĄPIELOWEGO DELFI.....	14
8.1. Skład surowcowy leżaka.....	14
9. DOSTAWA I NARZĘDZIA	14
10. MONTAŻ I DEMONTAŻ LEŻAKA.....	15
11. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA.....	15
12. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA	15
13. PRZECHOWYWANIE LEŻAKA	16
14. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE	16
15. UTYLIZACJA.....	17
16. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH.....	17
17. LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH	18
18. KARTA GWARANCYJNA	19
19. NOTATKI	20

1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Leżak kąpielowy Delfi jest wyrobem medycznym klasy I. Przeznaczony jest do wykonywania czynności higienicznych i kąpielowych, a także może być wykorzystywany w celach rekreacyjnych, w warunkach domowych lub plenerowych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ponadto leżak gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika oraz jego odpowiednią, komfortową pozycję.

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowa - rdzeniowa, dystrofie, niedowłady, uszkodzenia kończyn itp.

Wyrób przewidziany jest dla użytkowników:

- rozmiar S – o maksymalnym wzroście do **130cm** i wadze do **30 kg**.
- rozmiar M – o maksymalnym wzroście do **150cm** i wadze do **50 kg**.
- rozmiar L – o maksymalnym wzroście do **180cm** i wadze do **70 kg**.

Użytkownicy nie mogą korzystać z leżaka samodzielnie, a jedynie z pomocą opiekuna. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

Przeciwwskazania:


Nieprawidłowe ułożenie i długotrwałe utrzymywanie osoby w jednej pozycji może nieść ze sobą negatywne skutki.

2. TABLICZKI

Tabliczka znamionowa



Tablica ostrzegawcza

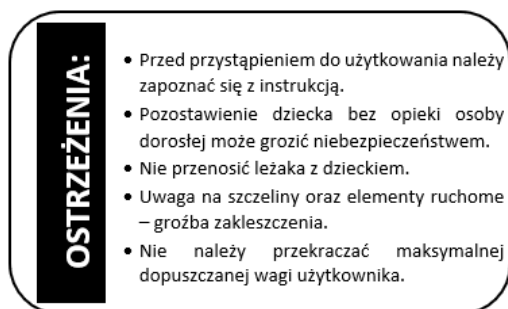

3. OZNACZENIE SYMBOLI

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją używania produktu		

4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zabrania się użytkowania wyrobu w sposób, do którego wyrób nie jest przeznaczony.
- Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją.
- **UWAGA!** Zabrania się dokonywania regulacji w trakcie, gdy na wyrobie znajduje się użytkownik, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.
- **UWAGA!** Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika.
- **UWAGA!** Zabrania się dokonywania regulacji wyrobu jeżeli wyrób jest zamoczony.
- **UWAGA!** Należy zachować otwarty odpływ podczas używania wyrobu w wannie, aby nie zbierała się woda. Stwarza to ryzyko dla użytkownika oraz poprawności działania wyrobu.
- **UWAGA!** Powierzchnia, na której będzie stawiany leżak musi być równa i stabilna.

OSTRZEŻENIE!



- Nigdy nie pozostawiaj użytkownika bez opieki!
- Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
- Nie przenosić leżaka kąpielowego z użytkownikiem.
- Leżak kąpielowy zapakowany jest w worek. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.

- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania leżaka, jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą w celu otrzymania porady.

5. OGÓLNA BUDOWA LEŻAKA KĄPIELOWEGO

Wypożażenie podstawowe



- 1- Peloty zagł wka
- 2- Pas biodrowy
- 3- Pasy stabilizuj ce nogi
- 4- Perforowana tapicerka
- 5- Regulacja k ta odchylenia podn  zka



- 6- Regulacja k ta odchylenia zagł wka
- 7- Stela 
- 8- Regulacja gł bokości siedziska
- 9- Regulacja k ta odchylenia oparcia
- 10- Regulacja k ta n g

Wypożażenie dodatkowe




- 1- Peloty biodrowe
- 2- Pas stabilizuj cy




6. FUNKCJE LEŻAKA

6.1. Kąt odchylenia zagłówka

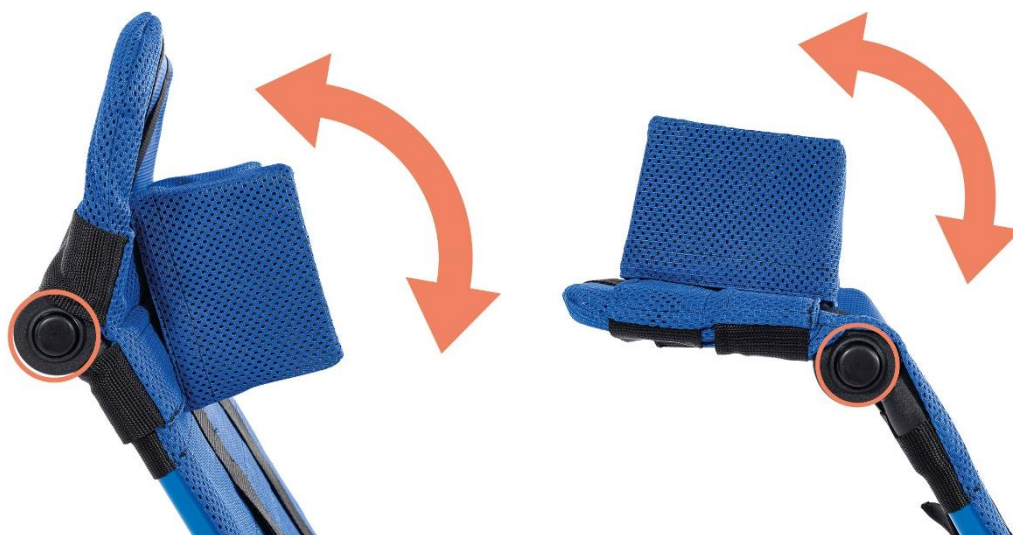

Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt odchylenia zagłówka.

6.2. Kąt odchylenia oparcia

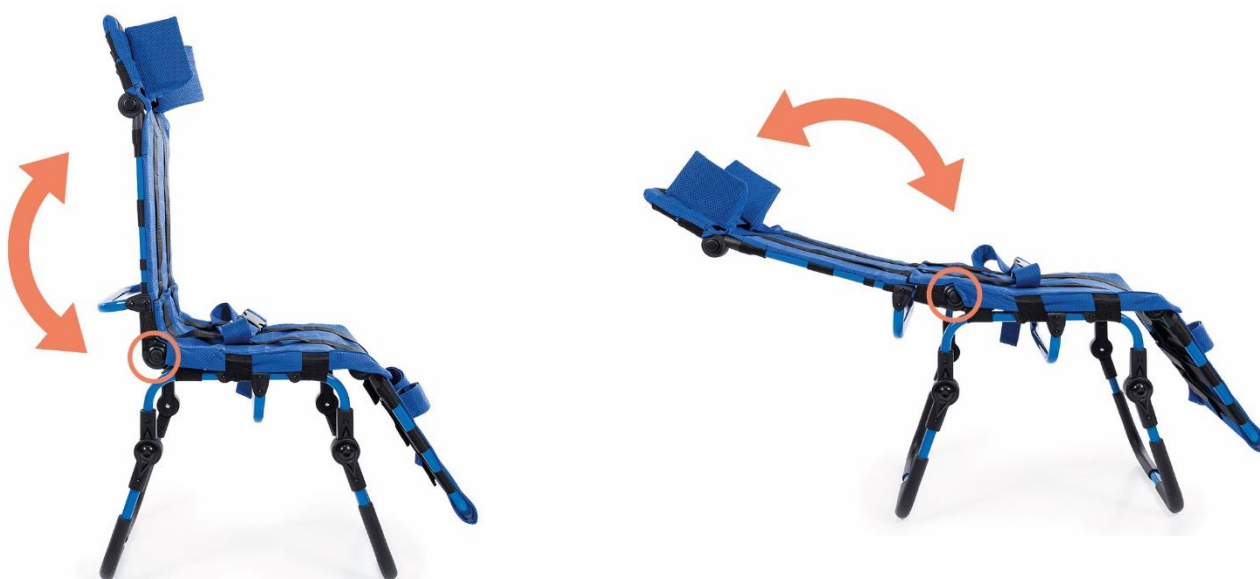

Mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia



Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt odchylenia oparcia.

6.3. Kąt odchylenia podnóżka



Mechanizm regulacji kąta odchylenia podnóżka



Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt odchylenia podnóżka.

6.4. Regulacja głębokości siedziska



Regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby po obu stronach leżaka.

6.5. Regulacja nóg



6.6. Peloty zagłówka



Montaż pelot za pomocą pasów z rzepami.



6.7. Pas biodrowy



Przeciśnij pas przez otwory znajdujące się na czarnych pasach biegnących wzdłuż tapicerki.

6.8. Pasy stabilizujące nogi



Przeciągnij pasy przez otwory znajdujące się na czarnych pasach biegnących wzdłuż tapicerki.

6.9. Tapicerka

Tapicerka oparcia



Montaż tapicerki za pomocą pasów z rzepami.

Tapicerka siedziska



Podnóżek



Siedzisko

7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

7.1. Peloty biodrowe





Montaż pelot za pomocą pasów z rzepami.

7.2. Pas stabilizujący



Przecignij pas przez otwory znajdujące się na czarnych pasach biegnących wzdłuż tapicerki.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LEŻAKA KĄPIELOWEGO DELFI

Parametr	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L
długość leżaka	138 – 142 cm	157 – 161 cm	174 – 182 cm
szerokość leżaka	39 cm	44 cm	49 cm
masa całkowita	5,4 kg	5,8 kg	6,7 kg
głębokość siedziska	38 – 42 cm	38 – 42 cm	40 – 50 cm
szerokość siedziska	39 cm	44 cm	49 cm
wysokość oparcia	45 cm	51 cm	56 cm
wysokość podparcia głowy	16 cm	20 cm	25 cm
długość podnóżka	37 cm	47 cm	51 cm
wysokość siedziska od podłoża	23 - 44 cm	23 – 44 cm	23 – 44 cm
długość leżaka po złożeniu	83 cm	91 cm	105 cm
szerokość leżaka po złożeniu	39 cm	44 cm	49 cm
wysokość leżaka po złożeniu	37 cm	37 cm	40 cm
maksymalna waga pacjenta	30 kg	50 kg	70 kg
orientacyjny wzrost użytkownika	130 cm	150 cm	180 cm
kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°
kąt pochylenia podnóżka (względem siedziska)	0° - -70°	0° - -60°	0° - -55°
sugerowany kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia)	30° - -30°	30° - -30°	30° - -30°

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1°.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych.

8.1. Skład surowcowy leżaka

Aluminium, stal cynkowana, stal nierdzewna, tkanina 100% poliester oraz tworzywo sztuczne (PP, PU).

9. DOSTAWA I NARZĘDZIA

W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Leżak z tapicerką, peloty zagłówka, pas biodrowy, pasy stabilizujące nogi,
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem,
- Instrukcja używania wraz z kartą gwarancyjną.

Przed użyciem:

- a. sprawdź czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (w przypadku uszkodzenia opakowania należy w obecności dostawcy rozpakować i sprawdzić czy żaden z elementów nie został uszkodzony),
- b. sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zawartość przesyłki (w przypadku braku jakiegoś z komponentów należy skontaktować się ze Sprzedawcą).

Zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania.

Do montażu i demontażu leżaka kąpielowego Delfi nie są wymagane żadne narzędzia.

10. MONTAŻ I DEMONTAŻ LEŻAKA

• **Montaż leżaka.** Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany. Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- rozłożyć leżak regulując parametry:
 - ustawić kąt pochylenia oparcia,
 - ustawić kąt pochylenia podparcia głowy,
 - ustawić głębokość siedziska,
 - wyregulować peloty zagłówka,
 - wyregulować pas biodrowy,
 - wyregulować pasy stabilizujące nogi,
- zamontować odpowiednie wyposażenie dodatkowe oraz wyregulować parametry, przykładowo:
 - wyregulować peloty biodrowe,
 - wyregulować pas stabilizujący.
- **Demontaż leżaka:**
 - zdemontować wyposażenie dodatkowe,
 - zdemontować peloty zagłówka,
 - złożyć leżak.

11. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- Sprawdzić, czy stelaż leżaka został prawidłowo rozłożony.
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować wyrób do potrzeb użytkownika, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska, odpowiednie pochylenie oparcia na plecy. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
- Zabezpieczyć użytkownika wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: peloty zagłówka, pas biodrowy oraz pasy stabilizujące nogi, pas stabilizujący, peloty biodrowe. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika przed wypadnięciem i wysunięciem się z leżaka. Upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla użytkownika odpowiednie i bezpieczne.

12. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Tapicerkę można prać tylko ręcznie przy zachowaniu ostrożności, w temperaturze do 40°C.

Nie wolno prać w pralce. Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wyrobu.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku stosowania detergentów dedykowanych do tego typu materiału – postępować zgodnie z instrukcją stosowanego środka.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać

Nie suszyć w suszarce
bębnowejSuszyć w pozycji
poziomej

Nie prasować

UWAGA! Zaleca się, aby po zakończeniu kąpieli nie odkładać mokrego leżaka do zamkniętych opakowań lub pomieszczeń, a pozostawić go do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym pomieszczeniu.

UWAGA! Zaleca się, aby po kontakcie leżaka z wodą morską dokładnie przepłukać konstrukcję czystą wodą. Tapicerkę zaleca się zdjąć i wyprać zgodnie z instrukcją prania.

13. PRZECHOWYWANIE LEŻAKA

Wyrób należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku przechowywania długotrwałego należy dodatkowo wykonać czynności opisane w pkt. 14 „co każdy jeden miesiąc”.

14. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wyrobu, należy regularnie i dokładnie poddawać go przeglądom i czynnościom serwisowym w dedykowanych serwisach.

W sytuacji, gdy użytkownik nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wyrób do specjalistycznego punktu serwisującego leżaki kąpielowe lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 17) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy leżaków wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

W wyrobie mogą być stosowane tylko oryginalne części zamienne, które są dostarczone lub zalecone przez Producenta.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem**
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy leżaka i jego elementy ruchome.
 - Kontrola stałych elementów ramy i tapicerkę - Należy wzrokowo skontrolować stan tapicerki oraz profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- **Co każdy jeden miesiąc**
 - Czyszczenie leżaka - Należy oczyścić miękką szmatką wszelkie elementy ruchome, mechanizmy regulacyjne.

- Kontrola wszystkich połączeń pod kątem luzów - Należy dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub znajdujących się w leżaku.

15. UTYLIZACJA

Utylizacja i recykling: zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

16. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu

17. LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH

POLSKA

MyWam sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.eu

18. KARTA GWARANCYJNA

Seria i numer:.....

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis Sprzedawcy:

.....
.....
.....

Warunki gwarancji

- Producent (Gwarant) udziela Kupującemu na zakupiony leżak kąpielowy gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- Kupujący reklamujący leżak kąpielowy powinien dostarczyć go do Sprzedawcy w opakowaniu, **czysty (wolny od plam, dodatkowego wyposażenia nienależącego do leżaka, wilgoci, sierści itp.)** wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami leżaka.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki leżaka kąpielowego i jego elementów **nie podlegają naprawom gwarancyjnym.**
- Reklamujący (Kupujący) nie może żądać od Producenta naprawienia szkody w przypadku uszkodzenia przesyłki, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę leżaka i jego elementów.
- Okres gwarancji w przypadku uznania reklamacji wydłuża się o czas naprawy leżaka kąpielowego, który liczony jest od momentu przekazania leżaka Sprzedawcy w ramach gwarancji do dnia, w którym leżak był gotowy do odbioru.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik leżaka we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie leżaka kąpielowego niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z instrukcją używania lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych leżaka powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia leżaka kąpielowego powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania leżaka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki leżaka powoduje utratę gwarancji.
- **Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny leżaka.**
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent leżaka kąpielowego prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- Producent określa przewidywany czas użytkowania wyrobu na 4 lata. Dalsze użytkowanie po upływie tego okresu jest możliwe, natomiast biorąc pod uwagę dbałość o bezpieczeństwo i komfort użytkowania rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu technicznego przez producenta lub autoryzowany serwis. Usługa przeglądu jest odpłatna i obejmuje ocenę stanu technicznego urządzenia, weryfikację bezpieczeństwa oraz ewentualne niezbędne czynności konserwacyjne.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Polska).
- Wszelkie sprawy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi leżaka należy kierować do Sprzedawcy.

19. NOTATKI