

PRODUCENT / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Sp. z o.o.



ZDJĘCIE POGLĄDOWE



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Edycja 2 / 2025-11-14

Podstawa pokojowa in.basic

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja używania przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (asystentów - rodziców, opiekunów), które będą przewożone na podstawie pokojowej in.basic. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących podstawę pokojową.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania podstawy pokojowej, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z podstawą pokojową in.basic, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam Sp. z o.o., ul. Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.eu



Wersja Instrukcji używania: PL **Edycja 2 / 2025-11-14**

MyWam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji używania bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.

Instrukcja w wersji elektronicznej będzie dostępna na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! Zdjęcia zawarte w Instrukcji używania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

MyWam Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych klasy I. System certyfikowany przez LL-C (Certification).



ISO 13485
LL-C (Certification)



SPIS TREŚCI

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI	2
SPIS TREŚCI	3
1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA	4
2. TABLICZKI	4
3. OZNACZENIE SYMBOLI	5
4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	5
5. OGÓLNA BUDOWA.....	6
6. FUNKCJE	7
6.1. Rozkładanie podstawy pokojowej	7
6.2. Składanie podstawy pokojowej	8
6.3. Blokada transportowa	9
6.4. Rączka do pchania	9
6.5. Hamulec	9
6.6. Regulacja wysokości podstawy pokojowej	10
6.7. Siedzisko MOUSE/MEWA	11
7. SPECYFIKACJA PODSTWY POKOJOWEJ in.basic	12
7.1. Skład surowcowy	12
8. DOSTAWA I NARZĘDZIA	12
9. MONTAŻ I DEMONTAŻ	12
10. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA.....	13
11. PRZENOSZENIE PODSTAWY POKOJOWEJ	13
12. WSIADANIA I ZSIADANIE Z PODSTAWY POKOJOWEJ.....	14
13. PRAWIDŁOWA POZYCJA W PODSTAWIE POKOJOWEJ	14
14. UŻYTKOWANIE	14
15. POKONYWANIE PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW	14
16. TRANSPORT W SAMOCHODZIE I W INNYCH POJAZDACH	15
17. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA	15
18. PRZECHOWYWANIE PODSTAWY POKOJOWEJ.....	15
19. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE	15
20. UTYLIZACJA.....	16
21. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH.....	17
22. LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH	18
23. KARTA GWARANCYJNA	19
24. NOTATKI	20

1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Podstawa pokojowa in.basic jest wyrobem medycznym klasy I wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić, stać lub siadać. Wyrób przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej lub leżącej. Dzięki swojej lekkiej, uproszczonej budowie sprawdza się w warunkach domowych i pomieszczeniach zamkniętych o stosunkowo równej powierzchni. Znacząco ułatwia wykonywanie czynności związanych z rehabilitacją oraz stanowi istotną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Podstawa pokojowa in.basic pasuje do siedzisk wózków Mouse i Mewa.

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie, niedowłady itp.

Wyrób przewidziany jest dla użytkowników o wzroście 80-125 cm oraz wadze do 40 kg. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

Przeciwwskazania:


W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

2. TABLICZKI

Tabliczka znamionowa



Tablica ostrzegawcza

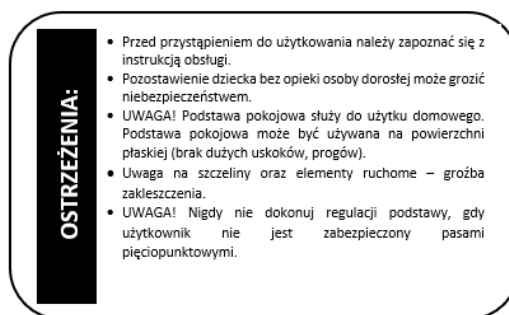

3. OZNACZENIE SYMBOLI

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją używania produktu		

4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zabrania się użytkowania podstawy pokojowej w sposób, do którego nie jest ona przeznaczona.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
- Zabrania się umieszczania na podstawie dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie podstawy i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka MEWA/MOUSE nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia. Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do podstawy wpływają na jego stabilność.
- **UWAGA!** Nigdy nie dokonuj regulacji podstawy, gdy użytkownik nie jest zabezpieczony pasami pięciopunktowymi.
- **UWAGA!** Podczas użytkowania podstawy oraz podczas składania i regulowania mechanizmów należy szczególnie uważać na elementy ruchome, gdyż może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/opiekuna w otworach/szczelinach pomiędzy elementami.
- **UWAGA!** Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).
- **UWAGA!** Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy podstawy, należy upewnić się, czy po obu stronach podstawy jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu podstawy.

OSTRZEŻENIE!



- Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją używania.
 - Pozostawienie użytkownika bez opieki osoby dorosłej może grozić niebezpieczeństwem.
 - UWAGA! Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).
 - Uwaga na szczeliny oraz elementy ruchome – groźba zakleszczenia.
 - UWAGA! Nigdy nie dokonuj regulacji podstawy, gdy użytkownik nie jest zabezpieczony pasami pięciopunktowymi.
-
- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania podstawy, jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą w celu otrzymania porady.

5. OGÓLNA BUDOWA



- 1- Rączka do pchania
- 2- Mechanizm regulacji kąta rączki do pchania
- 3- Zaczepy ramy do siedziska
- 4- Regulacja wysokości ramy

- 5- Mechanizm składania ramy
- 6- Hamulec
- 7- Koła skrętne

6. FUNKCJE

6.1. Rozkładanie podstawy pokojowej

Włącz hamulce, podnieś, rozłóż podpory poprzeczne i dokręć je pokrętłami gwiazdowymi znajdującymi się u podstawy ramy (Zdj. 1).



Zdj. 1

Rozłóż podpory poprzeczne i dokręć pokrętłami gwiazdowymi do ramy głównej pionowej (Zdj. 2-5).



Zdj. 2



Zdj. 3



Zdj. 4



Zdj. 5

6.2. Składanie podstawy pokojowej

Zablokuj hamulce i ustaw rączkę podstawy w pozycji wyjściowej (Zdj. 6).



Zdj. 6

Wypnij siedzisko i ustaw wysokość podstawy pokojowej na najniższą (oznaczoną cyfrą 1). Odkręć pokrętło gwiazdowe mocowania siedziska i schowaj podpory poprzeczne w mocowaniu (Zdj. 7).




Zdj. 7

- a) Odkręć pokrętło gwiazdowe znajdujące się przy ramie podstawy pokojowej. Wyjmij śruby i złoż odbezpieczone podpory do wewnątrz podstawy składając przy tym powoli ramę (Zdj. 8). Po złożeniu zamontuj z powrotem śruby i zablokuj ramę blokadą transportową (Zdj. 9).



Zdj. 8

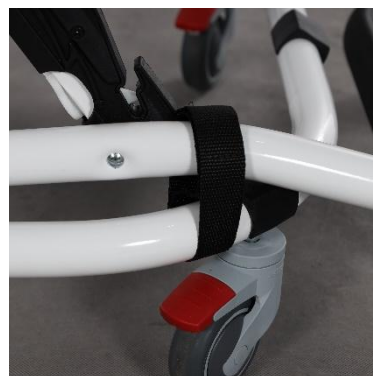

Zdj. 9

UWAGA! Podstawa pokojowa służy do użytku domowego. Podstawa pokojowa może być używana na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).

UWAGA! Nigdy nie dokonuj regulacji podstawy, gdy użytkownik nie jest zabezpieczony pasami pięciopunktowymi.

6.3. Blokada transportowa



6.4. Rączka do pchania

Wysokość rączki podstawy dopasuj według indywidualnych potrzeb opiekuna za pomocą przycisków po obu stronach rączki (Zdj. 10-11).



Zdj. 10



Zdj. 11

6.5. Hamulec



Odblokowany



Zablokowany



Hamulec służy tylko i wyłącznie do całkowitej blokady kół – nie ma funkcji hamowania dynamicznego.


6.6. Regulacja wysokości podstawy pokojowej

Odblokuj zacisk mimośrodowy (skrzydełka powinny znajdować się po prawej stronie) (Zdj. 12),



Zdj. 12

Dopasuj wysokość (skala wysokości została opisana cyframi 1-6) (Zdj. 13-14).

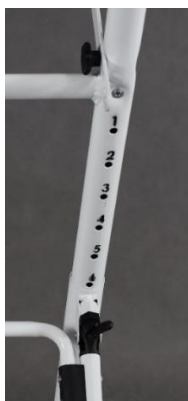

Zdj. 13



Zdj. 14

UWAGA! Przed zablokowaniem mechanizmu należy upewnić się, że wysokość po obu stronach jest identyczna!

Zablokuj zacisk (skrzydełka powinny znajdować się po lewej stronie) (Zdj. 15) i dociśnij ramę, aby upewnić się, że mechanizm regulacji wysokości został prawidłowo zablokowany.



Zdj. 15

UWAGA! Nigdy nie dokonuj regulacji podstawy, gdy użytkownik nie jest zabezpieczony pasami pięciopunktowymi.

6.7. Siedzisko MOUSE/MEWA

Montaż siedziska MOUSE/MEWA

Siedzisko zamontuj przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Zablokuj hamulce (Zdj. 16-17).



Zdj. 16 Dobrze



Zdj. 17 Źle

Nałóż siedzisko w zaczepy podstawy pokojowej aż do kliknięcia (Zdj. 18-19).



Zdj. 18



Zdj. 19

Demontaż siedziska MOUSE/MEWA:

Wciśnij w dół białe przyciski (Zdj. 20) i wyśnij siedzisko z zaczepów ramy.



Zdj. 20

7. SPECYFIKACJA PODSTAWY POKOJOWEJ in.basic

długość podstawy pokojowej	95 cm
szerokość podstawy pokojowej	58 cm
wysokość podstawy pokojowej	104 cm
masa całkowita	7,5 kg
regulacja wysokości siedziska	53 - 71 cm
długość podstawy złożonej do transportu	107 cm
szerokość podstawy złożonej do transportu	57 cm
wysokość podstawy złożonej do transportu	22 cm
max. waga pacjenta Mouse / Mewa	30 / 40 kg
wzrost pacjenta Mouse / Mewa	80-110 cm / 90-125 cm

7.1. Skład surowcowy

Stal malowana proszkowo, tkaniny 100% poliestr oraz tworzywo sztuczne (PP, PA, PU).

8. DOSTAWA I NARZĘDZIA

W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama,
- Instrukcja używania wraz z kartą gwarancyjną.

Przed użyciem:

- a. sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (w przypadku uszkodzenia opakowania należy w obecności dostawcy rozpakować i sprawdzić czy żaden z elementów nie został uszkodzony),
- b. sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zawartość przesyłki (w przypadku braku jakiegoś z komponentów należy skontaktować się ze Sprzedawcą).

Do montażu i demontażu podstawy pokojowej in.basic nie są wymagane żadne narzędzia.

9. MONTAŻ I DEMONTAŻ

- **Montaż.** Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany.

Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) rozłożyć ramę podstawy pokojowej regulując parametry:
 - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania,
 - wyregulować wysokość podstawy pokojowej,
- b) zamontować siedzisko MOUSE/MEWA.

- **Demontaż wózka:**

- a) zdemontować siedzisko,

- b) złożyć podstawę pokojową zamykając ją blokadą transportową.

10. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania podstawy pokojowej należy:

- Sprawdzić, czy rama została prawidłowo rozłożona.
- Sprawdzić, czy siedzisko zostało prawidłowo zamontowane do ramy podstawy pokojowej oraz czy mechanizm mocowania siedziska do ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować podstawę do potrzeb użytkownika, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska terapeutycznego i wysokość oparcia na plecy, odpowiednie pochylenie siedziska terapeutycznego i pochylenie oparcia na plecy, ustawić odpowiednie pochylenie podnóżka, wyregulować odpowiednią długość pasów pięciopunktowych. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
- Sprawdzić, czy tapicerka siedziska jest sucha.
- Zabezpieczyć użytkownika wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: pasy pięciopunktowe, wkładki zwężająco-splątujące, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, podnóżek, taśmy podnóżka na stopy, barierka zabezpieczająca lub stolik terapeutyczny. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika przed wypadnięciem i wysunięciem się z siedziska oraz zabezpieczenie stóp użytkownika przed spadnięciem z podnóżka. Upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla użytkownika odpowiednie i bezpieczne.
- Zadbać, żeby użytkownik nie był umieszczony w podstawie pokojowej bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką siedziska. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała użytkownika oraz względy higieniczne użytkownika.
- W przypadku użytkowników mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania podstawy.

11. PRZENOSZENIE PODSTAWY POKOJOWEJ

Podstawę pokojową można podnosić i przenosić oburącz po uprzednim demontażu siedziska w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia i złożeniu go.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia podstawy należy zachować szczególną ostrożność. Ramę należy przenosić po złożeniu i założeniu blokady transportowej.

12. WSIADANIA I ZSIADANIE Z PODSTAWY POKOJOWEJ

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z podstawy pokojowej należy umieścić ją jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulce są załączone, a płyta podnóżka podniesiona jest do góry w celu uniknięcia stawania na niej, użytkownik może się przesiadać.

Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia podstawy, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z podstawy, dziecko i żadna inna osoba nie stały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!

13. PRAWIDŁOWA POZYCJA W PODSTAWIE POKOJOWEJ

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał w siedzisku ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.

14. UŻYTKOWANIE

Podczas użytkowania podstawy pokojowej zawsze należy trzymać za rączkę do pchania, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się podstawy. Zwolnij hamulce jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj podstawę pokojową w bezpiecznym kierunku.

15. POKONYWANIE PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW

Zaleca się, aby niewielkie przeszkody (niewielkie progi lub wzniesienia) pokonywać tyłem. Inny sposób pokonywania progów może skutkować uszkodzeniem podstawy pokojowej. Jeżeli jest konieczność pokonania niewielkiej przeszkody przodem, należy przyblokować stopą specjalnie oznaczone miejsce na ramie i lekko pociągnąć do siebie rączkę do pchania, żeby unieść przednie koła podpory i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

16. TRANSPORT W SAMOCHODZIE I W INNYCH POJAZDACH

- Zdemontuj z podstawy pokojowej siedzisko i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Złóż podstawę pokojową i umieść ją w bagażniku.

Jeśli zdemontowana podstawa pokojowa nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielnym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę podstawy do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

17. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Tapicerkę siedziska można prać tylko ręcznie w temperaturze do 30°C.

Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.

W przypadku stosowania detergentów dedykowanych do tego typu materiału – postępować zgodnie z instrukcją stosowanego środka.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce
bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

18. PRZECHOWYWANIE PODSTAWY POKOJOWEJ

Podstawę pokojową czystą należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C. W przypadku przechowywania długotrwałego należy dodatkowo wykonać czynności opisane w pkt. 19 „co każdy jeden miesiąc”.

19. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z podstawy pokojowej należy regularnie i dokładnie poddawać go niżej opisanym przeglądom i czynnościom serwisowym-

W sytuacji, gdy użytkownik podstawy pokojowej nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać podstawę do specjalistycznego punktu serwisującego lub bezpośrednio do

Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

UWAGA! Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne podstawy pokojowej powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie podstawy pokojowej spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie podstawy pokojowej wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 22) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem podstawy pokojowej**
 - Kontrola sprawności hamulców - Po załączeniu hamulców koła powinny być zablokowane i nie mogą się obracać.
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy podstawy i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie siedziska terapeutycznego z oparciem na plecy do ramy podstawy, prawidłowe funkcjonowanie pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.
 - Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich kół nie jest uszkodzone lub zużyte.
 - Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- **Co każdy jeden miesiąc**
 - Czyszczenie podstawy pokojowej
 - Kontrola wizualna elementów ruchomych, łożysk, mechanizmy regulacyjne - nasmarować smarem silikonowym.
 - Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów.

20. UTYLIZACJA

Utylizacja i recykling: zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

21. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu

22. LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH

POLSKA

MyWam Sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.eu

23. KARTA GWARANCYJNA

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis Sprzedawcy:

.....
.....
.....

Warunki gwarancji

- Producent (Gwarant) udziela Kupującemu na zakupiony wyrób gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- Kupujący reklamujący wyrób powinien dostarczyć go do Sprzedawcy w opakowaniu, **czysty (wolny od płam, dodatkowego wyposażenia nienależącego do wyrobu, wilgoci, sierści itp.)** wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wyrobu.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wyrobu i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący (Kupujący) nie może żądać od Producenta naprawienia szkody w przypadku uszkodzenia przesyłki, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wyrobu i jego elementów.
- Okres gwarancji w przypadku uznania reklamacji wydłuża się o czas naprawy wyrobu, który liczony jest od momentu przekazania wyrobu Sprzedawcy w ramach gwarancji do dnia, w którym wyrób był gotowy do odbioru.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik wyrobu we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wyrobu niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z instrukcją używania lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wyrobu powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia wyrobu powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wyrobu, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wyrobu powoduje utratę gwarancji.
- **Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wyrobu.**
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wyrobu prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- Producent określa przewidywany czas użytkowania wyrobu na 4 lata. Dalsze użytkowanie po upływie tego okresu jest możliwe, natomiast biorąc pod uwagę dbałość o bezpieczeństwo i komfort użytkowania rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu technicznego przez producenta lub autoryzowany serwis. Usługa przeglądu jest odpłatna i obejmuje ocenę stanu technicznego urządzenia, weryfikację bezpieczeństwa oraz ewentualne niezbędne czynności konserwacyjne.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Polska).
- Wszelkie sprawy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi wyrobu należy kierować do Sprzedawcy.

24. NOTATKI