



Zdjęcie pogładowe



Instrukcja używania

Edycja 14 / 2025-10-02

Wózek inwalidzki specjalny – **YETI**

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy – **YETI JR.**

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja używania przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (asystentów użytkownika - rodziców, opiekunów), które będą przewożone w wózku. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących wózki.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z wózkiem inwalidzkim specjalnym YETI oraz wózkiem inwalidzkim specjalnym dziecięcym YETI JR., należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam Sp. z o.o., ul. Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.eu



Wersja Instrukcji używania: PL **Edycja 14 / 2025-10-02**

MyWam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji używania bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji. Instrukcja w wersji elektronicznej będzie dostępna na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! Zdjęcia zawarte w Instrukcji używania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

MyWam Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych klasy I. System certyfikowany przez LL-C (Certification).



ISO 13485
LL-C (Certification)



SPIS TREŚCI

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI	2
1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA	5
2. TABLICZKI	5
3. OZNACZENIE SYMBOLI	6
4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	6
5. OGÓLNA BUDOWA WÓZKA	7
6. FUNKCJE WÓZKA	9
6.1. Rozkładanie ramy	9
6.2. Składanie ramy	10
6.3. Blokada transportowa. Zakładanie i ściąganie blokady transportowej	11
6.4. Przednie koła. Blokada kierunku jazdy przednich kół	12
6.5. Tylnie koła. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę	12
6.6. System amortyzacji tylnych kół	13
6.7. Rączka do pchania wózka	14
6.8. Hamulec centralny	14
6.9. Stopka przechyłowa	15
6.10. Regulacja głębokości siedziska	15
6.11. Regulacja ramy w zakresie zmiany kąta siedziska	16
6.12. Regulacja ramy w zakresie wysokości oparcia	16
6.13. Regulacja ramy w zakresie kąta pochylenia oparcia	17
6.14. Podnózek	18
6.15. Tapicerka wózka	19
6.16. Pasy pięciopunktowe	21
6.17. Barijerka zabezpieczająca	21
6.18. Stolik terapeutyczny	22
6.19. Pasy odwodząco-stabilizujące	22
6.20. Wkładki zwężająco-splątujące	23
6.21. Zagłówek	23
6.22. Regulowany daszek z okienkiem	23
7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE	24
7.1. Torba turystyczna	24
7.2. Kosz na zakupy	24
7.3. Klin	25
7.4. Folia przeciwdeszczowa (zakładana na regulowanym daszku z okienkiem)	25
7.5. Rękawice zimowe	26
7.6. Śpiwór na nogi (zakładany na barierce zabezpieczającej)	26
7.7. Moskitiera (zakładana na regulowany daszek z okienkiem)	26
7.8. Parasolka przeciwsłoneczna	27
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA YETI/YETI JR.	27
8.1. Skład surowcowy wózka	28

9.	DOSTAWA I NARZĘDZIA	28
10.	MONTAŻ I DEMONTAŻ WÓZKA.....	28
11.	PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA.....	29
12.	PRZENOSZENIE WÓZKA.....	30
13.	WSIADANIE I ZSIADANIE Z WÓZKA INWALIDZKIEGO.....	30
14.	PRAWIDŁOWA POZYCJA W WÓZKU INWALIDZKIM.....	30
15.	UŻYTKOWANIE WÓZKA.....	31
16.	PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH.....	31
17.	POKONYWANIE PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW	31
18.	TRANSPORT W SAMOCHODZIE I W INNYCH POJAZDACH	31
19.	CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA	32
20.	PRZECHOWYWANIE WÓZKA	32
21.	SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE	32
22.	UTYLIZACJA.....	33
23.	ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH.....	33
24.	LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH	34
25.	KARTA GWARANCYJNA	35
26.	NOTATKI	36

1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wózek inwalidzki specjalny YETI oraz wózek inwalidzki specjalny dziecięcy YETI JR. jest wyrobem medycznym klasy I wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić, stać i/lub siadać. Wyrób przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej lub leżącej oraz na korekcji postawy i na tym polega jego przewidziane zastosowanie.

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie, niedowłady itp.

Wyrób przewidziany jest dla użytkowników od 130-175cm oraz wadze do 80 kg. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

Przeciwwskazania:


W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

2. TABLICZKI

Tabliczka znamionowa



Tabliczka ostrzegawcza

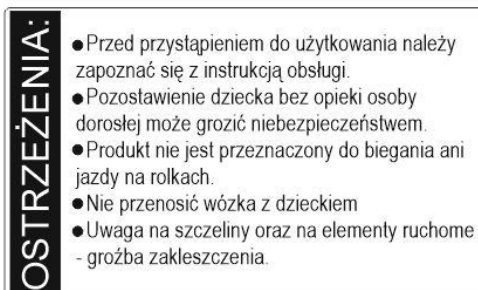

3. OZNACZENIE SYMBOLI

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją używania produktu		

4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego wózek nie jest przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez użytkownika!
- **Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa użytkownika znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się użytkownika.**
- Zabrania się umieszczania na wózku dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie wózka i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka Yeti nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia. Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do wózka wpływają na jego stabilność.
- **UWAGA!** Podczas użytkowania wózka oraz podczas składania i regulowania mechanizmów należy szczególnie uważać na elementy ruchome, gdyż może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/opiekuna w otworach/szczelinach pomiędzy elementami.
- **UWAGA!** W zależności od wykonanych regulacji - dotyczy ustawienia rączki do pchania wózka, regulacji wysokości oparcia, regulacji kątowej oparcia, regulacji głębokości siedziska, regulacji kątowej siedziska, regulacji kąta podnóżka oraz ustawienia podnóżka - to wózek ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- **UWAGA!** Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy wózka, należy upewnić się, czy po obu stronach wózka jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wózka.
- **UWAGA!** Temperatura wózka może wzrosnąć, gdy wózek jest wystawiony na działanie promieni słonecznych.

OSTRZEŻENIE!



- Nigdy nie pozostawiaj użytkownika bez opieki w wózku, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem!
- Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na łyżwach czy rolkach.
- Wózek nie jest przeznaczony jako siedzisko w pojazdach.
- Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
- Nie przenosić wózka z użytkownikiem.
- Wózek zapakowany jest w worek. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.

- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania wózka, jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą w celu otrzymania porady.

5. OGÓLNA BUDOWA WÓZKA

Wyposażenie podstawowe



- | | |
|---|---|
| 1- Regulowany daszek z okienkiem | 12- Wkładki zwężająco-splycające |
| 2- Zagłówek | 13- Pasy odwodząco-stabilizujące |
| 3- Pasy pięciopunktowe | 14- Mechanizm regulacji kątowej całego podnóżka |
| 4- Zdejmowana tapicerka oparcia i siedziska | 15- Regulacja głębokości siedziska |
| 5- Bariarka zabezpieczająca | 16- Regulacja długości podnóżka |
| 6- Szczelina do chowania nadmiaru tapicerki | 17- Blokada kierunku jazdy przednich kół |
| 7- Regulowany podnóżek z pasami | 18- Regulacja kąta oparcia |
| 8- Przednie koła skrętne | 19- Mechanizm regulacji kątowej oparcia |
| 9- Rączka do pchania wózka | 20- Owijacz na ramę |
| 10- Mechanizm regulacji kątowej rączki do pchania | 21- System amortyzacji tylnych kół |
| 11- Regulacja sznurkowa nadmiaru tapicerki | 22- Hamulec centralny |
| | 23- Ręczny hamulec |
| | 24- Wyłącznik hamulca |
| | 25- Wyłącznik hamulca |
| | 26- Wyłącznik hamulca |
| | 27- Wyłącznik hamulca |
| | 28- Wyłącznik hamulca |
| | 29- Wyłącznik hamulca |
| | 30- Wyłącznik hamulca |

- 23- Regulacja wysokości oparcia
- 24- Mechanizm składania ramy
- 25- Blokada mechanizmu składania ramy
- 26- Blokada transportowa
- 27- Regulacja kąta siedziska
- 28- Stopka przechyłowa
- 29- Mechanizm szybkiego montażu kół tylnych
- 30- Tyłne koła

Wypożyczenie dodatkowe



- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1- Kosz na zakupy | 8- Stolik terapeutyczny |
| 2- Śpiwór na nogi | 9- Rękawice zimowe |
| 3- Parasolka przeciwśłoneczna | |
| 4- Moskitiera | |
| 5- Folia przeciwdeszczowa | |
| 6- Torba turystyczna | |
| 7- Klin | |

6. FUNKCJE WÓZKA

6.1. Rozkładanie ramy

1



Ściągnij blokadę transportową

2



Pociągnij oparcie do siebie

3



Pociągnij rączkę do siebie


4



5



6

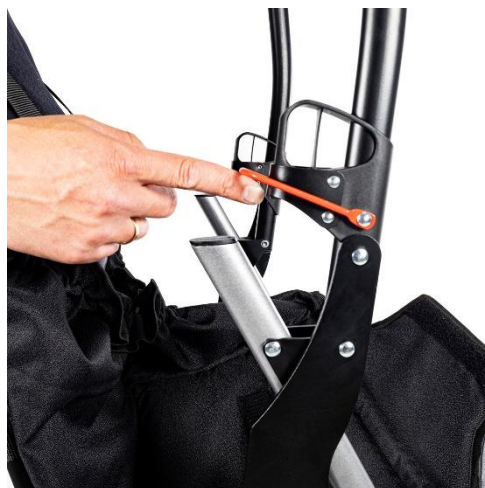



6.2. Składanie ramy



3



4



5



UWAGA! Zwróć uwagę by rączka do pchania oraz podnóżek były ustawione w pozycji nie kolidującej ze sobą.

6.3. Blokada transportowa. Zakładanie i ściąganie blokady transportowej



Założona blokada



Ściągnięta blokada

6.4. Przednie koła. Blokada kierunku jazdy przednich kół

Blokowanie przednich kół



Odblokowywanie przednich kół



6.5. Tylne koła. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę

Montaż kół



Wciśnij w miejscu wgłębienia



Demontaż kół



6.6. System amortyzacji tylnych kół



Zawieszenie twarde



Zawieszenie miękkie

6.7. Rączka do pchania wózka

Mechanizm regulacji kątowej rączki do pchania



Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt rączki do pchania.

Regulacja kątowa rączki do pchania



6.8. Hamulec centralny



Hamulec centralny służy tylko i wyłącznie do całkowitej blokady kół – nie ma funkcji hamowania dynamicznego.

UWAGA! Należy regularnie kontrolować stan hamulca oraz usuwać ewentualny brud i błoto.

6.9. Stopka przechyłowa



Używanie stopki przechyłowej ułatwia wjazd wózka na niewielkie progi lub krawężniki.

6.10. Regulacja głębokości siedziska




Minimalna głębokość siedziska



Maksymalna głębokość siedziska

Pociągnij do siebie lub wsuń siedzisko.

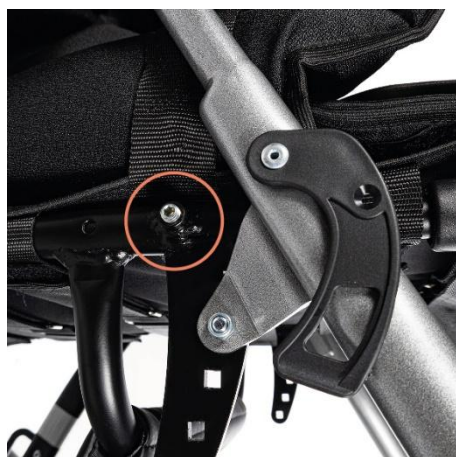


PAMIĘTAJ! Przed regulacją głębokości siedziska poluzuj pasy tapicerki siedziska.

UWAGA! Do regulacji głębokości siedziska należy użyć klucza imbusowego (w zestawie).

6.11. Regulacja ramy w zakresie zmiany kąta siedziska

Mechanizm regulacji kąta siedziska

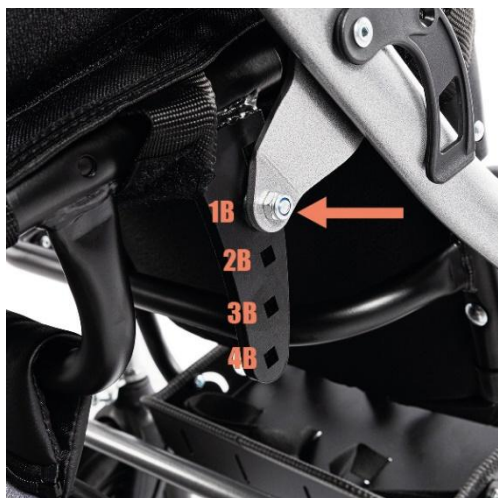

UWAGA! Do przykręcenia/odkręcenia śruby użyj klucza 10 (w zestawie).

Regulacja kąta siedziska




6.12. Regulacja ramy w zakresie wysokości oparcia




Pociągnij do góry lub w dół oparcie.

Minimalne ustawienie wysokości oparcia

Maksymalne ustawienie wysokości oparcia

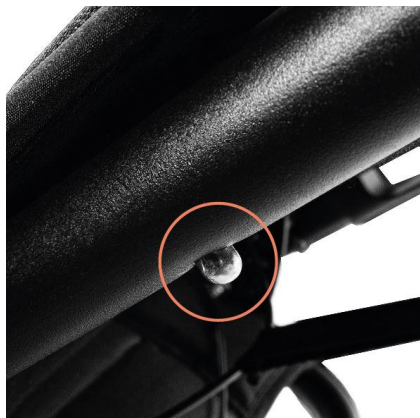

Przycisk wskazujący najwyższą wysokość oparcia

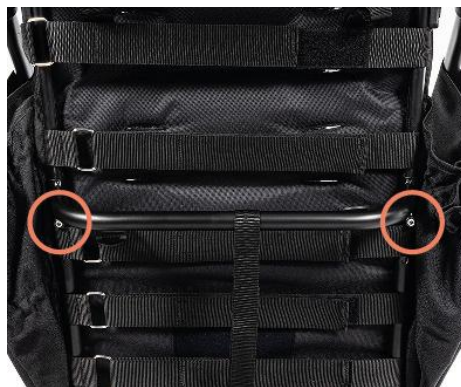

PAMIĘTAJ! Przed regulacją wysokości oparcia poluzuj pasy z tyłu tapicerki oparcia.

UWAGA! Do regulacji wysokości oparcia należy użyć klucza imbusowego (w zestawie).

6.13. Regulacja ramy w zakresie kąta pochylenia oparcia

Mechanizm regulacji kątowej oparcia



Upewnij się, że bolce zaskoczyły po obu stronach wózka.

Regulacja kątowa oparcia



Uwaga! Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.

6.14. Podnóżek

Regulacja wysokości podnóżka



Minimalna wysokość



Maksymalna wysokość

Regulacja kąta pochylenia podnóżka



Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt podnóżka.




Uwaga! W czasie transportu, przechowywania, rehabilitacji, wsiadania i wysiadania z wózka, płyta podnóżka musi być złożona.

6.15. Tapicerka wózka

Tapicerka oparcia



Montaż tapicerki oparcia

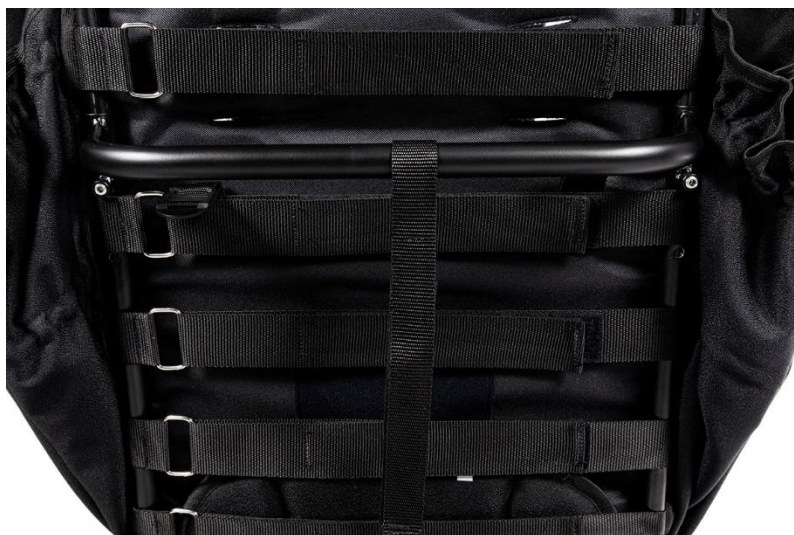

Regulacja boków tapicerki za pomocą ściągaczy



Tapicerka siedziska



Uwaga! Każdorazowa zmiana parametrów wózka wymaga ponownej regulacji tapicerki.

Owijacze ramy



Zamontuj w miejscu gdzie są łańcuchy (np. łańcuchy podnóżka).

6.16. Pasy pięciopunktowe



Uwaga! Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.


Miejsce montażu pasów pięciopunktowych na oparciu



6.17. Bariierka zabezpieczająca



6.18. Stolik terapeutyczny

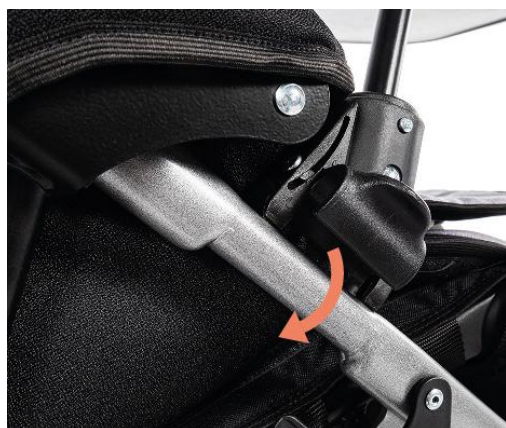

Maksymalne obciążenie wynosi 3kg.

6.19. Pasy odwodząco-stabilizujące



6.20. Wkładki zwężająco-spływające**6.21. Zagłówek****6.22. Regulowany daszek z okienkiem****Mechanizm montażu daszka do ramy wózka**

Wsuń mocowanie na daszku do mocowania na ramie wózka.

Demontaż za pomocą czerwonego przycisku na zewnątrz mocowania na daszku po obu stronach.

Zmiana wielkości powierzchni daszka



7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

7.1. Torba turystyczna



Maksymalne obciążenie torby wynosi 2kg.

7.2. Kosz na zakupy

Wysokość montażu kosza



Maksymalne obciążenie kosza na zakupy wynosi 3kg.

7.3. Klin

Montaż klina



Demontaż klina



7.4. Folia przeciwdeszczowa (zakładana na regulowanym daszku z okienkiem)



7.5. Rękawice zimowe

1



2



7.6. Śpiwór na nogi (zakładany na barierce zabezpieczającej)



7.7. Moskitiera (zakładana na regulowany daszek z okienkiem)



7.8. Parasolka przeciwsłoneczna



8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA YETI/YETI JR.

długość wózka	114,5 - 146 cm
szerokość wózka	67 cm
wysokość wózka	117-133 cm
masa całkowita	23 – 26 kg
efektywna głębokość siedziska	31-45 cm
szerokość siedziska	28* / 43 cm
wysokość oparcia	65 - 85cm
szerokość oparcia	25*/42 cm
odległość podnóżka od siedziska / ilość regulacji	28,5 - 43,5 cm / 7 pozycji
długość wózka złożonego do transportu	110 cm
szerokość wózka złożonego do transportu	67 cm
wysokość wózka złożonego do transportu	44-60 cm
nośność kosza	3 kg
nośność torby	2 kg
max. waga użytkownika	80 kg
wzrost użytkownika	130-175 cm
kąt płaszczyzny siedziska / ilość regulacji	ok 9,5°-29° / 5
kąt pochylenia oparcia / ilość regulacji	ok 3°-99° / 8 + leżąca
kąt podnóżka / ilość regulacji	ok 80°-180° / 6 pozycji

UWAGI:

*) wartości podane z wkładkami

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych

8.1. Skład surowcowy wózka

Stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne (PP, PCV, PA, PU).

9. DOSTAWA I NARZĘDZIA

W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama wózka z siedziskiem i oparciem oraz koła,
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem,
- Instrukcja używania wraz z kartą gwarancyjną,
- Klucz imbusowy,
- Klucz 10 mm.

Przed użyciem:

- a. sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (w przypadku uszkodzenia opakowania należy w obecności dostawcy rozpakować i sprawdzić czy żaden z elementów nie został uszkodzony),
- b. sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zawartość przesyłki (w przypadku braku jakiegoś z komponentów należy skontaktować się ze Sprzedawcą).

Do montażu i demontażu wózka nie są wymagane żadne narzędzia.

Do regulacji wysokości oparcia oraz głębokości siedziska potrzebny jest klucz imbusowy. Do regulacji mechanizmu kąta siedziska potrzebny jest klucz 10 i śrubokręt.

10. MONTAŻ I DEMONTAŻ WÓZKA

Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany.

Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) zamontować koła tylne na oś,
- b) rozłożyć ramę wózka wraz z podnóżkiem regulując parametry:
 - załączyć / wyłączyć blokadę kierunku jazdy przednich kół,
 - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania wózka,
 - wyregulować głębokość siedziska,
 - ustawić kąt pochylenia siedziska,
 - wyregulować wysokość oparcia na plecy,
 - ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy,
 - wyregulować długość pasów pięciopunktowych,
 - wyregulować wysokość podnóżka oraz kąt pochylenia podnóżka,
- c) wyregulować tapicerkę,
- d) wyregulować szerokość użytkową siedziska,
- e) wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące,
- f) wyregulować położenie zagłówka,
- g) wyregulować daszek z okienkiem,
- h) założyć barierkę bezpieczeństwa,
- i) zamontować odpowiednie wyposażenie dodatkowe oraz wyregulować parametry:
 - założyć stolik terapeutyczny (opcje dodatkowe),
 - założyć i wyregulować klin (opcja dodatkowa),

- założyć torbę turystyczną (opcja dodatkowa),
- założyć kosz na zakupy (opcja dodatkowa),
- założyć wybrane elementy wyposażenia dedykowanego porom roku:
 - śpiwór na nogi (opcja dodatkowa),
 - rękawice zimowe (opcja dodatkowa),
 - moskitiera (opcja dodatkowa),
 - folia przeciwdeszczowa (opcja dodatkowa),
 - parasolka (opcja dodatkowa).
- Demontaż wózka. W celu demontażu wózka należy:
 - a) zdemontować wyposażenie dodatkowe,
 - b) odpiąć tapicerkę (elementy boczne) z ram bocznych wózka,
 - c) złożyć podnóżek i ramę wózka,
 - d) odpiąć koła tylne,
 - e) złożyć wózek zamykając go blokadą transportową.

11. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy:

- Sprawdzić, czy rama wózka została prawidłowo rozłożona oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować wózek do potrzeb użytkownika, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska i wysokość oparcia na plecy, odpowiednie pochylenie siedziska i pochylenie oparcia na plecy, ustawić odpowiednie pochylenie podnóżka, wyregulować odpowiednią siłę naciągu pasów na oparciu i na siedzisku, sprawdzić długość pasów pięciopunktowych. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
- Sprawdzić, czy tapicerka wózka jest sucha.
- Zabezpieczyć użytkownika wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: pasy pięciopunktowe, wkładki zwężająco-splątujące, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, podnóżek, taśmy podnóżka na stopy, barierka zabezpieczająca lub stolik terapeutyczny. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika przed wypadnięciem i wysunięciem się z wózka oraz zabezpieczenie stóp użytkownika przed spadnięciem z podnóżka. Upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla użytkownika odpowiednie i bezpieczne.
- Zadbać, żeby użytkownik nie był umieszczony w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką wózka. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała użytkownika oraz względy higieniczne użytkownika.
- W przypadku użytkowników mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko wózka specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania wózka.

12. PRZENOSZENIE WÓZKA

Najlepszym sposobem przenoszenia wózka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół (patrz zdjęcie obok).

W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe (np. w celu transportu wózka w samochodzie), to ze względów bezpieczeństwa, wózek można podnosić i przenosić oburącz po uprzednim demontażu wyposażenia dodatkowego w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia i złożeniu go.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka należy zachować szczególną ostrożność. Ramę należy przenosić po złożeniu i założeniu blokady transportowej.

Nie należy używać do przenoszenia wózka wyposażenia dodatkowego – grozi jego uszkodzeniem.



13. WSIADANIE I ZSIADANIE Z WÓZKA INWALIDZKIEGO

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka inwalidzkiego należy umieścić wózek jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulec jest załączony, a podnóżek został złożony w celu uniknięcia stawania na nim, użytkownik może zostać umieszczony w wózku.

Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wózka, użytkownik i żadna inna osoba nie stawały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!

14. PRAWIDŁOWA POZYCJA W WÓZKU INWALIDZKIM

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka, a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka, co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.



UWAGA! Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa użytkownika znajdzie się poniżej linii miednicy. **Zabronione jest stosowanie takiej pozycji**, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się użytkownika.



Zabronione ustawienie wózka

15. UŻYTKOWANIE WÓZKA

Podczas użytkowania wózek zawsze należy trzymać za rączkę do pchania wózka, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się wózka. Zwolnij hamulec centralny jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj wózek w bezpiecznym kierunku.

16. PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawiać wózek przodem do kierunku jazdy. Ogranicz prędkość na powierzchniach pochyłych i poruszaj się jak najwolniej. Osoba prowadząca wózek musi dysponować odpowiednią siłą pozwalającą kontrolować stabilność wózka inwalidzkiego.

Zawsze należy pamiętać o tym, że położenie środka ciężkości wózka ulega zmianie przy pokonywaniu nierówności lub pochyłości w terenie. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i asekurować wózek.

Podczas korzystania z podjazdów należy upewnić się, że podjazd jest odpowiedni, że koła wózka są wystarczająco wysokie do pokonania podjazdu, że rama wózka nie będzie się stykała z podjazdem oraz należy zapewnić pomoc drugiej osoby, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, uszkodzenia produktu i urazu użytkownika.

17. POKONYWANIE PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW

Podczas pokonywania małych przeszkód (niewielkie progi, małe krawężniki itp.), należy przyblokować stopą stopkę przechyłową oraz rączkę do pchania wózka w kierunku w dół i do siebie, żeby unieść przednie koła wózka i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania wózka do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła wózka i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

18. TRANSPORT W SAMOCHODZIE I W INNYCH POJAZDACH

- Zdemontuj z wózka wszystkie akcesoria i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Złóż wózek i umieść go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielnym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z wózkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.



Wózków z rodziny YETI nie należy używać jako siedziska do przewożenia użytkownika w pojeździe.

19. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Tapicerkę można prać tylko ręcznie w temperaturze do 30°C.

Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.

W przypadku stosowania detergentów dedykowanych do tego typu materiału – postępować zgodnie z instrukcją stosowanego środka.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce
bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

20. PRZECHOWYWANIE WÓZKA

Wózek czysty należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C. W przypadku przechowywania długotrwałego należy dodatkowo wykonać czynności opisane w pkt. 21 „co każdy jeden miesiąc”.

21. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wózka należy regularnie i dokładnie poddawać go niżej opisanym przeglądom i czynnościom serwisowym.

W sytuacji, gdy użytkownik wózka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wózek do specjalistycznego punktu serwisującego wózki inwalidzkie lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

UWAGA! Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne wózka powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji wózka. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 24) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy wózka wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem wózka**
 - Kontrola sprawności hamulca centralnego - Po załączeniu hamulca centralnego oba tylne koła wózka powinny być zablokowane i nie mogą się obracać.
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie siedziska z oparciem na plecy do ramy wózka, prawidłowe zamontowanie wszystkich czterech kół, prawidłowe funkcjonowanie pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.
 - Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte.
 - Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- **Co każdy jeden miesiąc**
 - Czyszczenie wózka.
 - Kontrola wizualna elementów ruchomych, łożysk, mechanizmy regulacyjne - nasmarować smarem silikonowym.
 - Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów.

22. UTYLIZACJA

Utylizacja i recykling: zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

23. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu

24. LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH

POLSKA

MyWam Sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.eu

25. KARTA GWARANCYJNA

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

.....
.....
.....

Warunki gwarancji

- Producent (Gwarant) udziela Kupującemu na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- **Kupujący reklamujący wózek powinien dostarczyć wózek do Sprzedawcy w opakowaniu, czysty (wolny od plam, dodatkowego wyposażenia nienależącego do wózka, wilgoci, sierści itp.) wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka.**
- **Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.**
- Reklamujący (Kupujący) nie może żądać od Producenta naprawienia szkody w przypadku uszkodzenia przesyłki, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i jego elementów.
- Okres gwarancji w przypadku uznania reklamacji wydłuża się o czas naprawy wózka, który liczony jest od momentu przekazania wózka Sprzedawcy w ramach gwarancji do dnia, w którym wózek był gotowy do odbioru.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik wózka we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z instrukcją używania lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wózka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji.
- **Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka.**
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wózka prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- Producent określa przewidywany czas użytkowania wyrobu na 4 lata. Dalsze użytkowanie po upływie tego okresu jest możliwe, natomiast biorąc pod uwagę dbałość o bezpieczeństwo i komfort użytkowania rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu technicznego przez producenta lub autoryzowany serwis. Usługa przeglądu jest odpłatna i obejmuje ocenę stanu technicznego urządzenia, weryfikację bezpieczeństwa oraz ewentualne niezbędne czynności konserwacyjne.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Polska).
- Wszelkie sprawy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi wózka należy kierować do Sprzedawcy.

26. NOTATKI