

HISTORIA NAPRAW

DATA	RODZAJ NAPRAWY	PODPIS



MyWam Sp. z o.o.
Plebiscytowa 3
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP: 627 273 67 93

+48 32 733 11 31
mywam@mywam.eu



www.mywam.eu



PASY I KAMIZELKI

Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna



PAS DWUPUNKTOWY BIODROWY



PAS CZTEROPUNKTOWY - SZELKOWY



PAS ODWODZĄCO - STABILIZUJĄCY



KAMIZELKA ZABEZPIEZAJĄCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE:

Pasy i kamizelki firmy MyWam są akcesoriami pomocniczymi wykorzystywanymi do poprawy i stabilizacji sylwetki dziecka w pozycji siedzącej i stojącej oraz zwiększenia jego bezpieczeństwa czynnego i biernego. Najczęściej stosowane przy wózkach inwalidzkich, fotelikach terapeutycznych, schodolazach, pionizatorach itp.

CECHY PRODUKTU:

Pasy i kamizelki wykonane są z wysokiej jakości materiałów zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza. Wytrzymałe taśmy kaletnicze i przyjazne dla ciała tkaniny tapicerskie zapewniają wysoką trwałość i komfort użytkowania naszych produktów. Wszystkie elementy zapięć, regulacji i połączeń pochodzą tylko od sprawdzonych producentów.

MONTAŻ:

Mocowanie każdego produktu należy rozpocząć od przypięcia taśm mocujących na wysokości odpowiadającej części ciała dziecka, która ma być przez produkt zabezpieczona lub stabilizowana. Taśmę należy zawsze mocować do stałych elementów sprzętu, w którym chcemy dziecko zabezpieczyć. Pierwszy montaż należy wykonać bez dziecka. Kiedy pas jest pewnie zamocowany do sprzętu, możemy posadzić w nim dziecko i przy pomocy regulatorów dokonać regulacji naprężenia taśm odpowiednio do sylwetki dziecka.

ZALECENIA I UWAGI:

- Ze względu na przeznaczenie wyrobu należy **ZAWSZE** upewnić się, że zapięcie lub klamra są poprawnie zapięte.
- **NIGDY** nie należy używać sprzętu, jeżeli stwierdzi się jego uszkodzenie – szczególnie nadprucie szwów, pęknięcie taśmy nośnej lub elementów z tworzywa.
- Stabilizując dziecko, szczególną uwagę należy zwrócić na naciąg taśm:
Zbyt mocny – dziecko nie może swobodnie oddychać, taśmy utrudniają krążenie krwi, widoczne odciski taśm.
Zbyt słaby – pasy słabo stabilizują dziecko, taśmy zwisają swobodnie, dziecko wysuwa się między pasem a sprzętem.
- Nie należy wykorzystywać produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie zaleca się stosowania produktu bezpośrednio na ciało.

KONSERWACJA:

W celu przedłużenia żywotności produktu należy wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem i dbać o jego czystość. Nieużywany przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Prać ręcznie w temp. 30 °C.
- Używać delikatnych detergentów: mydło, płyn do prania.
- Zaleca się stosowanie gąbki lub miękkiej szcieteczki.
- Nie chlorować, nie wybielać, nie prać na sucho, nie prasować.
- Suszyć w temperaturze pokojowej.

KARTA GWARANCYJNA



SERIA I NUMER:

DATA ZAKUPU:

PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY:

WARUNKI GWARANCJI:

MyWam Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie gwarantuje sprawne działanie wskazanego w niniejszym dokumencie urządzenia, zwanego dalej „Produktem”, w przypadku użytkowania produktu zgodnie z warunkami technicznymi – eksploatacyjnymi, opisanymi w Instrukcji obsługi, jak również zgodnie z przeznaczeniem Produktu.

Przez bezpłatną naprawę gwarancyjną określa się wykonanie przez Gwaranta czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.

1. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niniejszy dokument stanowi zobowiązanie Gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych rzeczy sprzedanej tj. do dokonania czynności o charakterze specjalistycznym, właściwych dla usunięcia wady rzeczowej objętej gwarancją, umożliwiających jej sprawność eksploatacyjną.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu i wynosi 12 m-cy.
4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień, wynikających z niniejszej gwarancji, jest doręczenie Gwarantowi, w chwili zwracania się o usługę, łącznie: poprawnie i kompletnie wypełnionej karty gwarancyjnej, dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu wadliwego produktu (fakturę VAT lub paragon).
5. Produkt oddany do naprawy gwarancyjnej powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia jego niekompletności serwis ma prawo odmówić przyjęcia go do naprawy. W przypadku dostarczenia Produktu brudnego, serwis może odmówić jego przyjęcia, lub na koszt klienta i za jego pisemną zgodą, dokonać czyszczenia.
6. Naprawa gwarancyjna Produktu zostanie dokonana w terminie możliwie najkrótszym. Jeżeli usunięcie wady, z powodu jej skomplikowania, wymaga znacznego nakładu pracy lub sprowadzenia części zamiennych, termin ten ulegnie stosownemu wydłużeniu, przy czym serwis doloży należytej staranności, aby usunąć wadę w możliwie najkrótszym terminie.
7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści kupującego.
8. Gwarant informuje, iż prowadzi również serwis pogwarancyjny urządzeń zakupionych w punkcie sprzedaży.